

Etac Hi-Loo

Návod k použití

 **etac**[®]

01/2017



VYROBCE

Etac Supply Center AB
Langgatan, 12
Box 203, 334 24 ~~Anderstorp~~ Sweden
tel. +46 371 58 73 00
www.etac.com

DISTRIBUCE A SERVIS


MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 - ~~Spořilov~~
tel.: +420 272 761 102
www.meyra.cz

CE

Obecné


Etac Hi-Loo s úchytkami je toaletní nástavec pro použití na toaletní míse. Byl vyvinut s cílem usnadnit používání toalety osobám s omezenou pohyblivostí a těm, kteří potřebují vyvýšené toaletní sedátko.

Instalace a použití Obrázek A

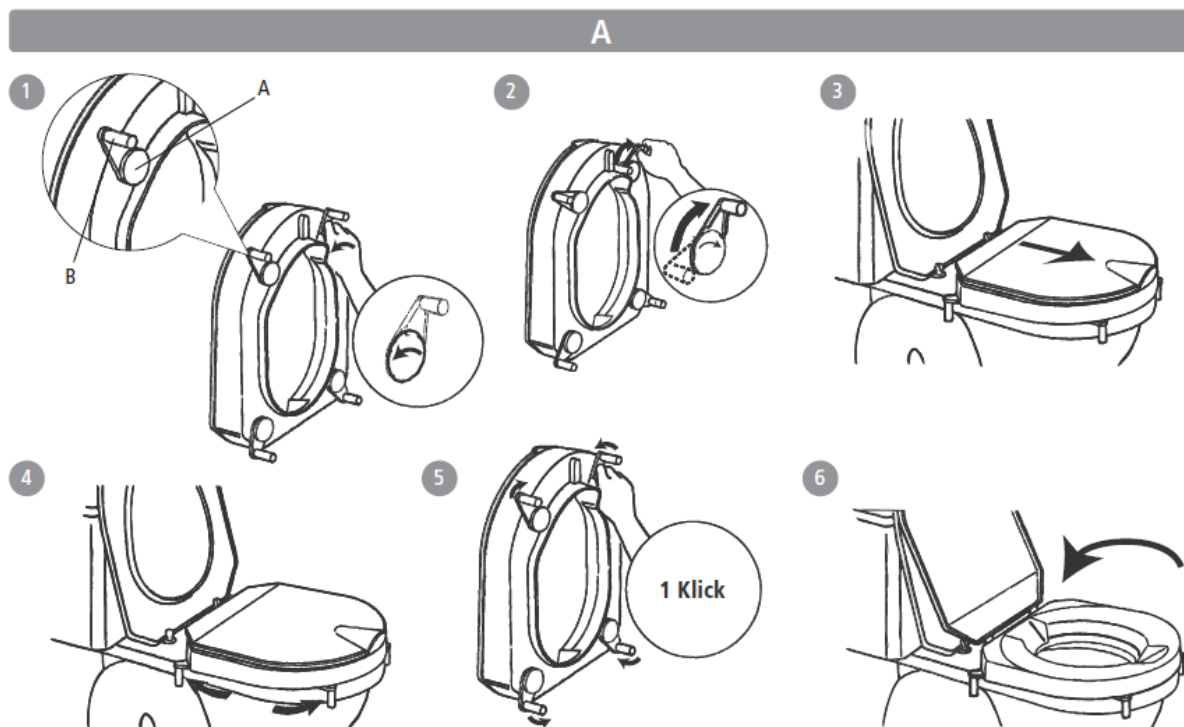

1. Odšroubujte čtyři upevňovací šrouby. Šrouby je potřeba pouze povolit, prosím nedemontujte je úplně!
2. Čtyři úchytky vysuňte směrem k vnější straně sedátka. Utáhněte šrouby tak, aby bylo možné s úchytkami pootočit ještě o jedno cvaknutí.
3. Umístěte nástavec Hi-Loo na toaletní mísu a nastavte ho tak, aby se dotýkal na přední straně mísy.
4. Otočte zadními a předními úchytkami směrem k míse.
5. Pomalu sundejte nástavec Hi-Loo z mísy. Všechny čtyři úchytky pootočte o jedno cvaknutí směrem dovnitř. Nyní utáhněte šrouby. Důležité: Úchytky musí zůstat na svém místě!
6. Nástavec Hi-Loo položte na mísu, nejprve předními úchytkami. Poté zatlačte směrem dolů a připevněte zbytek nástavce Hi-Loo k míse. Zkontrolujte, zda je bezpečně připevněn.

Údržba a bezpečnost..... Obrázek B

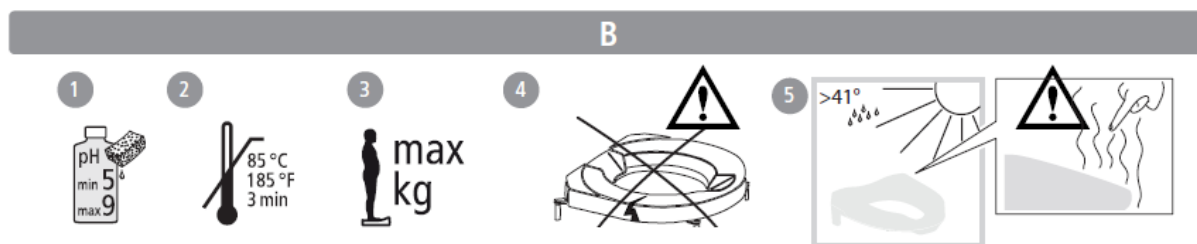

1. Výrobek čistíte/dezinfikujete pomocí běžných, neabrasivních prostředků s pH mezi 5 a 9, nebo 70 % dezinfekčním roztokem. Opláchněte a usušte. Výrobek nevyžaduje žádnou další údržbu.
2. Výrobek je možné bezpečně čistit ve sterilizátoru na 85°C po dobu 3 minut. To platí při opětovném uvedení do provozu.
3. Maximální hmotnost uživatele (viz technické specifikace).
4. Vadný výrobek není dovoleno používat.
5. Nahřátý nástavec může způsobit popáleniny.
6. Použité materiály jsou odolné proti korozi. Použité materiály jsou odolné vůči všem běžným dezinfekčním prostředkům.

Záruka, životnost

7. Záruka 5 let na materiál a výrobní vady.
8. Životnost 10 let.

Technické specifikace Obrázek C

6 cm	360 mm	390 mm	200 mm	270 mm	1.1 kg	150 kg
10 cm	360 mm	390 mm	200 mm	270 mm	1.5 kg	150 kg