

# MEYRA®

## Návod k použití



### DUBASTAR

#### 3013742 Závěsná sedačka do vany s hygienickým výřezem

#### 3013752 Závěsná sedačka do vany s hygienickým výřezem a zádovou opěrou

Sedačka Dubastar slouží k usnadnění mytí ve vaně osobám s omezenou pohyblivostí.

Vanové sedačky Dubastar lze nastavit na všechny běžné šířky vany. Sedací plochu s hygienickým výřezem a zádovou opěrkou lze sejmout vytažením směrem nahoru a vyčistit.

Nosnost uvedených typů sedaček je 120 kg.

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nikdy nepřekračujte nosnost sedačky.
- Na sedačku nikdy nestoupejte.
- Seděte si vždy do středu sedačky.
- Dbejte na to, aby závěsná ramena byla správně nastavená podle šířky vany, tzn., že závěsná ramena musejí plně ležet na okraji vany.
- Závěsná ramena a okraj vany v místě kontaktu udržujte čisté (bez mýdla a sprchových gelů) – nebezpečí sklouznutí.
- Před každým použitím sedačku prohlédněte, zda není poškozená.
- Před použitím zkontrolujte, zda je vanová sedačka správně zapřená.
- Zdeformovanou nebo jakkoli poškozenou sedačku nepoužívejte.
- Opotřebovanou sedačku nepoužívejte a poradte se o možnosti výměny dílů se servisním technikem prodejce.
- Nikdy nenechávejte děti bez dozoru, pokud se nachází v blízkosti sedačky.
- Nikdy neprovádějte opravu sedačky sami.

**CE** Tento výrobek splňuje základní požadavky směrnice 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

#### KONTRAINDIKACE

- Neschopnost udržení vzpřímené pozice.
- Poruchy koordinace a vnímání.
- Použití pomůcky vždy konzultujte s lékařem.

#### SEDAČKA (obrázek 3)

Desku sedačky (1) lze sejmout lehkým tlakem zdola. Nasazování se provádí po srovnání desky lehkým tlakem shora.

#### ZÁDOVÁ OPĚRKA

Vanová sedačka se zádovou opěrkou, model 3012852 (obrázek 6)

- Opěradlo (8) sejměte vytažením nahoru.
- Nasazení se provádí až nadoraz (70 mm).

#### PÉČE A ÚDRŽBA

- Sedačku pravidelně čistěte běžnými čistícími prostředky.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla či ostré předměty. Doporučujeme sedačku každých 6 měsíců nechat zkontrolovat servisním technikem prodejce. Důležité je zkontrolovat hlavně šroubové a svěrací spoje.
- Likvidaci sedačky je třeba provést v souladu s národními zákonnými předpisy.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Všechny rozměry jsou v cm a hmotnosti v kg.

Model:	3013742	3013752
Hloubka:	40	44
Šířka:	71 – 89	71 – 89
Sedací plocha:	40 x 40	40 x 40
Výška sedu:	-	-
Výška zádové opěrky:	-	33
Nosnost:	120	120
Hmotnost:	2,5	3
Barva		bílá
Teplota vody		max. 80°C

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

### ROZSAH DODÁVKY (obrázek 1) Vanová sedačka model 3013742

- 1 x sedací deska (1)
- 1 x boční rám pravý (2)
- 1 x boční rám levý (3)
- 1 x trubka sedačky přední (4)
- 1 x trubka sedačky zadní (5)
- 1 x montážní návod

### Vanová sedačka model 3013752

- 1 x jako 3013742 + navíc:
- 1 x zádová trubka pravá (6)
- 1 x zádová trubka levá (7)
- 1 x opěradlo (8)
- 4 x šroubové spoje (9)

## MONTÁŽ

### Vanová sedačka model 3013742

1. Po uvolnění svěracích šroubů nastavte šířku vany. – Boční rámy vytáhněte podle šířky vany po obou stranách stejně. Svěrací šrouby opět utáhněte (obrázek 2).
2. Přitlačte desku sedačky (1) (obrázek 3).

### Vanová sedačka se zádovou opěrkou, model 3013752

1. Jako 3012842
3. Namontujte zádové trubky (obrázek 4) - Zádové trubky umístěte zepředu k držákům (obrázek 5) a přišroubujte. Matice se našroubují z vnitřní strany (obrázek 5/(9)).
4. Nasuňte opěradlo (obrázek 6/(8)).
5. Utáhněte šrouby (obrázek 7/(9)).

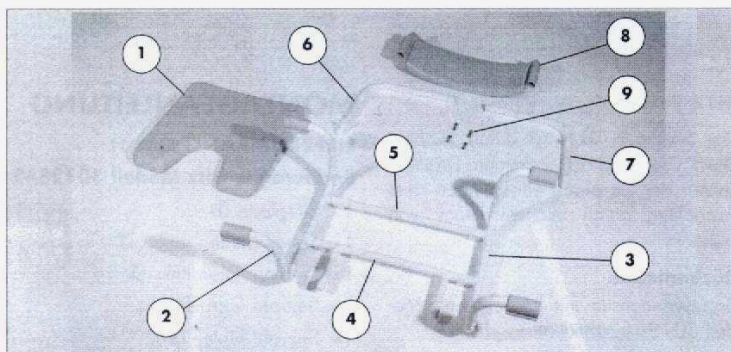


Abb.1

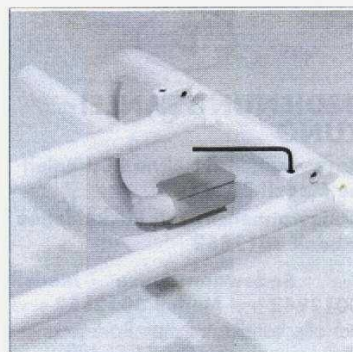


Abb.2

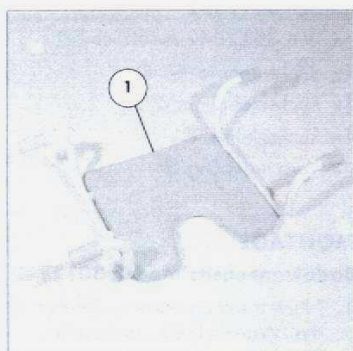


Abb.3

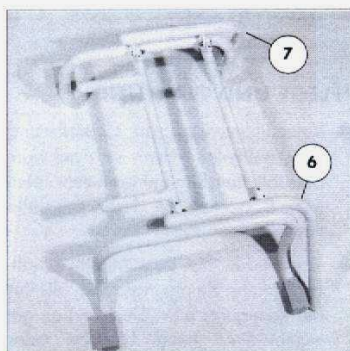


Abb.4

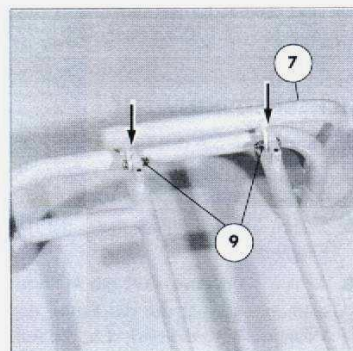


Abb.5

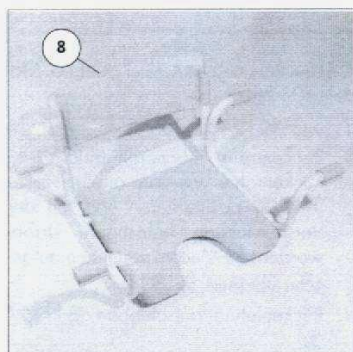


Abb.6

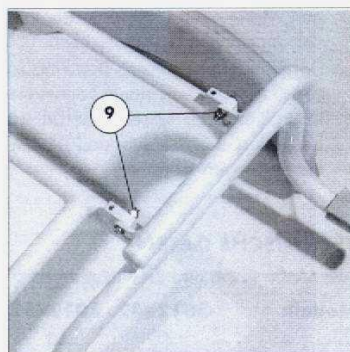


Abb.7

**Výrobce:**

MEYRA GmbH  
Meyra-Ring 2 · D-32689 Kalletal-Kalldorf

**Distributor pro ČR:**

MEYRA ČR s.r.o.  
Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4  
tel.: 272 761 102  
e-mail: meyra@meyra.cz

Datum poslední revize: 07/2017