



NÁVOD K POUŽITÍ

3016732 Sklopná sedačka do sprchy s hygienickým výřezem

Revize 01.18

ÚVOD:

Před prvním použitím si přečtěte návod. Nezletilé osoby by měly tento návod před prvním použitím přečíst spolu s rodiči nebo zákonným zástupcem.

POPIS PRODUKTU:

Sklopná sedačka do sprchy je úsporná sedací pomůcka sloužící k usnadnění mytí ve sprše osobám s omezenou pohyblivostí tam, kde je možná montáž na stěnu. Je vybavena protiskluzovými gumovými koncovkami (7). Sedací plochu s hygienickým výřezem lze za účelem čištění sejmout vytažením směrem nahoru.

KONTRAINDIKACE:

Neschopnost udržení vzpřímené pozice trupu. Osoby se zhoršenou koordinací, rovnováhou a vnímáním a osoby s mentálním postižením by neměly být ponechány bez dozoru. Použití pomůcky vždy konzultujte s lékařem.

DODÁVKA:

Po dodání výrobku ihned zkontrolujte obsah dodávky. Výrobek je dodáván rozložený do několika dílů.

OBSAH DODÁVKY:

Sklopná sedačka do sprchy s hygienickým výřezem




- (1) 1x Sedací deska
- (2) 1x Sklopná sedačka
- (7) 8x Záslepka
1x Návod k použití


MONTÁŽNÍ NÁVOD:

Montáž na stěnu by měla být provedena pouze odborným technikem.


1. Požadované výšky sedačky (obr. 3) docílíte nastavením výšky opěrných nožek (4) a (6).

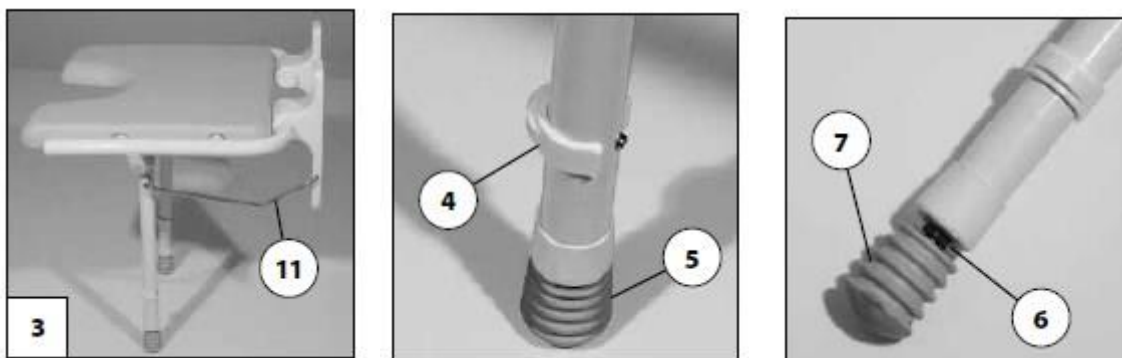


2. Sedačku umístěte do požadované výšky na stěnu (obr. 8) a vyrovnejte pomocí vodováhy. Označte si místa montáže na stěnu (9). Jako šablona slouží držáky na stěnu ve vzdálenosti 130 mm.

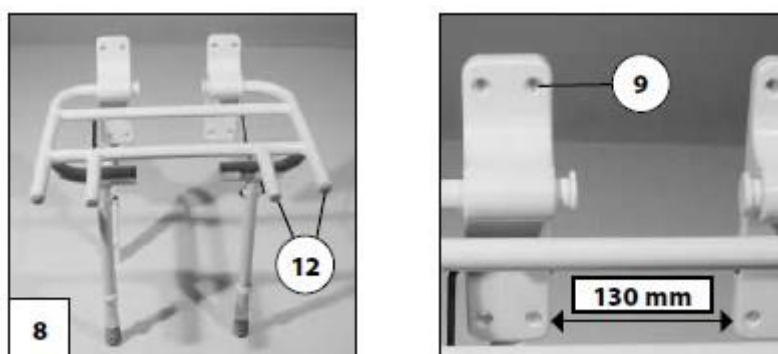

3. Sedačku připevněte na stěnu a dbejte na to, aby teleskopické nohy sedačky byly kolmé k zemi. Zatlačte záslepky do otvorů nástěnných držáků (9). Nerovnosti podlahy vyrovnejte pomocí přítužné matice (6) pro jemné nastavení, viz nastavení výšky.

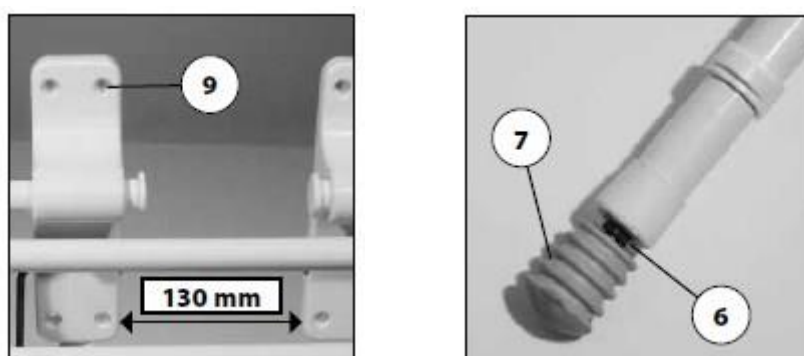

4. Nasadíte sedací desku (obr. 10).

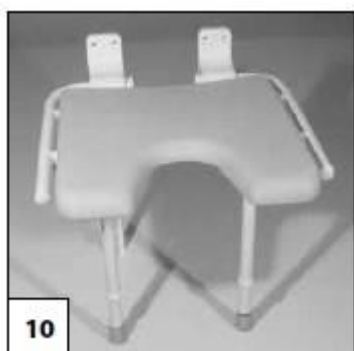


Dejte pozor při sestavování sedačky, nebezpečí skřípnutí!

Používejte pouze hmoždinky vhodné do zdíva, kam budete sedačku upevňovat!


NASTAVENÍ VÝŠKY SEDU:

K nastavení výšky sedu nejprve vytáhněte příslušnou svorku (4) na teleskopických nohách. Potom teleskopické nohy posuňte na požadovanou výšku. Následně příslušnou svorku opět zastrčte a nechejte ji viditelně zaskočit. Zkontrolujte a zajistěte správnou aretaci svorek.

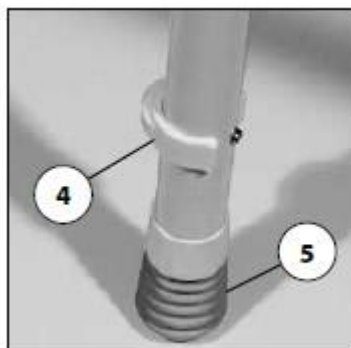

JEMNÉ NASTAVENÍ:

Nerovnosti podlahy se vyrovnávají šroubovacími gumovými nástavci. Uvolněte přítužnou matici (6) a gumový nástavec (7) šroubováním přizpůsobte podlaze. Utáhněte matici (6).

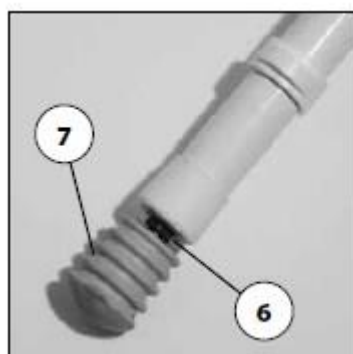


SKLÁDÁNÍ/ROZKLÁDÁNÍ:

SKLÁDÁNÍ

Sedačku odklopte přes zablokování pomalu směrem nahoru. – Pozor, nebezpečí sevření při odklápění! Zkontrolujte blokování sedačky. - Sedačka při lehkém tlaku nesmí vypadnout.

ROZKLÁDÁNÍ

Sedačku sklopte přes zablokování pomalu směrem dolů (obr. 3)

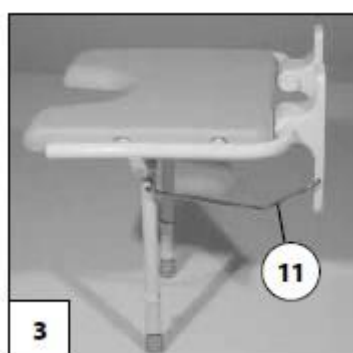

BEZPEČNOST POUŽITÍ:

- Před použitím se vždy přesvědčte o bezvadném stavu sklopné sedačky do sprchy.
- Zdeformovanou nebo jakkoliv poškozenou sedačku nepoužívejte – nebezpečí úrazu!
- Nikdy nepřekračujte nosnost sklopné sedačky.
- Sedějte na střed sklopné sedačky, na sedačku nikdy nestoupejte!
- Při sklápění pozor na skřípnutí!
- Ujistěte se, že pružinové uzávěry jsou po případném nastavování výšky pevně zacvaknuté.
- Dbejte na to, aby při používání sedačky stály obě nohy pevně a kolmo k zemi.
- Opotřebovanou sedačku nepoužívejte a poraďte se o možnosti výměny dílů se servisním technikem prodejce. Nikdy neprovádějte opravu sedačky sami.
- Mýdlo a sprchové gely zvyšují nebezpečí uklouznutí!
- Po čištění zkontrolujte správné usazení svorek a montáž sedací desky.
- Vadné gumové krytky by měly být bez prodlení vyměněny.
- Nikdy nenechávejte děti bez dozoru, pokud se nachází v blízkosti sedačky.
- Při alergických reakcích, zčervenání pokožky nebo otlačení při používání sklopné sedačky neprodleně kontaktujte svého lékaře.

ÚDRŽBA:

Sklopnou sedačku pravidelně čistěte běžnými čisticími prostředky, nepoužívejte rozpouštědla či ostré předměty. Desku sedačky lze sejmout lehkým tlakem zdola. Nasazování se provádí po srovnání desky lehkým tlakem shora. Správná údržba a kontrola všech komponentů sprchové sedačky je nezbytná pro zachování funkčnosti a technických parametrů stoličky.

ZÁRUKA:

Na sklopnou sedačku do sprchy se vztahuje záruka 2 roky. Průměrná životnost sklopné sedačky do sprchy je při správném používání a údržbě 4 roky.

LIKVIDACE:

Likvidaci sklopné sedačky do sprchy je třeba provést v souladu s národními zákonnými předpisy.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

	Model 3016732
Délka	48,5 cm
Šířka	47,5 cm
Výška sedu	46 – 53 cm
Plocha desky	40 x 40 cm
Nosnost	120 kg
Hmotnost	2,5 kg
Max. teplota vody pro čištění	80°C
Barva	bílá



Tento produkt splňuje základní požadavky směrnice 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

VÝROBCE:

MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
www.meyra.de

DISTRIBUTOR PRO ČR:

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
Tel: +420 272 761 102
E-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz