


# Etac Swift Mobil Tilt

**etac**<sup>®</sup>

Návod k použití

04/2017

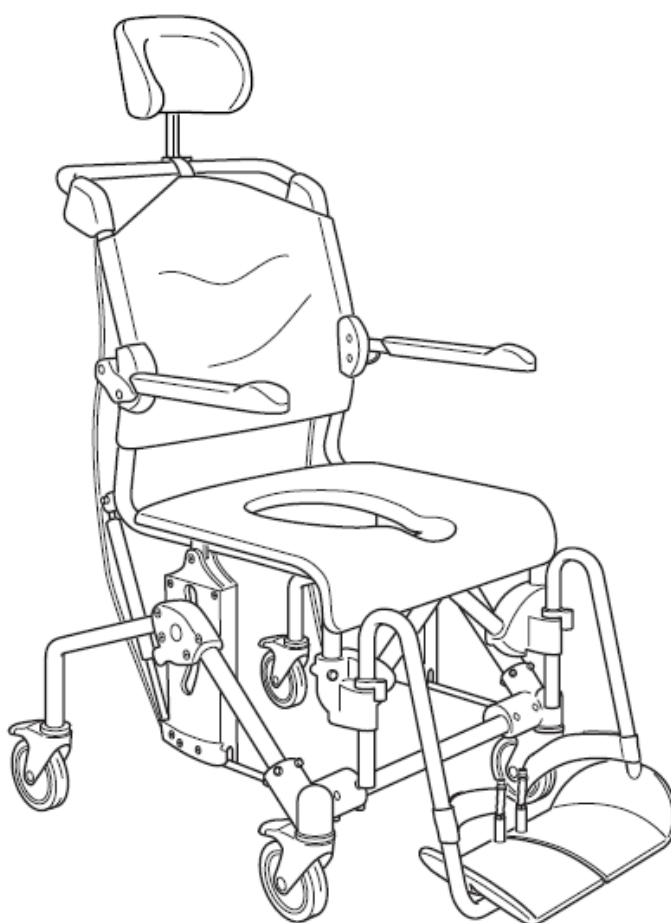

## VYROBCE

Etac Supply Center AB  
Langgatan, 12  
Box 203, 334 24 Anderstorp Sweden  
tel. +46 371 58 73 00  
[www.etac.com](http://www.etac.com)

## DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4 - Spořilov  
tel.: +420 272 761 102  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)

CE

## Obecné

Před prvním použitím produktu Etac Swift Mobil Tilt si pečlivě přečtěte tento návod k použití.


Produkt Swift Mobil Tilt je pojízdné sprchové a toaletní křeslo určené k provádění úkonů spojených s osobní hygienou u osob se sníženou pohyblivostí. Křeslo lze použít ve sprše, u umyvadla, nad toaletou a pro transport uživatele z a do koupelny.

V tomto návodu je uživatelem myšlena osoba sedící na křesle Swift Mobil Tilt, asistentem osoba obsluhující křeslo Swift Mobil Tilt.






Tento symbol v návodu k použití označuje případy, kdy může vzniknout jisté riziko pro uživatele a/nebo asistenta.

## Základní popis ..... Obrázek A

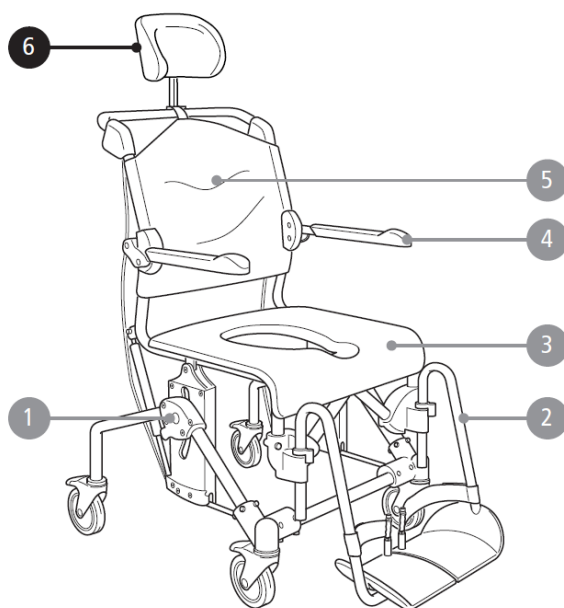





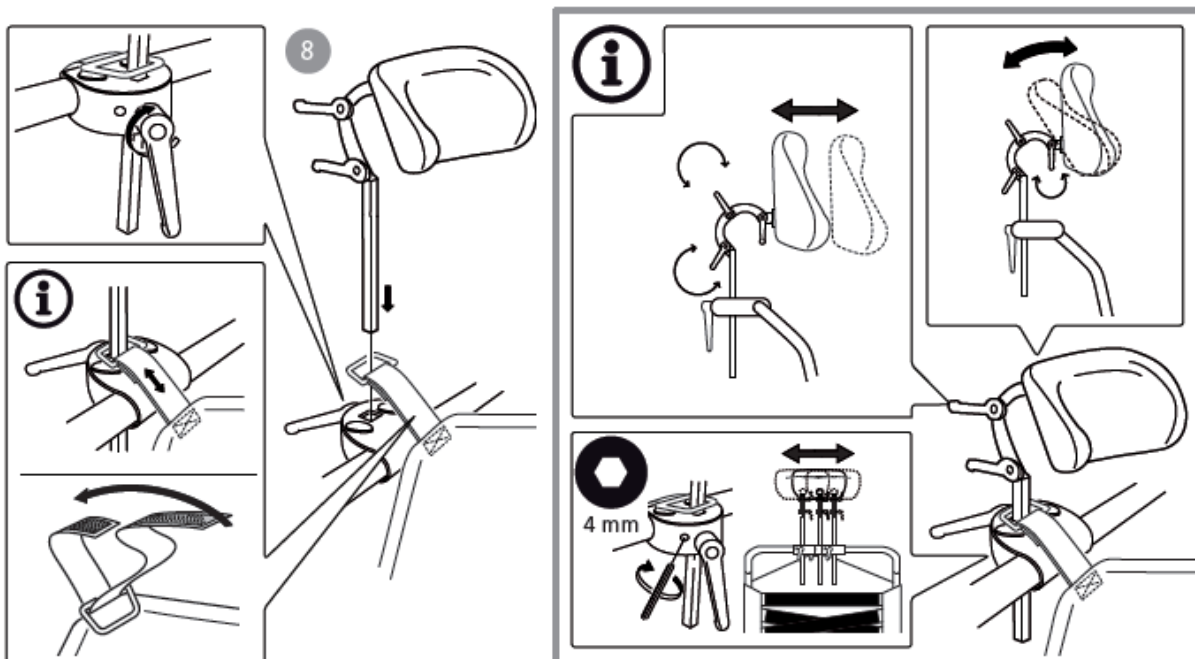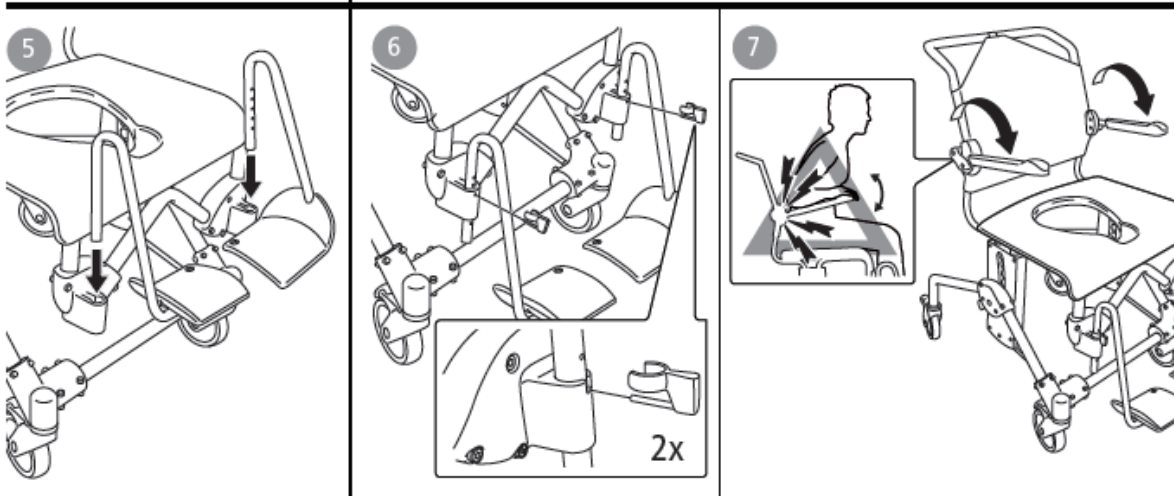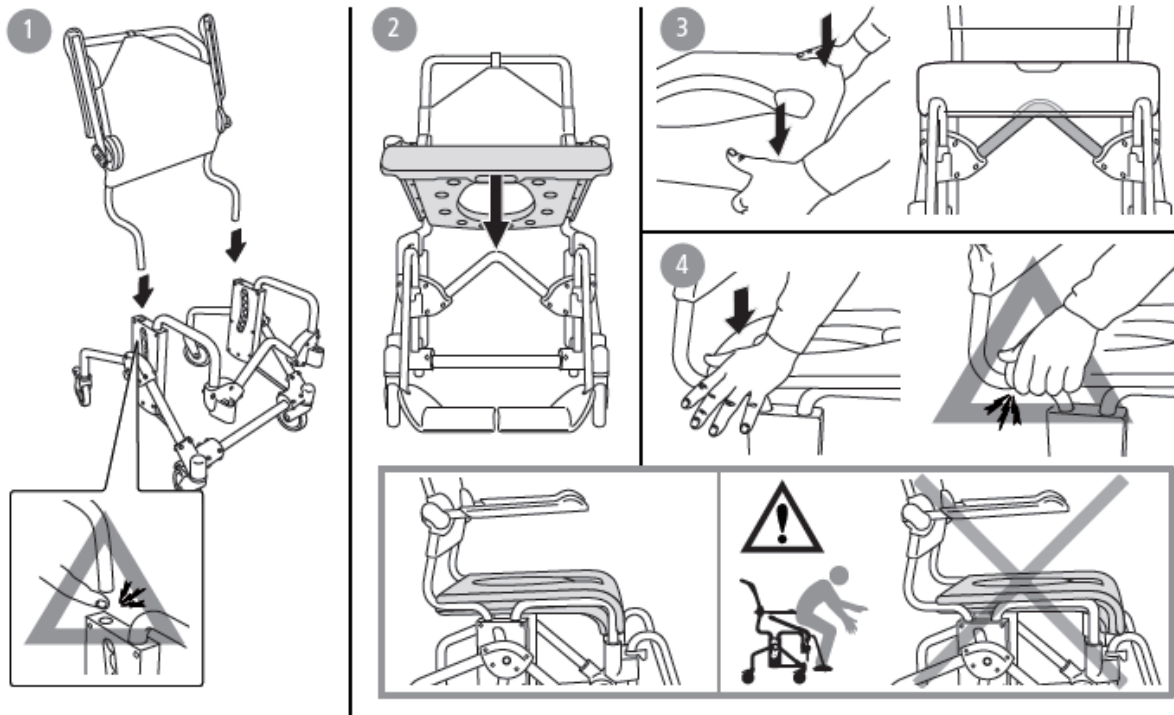











1. Šroub
2. Stupačka/podnožka
3. Sedák
4. Područka
5. Potah zádové opěry
6. Hlavová opěra



B



Tabulka rozměrů ..... Obrázek C

C							
							
S M Tilt	104 cm	58 cm	50 / 65 cm	50 cm	52 cm	46,5cm	34 / 46,5 cm
							
S M Tilt	22 cm	48 cm	33 cm	54 cm	135 kg	297 lbs	19,7 kg

Záruka a údržba ..... Obrázek D

D	
1 	2 

Na materiál a výrobní vady je poskytována záruka 5 let. Životnost produktu je stanovena na 7 let.






Pro udržení dobrého a bezpečného stavu produktu je třeba pravidelně:

**D1.** vyčistit křeslo běžným neabrazivním prostředkem a následně jej opláchnout a usušit,

**D2.** udržovat kolečka čistá bez namotaných vlasů a zbytků mýdla; křeslo lze čistit při teplotě 85°C po dobu max. 3 minut.

Pokud produkt není v dobrém a bezpečném stavu, kontaktujte servisní techniky prodejce.

 Bezpečnost ..... Obrázek E

E				
1 	2 	3 	4 	5 

**E1.** Pokud si uživatel sedá do křesla nebo z křesla jinam, ujistěte se, že jsou kolečka zabrzděná. V případě, že je uživatel po amputaci, musí být použito přídatné zařízení proti přepadnutí.

**E2.** Nikdy nestoupejte na podnožky, hrozí převrácení.


**E3.** Poloha sezení uživatele má vliv na celkovou stabilitu.

**E4.** Stabilita křesla je vyšší, pokud kolečka míří směrem ven.

**E5.** Nikdy nepřekračujte maximální nosnost křesla = 135 kg.

**Jakkoli poškozené křeslo nesmí být používáno.**

**Transport uživatele ..... Obrázek F**

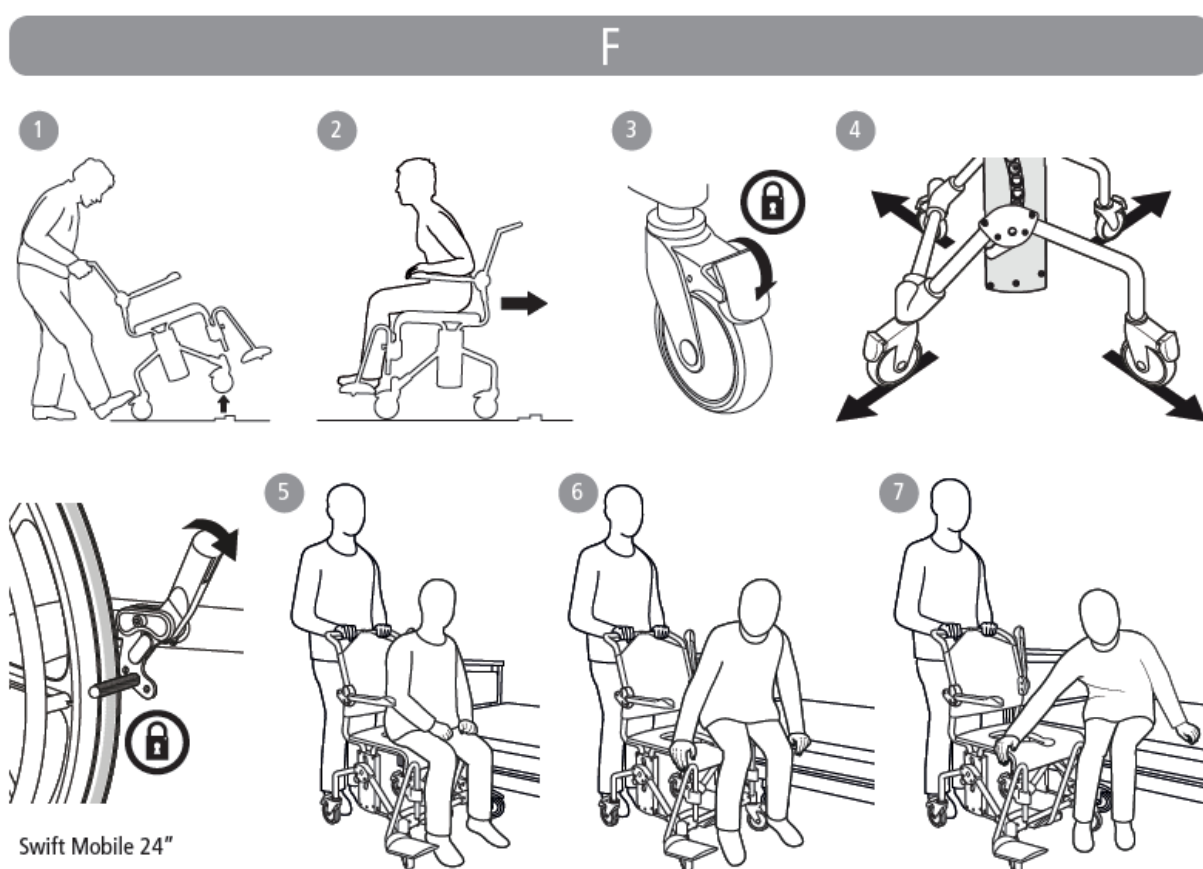

**Překonání překážky:**

**F1.** V případě prázdného křesla jej nadzdvihněte s mírným zatlačením nohou na podvozek.

**F2.** V případě přepravy křesla s uživatelem křeslo táhněte přes překážku pozadu.

**Stání křesla na místě:**

**F3.** Vždy zabrzděte všechna kolečka opatřená brzdou.

**F4.** Vytočení koleček směrem ven zvyšuje stabilitu křesla.

**Přeprava:**

Vyhodnoťte všechna rizika. Ošetřovatel odpovídá za bezpečnost uživatele. Pomůcky pro přesun by měly být použity vždy, pokud je přesun/přeprava bez nich považována za riskantní.

Před přesunem uživatele do křesla nebo z křesla Swift Mobil Tilt je důležité zajistit, aby byla kolečka zabrzděna a směřovala ven. Na straně přesunu odklopte područku.

**F5. – F7.** Proveďte přesun.

**Nastavení ..... Obrázek G**

G

<b>7</b>	

**9**

A

B

-5° – +30°

5 mm


**10**

A

B

0° – +35°

5 mm

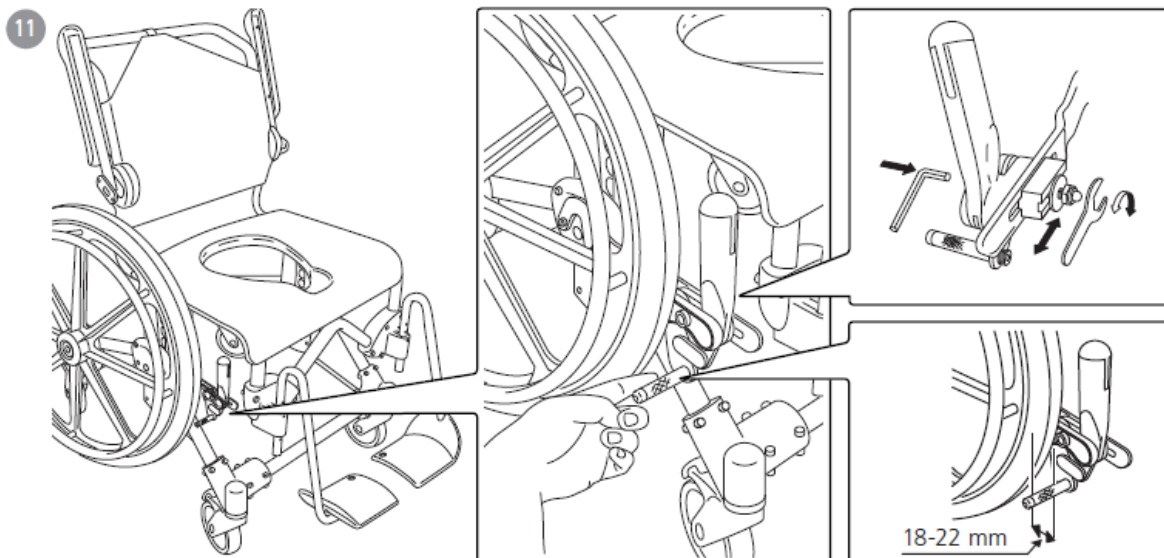

### Nastavení výšky:

**G1. – G7.** Výšku lze snadno nastavit vložením šroubu do požadované pozice. Rozsah vymezuje tabulka. Ujistěte se, že obě strany křesla jsou nastaveny na stejnou výšku. V jiném případě může být narušena stabilita.

**G8.** Křeslo nepoužívejte, pokud šroub (oranžové barvy) není řádně zapadnutý.

### Nastavení náklonu:



**G9.** Umístěte plynový píst do pozice A pro náklon sedu v úhlu od  $-5^\circ$  do  $30^\circ$ .

**G10.** Umístěte plynový píst do pozice B pro náklon sedu v úhlu od  $0^\circ$  do  $35^\circ$ .

### Použití brzd:

**G11.** Při nastavování brzd by pro dobrou přilnavost měl být brzdový kolík nastaven 18 až 22 mm od zadního kola.


### Stupačky/Podnožky ..... Obrázek H

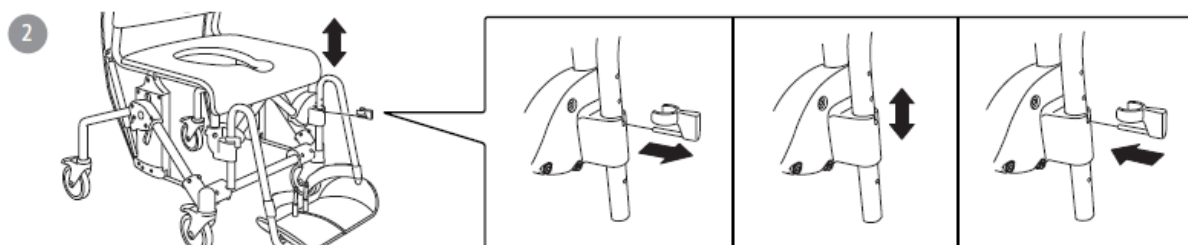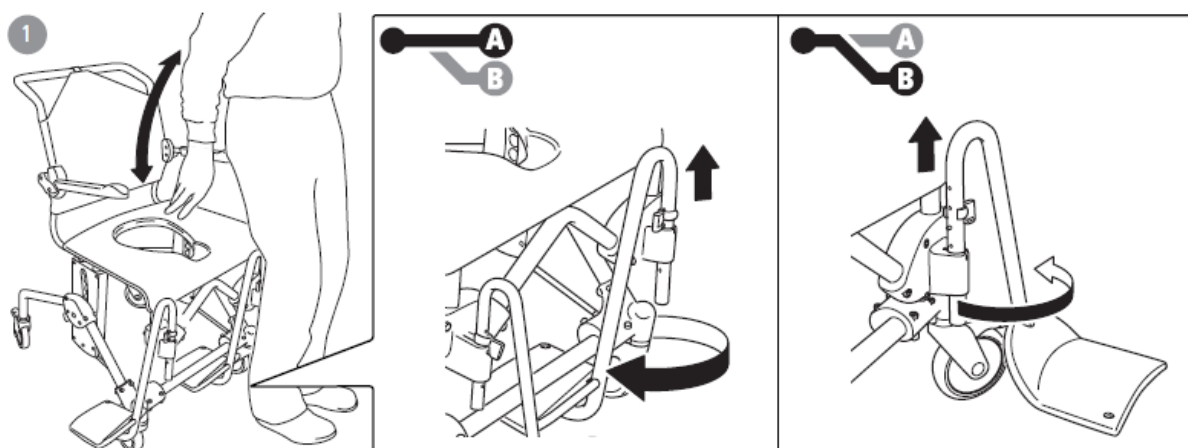

**H1.** Asistent může jednoduše zvednout a odklopit stupačky do strany pro snazší přesun uživatele do křesla a z křesla. Stupačky jsou odnímatelné.


**H2.** K dispozici jsou různé možnosti nastavení výšky pohybem pojistného kolíku. Opěrky nohou mají 6 různých výškových nastavení.

**Funkce náklonu ..... Obrázek I**

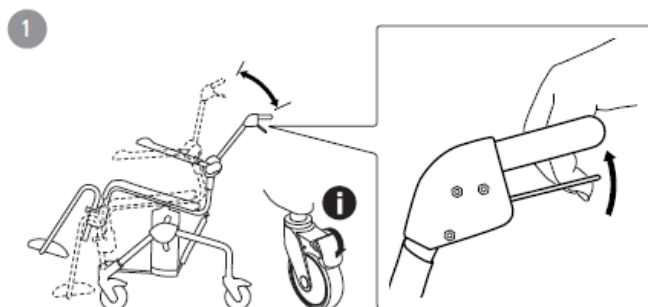


**I1.** Asistent může snadno nastavit úhel náklonu křesla tím, že přidrží páčku na rukojeti a nakloní jej do požadované polohy. Pokud uživatel sedí v křesle, než použijete funkci náklonu, ujistěte se, že jsou kola zabrzděna.

**Příslušenství ..... Obrázek J**

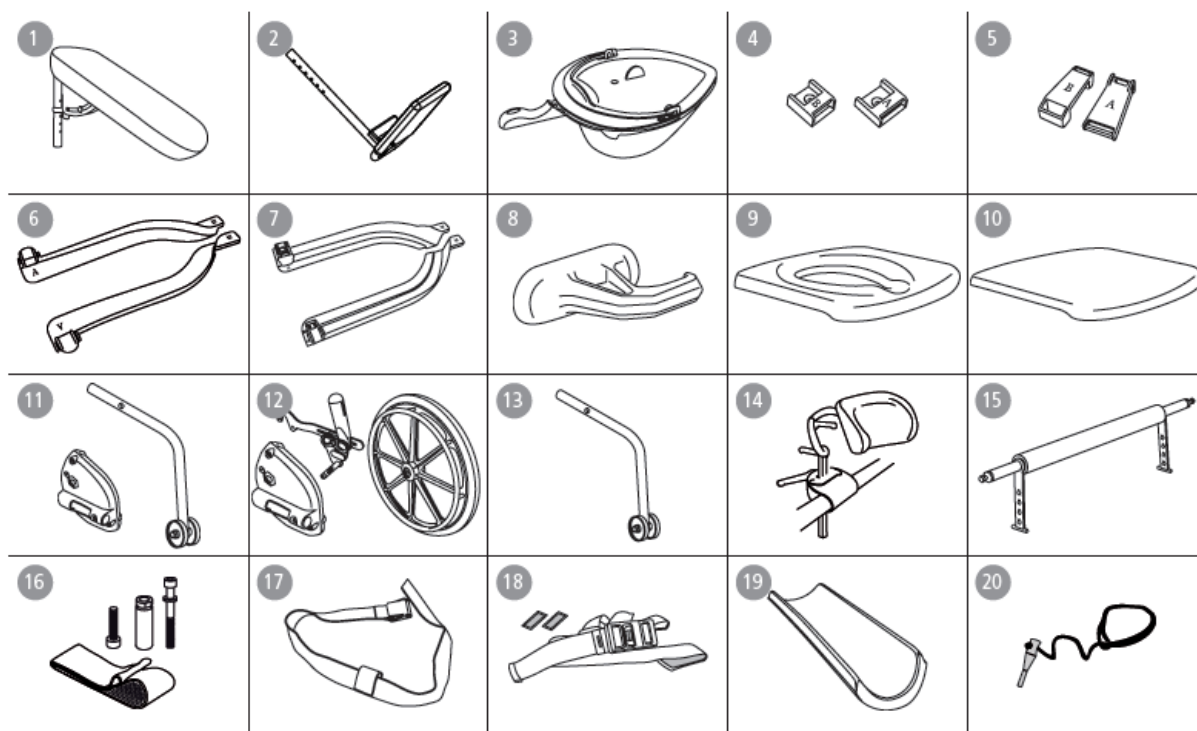



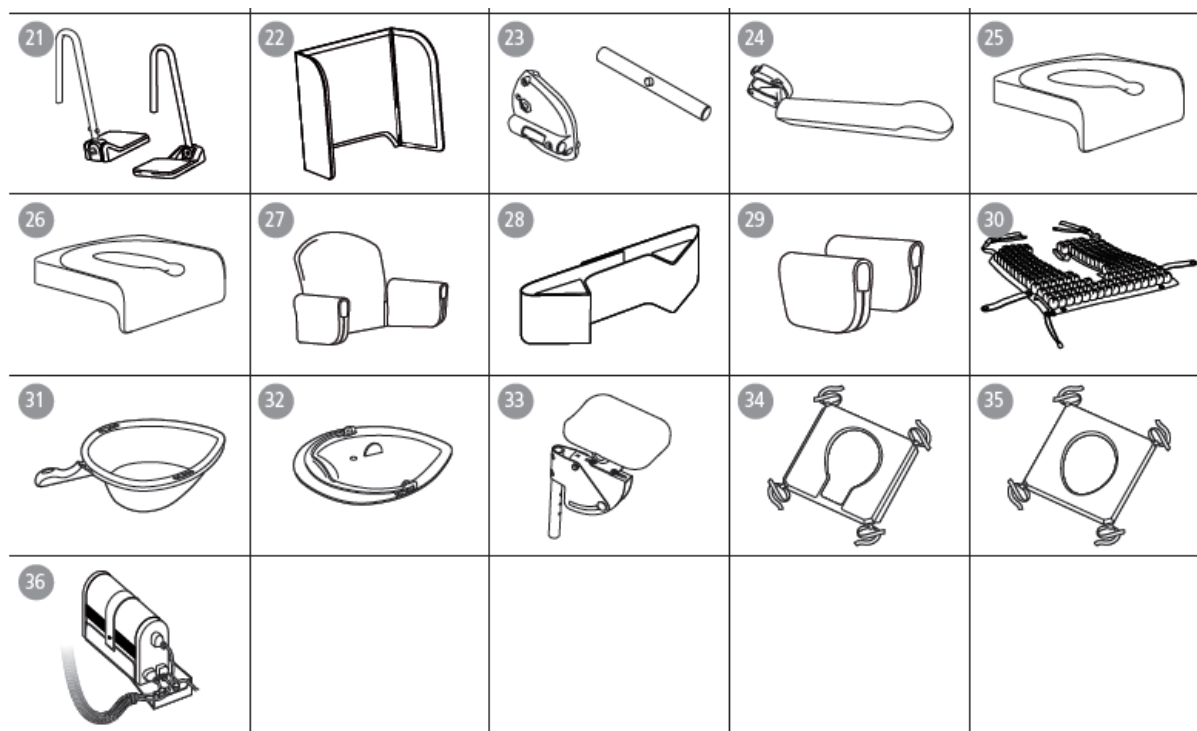

- J1.** Podpěra nohy / lýtka, úhlově nastavitelná
- J2.** Stupačka, výškově nastavitelná
- J3.** Toaletní kyblík s víkem
- J4.** Úchytky pro uchycení držáku toaletního kyblíku
- J5.** Úchytky pro uchycení držáku s nízkou hranou kyblíku
- J6.** Držák toaletního kyblíku s nízkou hranou
- J7.** Držák toaletního kyblíku
- J8.** Zábrana proti úniku moče mimo otvor
- J9.** Polstrování na sedák
- J10.** Kryt sedáku
- J11.** Kolečka proti přepadnutí včetně uchycení
- J12.** Sada k velkému zadnímu kolu
- J13.** Kolečka proti přepadnutí bez uchycení
- J14.** Hlavová opěra včetně uchycení
- J15.** Zábrana proti vypadnutí 605 nebo 665 mm
- J16.** Popruhy na paty
- J17.** Hrudní pás
- J18.** Bezpečnostní pás

- J19.** Područka pro hemiplegiky
- J20.** Blokátor područky v dolní pozici
- J21.** Úhlově nastavitelné stupačky
- J22.** Měkké polstrování zad
- J23.** Pomůcka pro překonání překážek
- J24.** Sada pro rozšíření područek
- J25.** Měkký polstr sedáku
- J26.** Měkký polstr sedáku – úzký otvor
- J27.** Komfortní polstrování
- J28.** Podpěra trupu
- J29.** Polstrování područek, pár
- J30.** Antidekubitní sedák ROHO
- J31.** Toaletní kyblík
- J32.** Víko kyblíku s držákem
- J33.** Podpěra amputované nohy
- J34.** Měkký sedák – standardní otvor
- J35.** Měkký sedák – oválný otvor
- J36.** Pohonná jednotka