

Návod k použití MOBALUX – stolička do sprchy/schůdek



Tento návod k obsluze je pro vás pomůckou, s jejíž pomocí se seznámíte s manipulací s výrobkem tak, aby bylo zaručeno bezpečné používání. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

Kontrola při převzetí

Vybalte výrobek celý z obalu a zkontrolujte úplnost zásilky a její poškození při přepravě. Pokud zjistíte, že výrobek nebo zásilka vykazují nějakou závadu:

1. reklamujte okamžitě u přepravce,
2. nechte sepsat protokol o škodě,
3. neprodleně informujte nás nebo vašeho prodejce.

Použití

Sprchová stolička slouží jako opora uživatele při sprchování. Nasazovací područky a opěradlo, které tvoří volitelnou výbavu, zvyšují komfort a především bezpečnost.

Vanový schůdek usnadňuje vstupování a vylézání z vany.

Popis

Sprchová stolička

Sprchová stolička je vyrobena z vysoce pevného hliníku a plastu, tudíž je odolná vůči korozi. Nohy mají speciální sroubení umožňující snadnou a rychlou demontáž. Stoličku tak můžete uložit, aniž by zabírala místo, nebo ji můžete vzít s sebou na cesty.

Vanový schůdek

Vanový schůdek je vyroben ze stejných kvalitních materiálů jako stolička. Nohy se připevňují stejnou technikou.

Kontraindikace

- Neschopnost udržení vzpřímené pozice.
- Poruchy koordinace a vnímání.
- Použití pomůcky vždy konzultujte s lékařem.

Montáž

Výrobek se dodává demontovaný v kartonu.

- Zasuňte nohy až na doraz do úchytlů na spodní straně sedací / stoupací plochy a zafixujte matici dotažením rukou ve směru hodinových ručiček.

Volitelné příslušenství pro sprchovou stoličku:

Područky

- Nasadte područky vlevo a vpravo do úchytlů na horní straně sedačky.
- Zatlačte područky nahoře lehce směrem ven, aby se spodní část zasunula pod sedačku.
- Nyní područky zafixujte na spodní straně sedačky přiloženými šrouby.

Opěradlo

- Nasadte opěradlo vzadu do úchytlů na horní straně sedačky.
- Zatlačte opěradlo nahoře lehce směrem ven, aby se spodní část zasunula pod sedačku.
- Nyní opěradlo zafixujte na spodní straně sedačky přiloženými šrouby.

Bezpečnostní pokyny

Před každým použitím zkontrolujte bezvadnou funkci protiskluzových nožek.

Zajistěte, aby všechny nohy byly pevně přišroubovány k sedací / stoupací ploše.

Nestoupejte nohama na sedací plochu sprchové stoličky, hrozí nebezpečí pádu!

Před použitím sprchové stoličky s područkami či opěradlem zkontrolujte, zda jsou šroubové spoje pevně dotažené.

Při používání výrobku 3013942 – Schůdek k vaně – zkontrolujte, zda stojí pevně na podlaze a neklouže. Při používání dbejte na to, aby na stoupací ploše schůdku nebyly žádné zbytky mýdla, hrozí nebezpečí uklouznutí!

Max. zatížení činí 130 kg!

Péče a údržba

Přestože výrobek má stabilní konstrukci, součásti jako šroubení, krytky na nohách atd. podléhají určitému opotřebení. Proto doporučujeme tyto díly každých 6 měsíců nechat zkontrolovat odborníkem.

Je třeba sledovat i pevné usazení šroubových spojů a bezvadnou funkci krytek.

Sedačku pravidelně čistěte běžnými čisticími prostředky – nejlépe mýdlovým roztokem. Čisticí prostředek by měl mít hodnotu pH min. 6. K čištění nepoužívejte rozpouštědla či ostré předměty.

Používejte výhradně originální náhradní díly. Využívejte servisních služeb školeného prodejce.

Likvidace se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení.


Záruka

Záruční doba tohoto výrobku činí 24 měsíců a vztahuje se na vady materiálu a zpracování. Vyloučeny jsou opotřebitelné díly a díly konstrukční skupiny, které podléhají opotřebení podle svého účelu a škody, které jsou následkem nadměrného namáhání, nesprávného zacházení, násilného poškození nebo nepřípustné změny či opravy. V případě záruky se obraťte na prodejce, u něhož jste výrobek zakoupili.

Z důvodu odpovědnosti za výrobek smí opravy a údržbu provádět pouze autorizovaný prodejce, a to za použití originálních náhradních dílů.

Technické údaje

Šířka	cca 39 cm
Hloubka	cca 39 cm
Výška (stolička)	50 cm
Výška (schůdek)	cca 18 cm
Sedací plocha / stolička.....	cca 39x39 cm
Stoupací plocha / schůdek.....	cca 39x39 cm
Max. zatížení	130 kg
Barva	bílá

 Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

Výrobce

MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2

D-32689 Kalletal-Kalldorf

www.meyra.de

Distributor pro ČR

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4

tel.: 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz

Datum poslední revize: 02/2018