



## Návod k použití

### MOBALUX – teleskopická stolička do sprchy

Tento návod k obsluze je pro vás pomůckou, s jejíž pomocí se seznámíte s manipulací s výrobkem tak, aby bylo zaručeno bezpečné používání. Před prvním použitím si pečlivě přečtete tento návod.

#### Kontrola při převzetí

Vybalte výrobek celý z obalu a zkontrolujte úplnost zásilky a její poškození při přepravě. Pokud zjistíte, že výrobek nebo zásilka vykazují nějakou závadu:

1. reklamujte okamžitě u přepravce,
2. nechte sepsat protokol o škodě,
3. neprodleně informujte nás nebo vašeho prodejce.

#### Použití

Sprchová stolička slouží jako opora uživatele při sprchování. Nasazovací područky a opěradlo, které tvoří volitelnou výbavu, zvyšují komfort a především bezpečnost.

#### Popis

##### Sprchová stolička

Sprchová stolička je vyrobena z vysoce pevného hliníku a plastu, tudíž je odolná vůči korozi. Nohy mají speciální sroubení umožňující snadnou a rychlou demontáž. Stoličku tak můžete uložit, aniž by zabírala místo, nebo ji můžete vzít s sebou na cesty.

##### Kontraindikace

- Neschopnost udržení vzpřímené polohy.
- Poruchy koordinace a vnímání.
- Použití pomůcky vždy konzultujte s lékařem.

##### Montáž

Výrobek se dodává demontovaný v kartonu.

- Zasuňte nohy až na doraz do úchytů na spodní straně sedací / stoupací plochy a zafixujte matici dotažením rukou ve směru hodinových ručiček.

#### Volitelné příslušenství pro sprchovou stoličku:

##### Područky

- Nasadte područky vlevo a vpravo do úchytů na horní straně sedačky.
- Zatlačte područky nahoře lehce směrem ven, aby se spodní část zasunula pod sedačku.
- Nyní područky zafixujte na spodní straně sedačky přiloženými šrouby.

##### Opěradlo

- Nasadte opěradlo vzadu do úchytů na horní straně sedačky.
- Zatlačte opěradlo nahoře lehce směrem ven, aby se spodní část zasunula pod sedačku.
- Nyní opěradlo zafixujte na spodní straně sedačky přiloženými šrouby.

#### Nastavení výšky sedu

- Teleskopické nohy nastavte na stejnou výšku.
- K nastavení výšky sedu nejprve vytáhněte příslušnou svorku. Potom teleskopické nohy posuňte na požadovanou výšku. Následně příslušnou svorku opět zastrčte a nechte ji viditelně zaskočit.
- Zkontrolujte a zajistěte správnou aretaci svorek.

#### Bezpečnostní pokyny

Před každým použitím zkontrolujte bezvadnou funkci protiskluzových nožek.

Zajistěte, aby všechny nohy byly pevně přišroubovány k sedací.

Nestoupejte nohama na sedací plochu sprchové stoličky, hrozí nebezpečí pádu!

Před použitím sprchové stoličky s područkami či opěradlem zkontrolujte, zda jsou šroubové spoje pevně dotaženy.

Max. zatížení činí 130 kg!

## Péče a údržba

Přestože výrobek má stabilní konstrukci, součásti jako šroubení, krytky na nohách atd. podléhají určitému opotřebení. Proto doporučujeme tyto díly každých 6 měsíců nechat zkontrolovat odborníkem.

Je třeba sledovat i pevné usazení šroubových spojů a bezvadnou funkci krytek.

Sedačku pravidelně čistěte běžnými čisticími prostředky – nejlépe mýdlovým roztokem. Čisticí prostředek by měl mít hodnotu pH min. 6. K čištění nepoužívejte rozpouštědla či ostré předměty.

Používejte výhradně originální náhradní díly. Využívejte servisních služeb školeného prodejce.

Likvidace se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení.


## Záruka

Záruční doba tohoto výrobku činí 24 měsíců a vztahuje se na vady materiálu a zpracování. Vyloučeny jsou opotřebitelné díly a díly konstrukční skupiny, které podléhají opotřebení podle svého účelu a škody, které jsou následkem nadměrného namáhání, nesprávného zacházení, násilného poškození nebo nepřípustné změny či opravy. V případě záruky se obraťte na prodejce, u něhož jste výrobek zakoupili.

Z důvodu odpovědnosti za výrobek smí opravy a údržbu provádět pouze autorizovaný prodejce, a to za použití originálních náhradních dílů.

## Technické údaje

Výška (stolička) .....46–53 cm  
Sedací plocha / stolička ..... cca 39x39 cm  
Hmotnost..... 2,6 kg  
Max. zatížení ..... 130 kg  
Barva ..... bílá

 Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

## Výrobce

MEYRA GmbH  
Meyra-Ring 2  
D-32689 Kalletal-Kalldorf  
www.meyra.de

## Distributor pro ČR

MEYRA ČR s.r.o.  
Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4  
tel.: 272 761 102  
e-mail: meyra@meyra.cz  
www.meyra.cz

Datum poslední revize: 02/2018