

NÁVOD K POUŽITÍ

STOLIČKA DO SPRCHY SE ZÁDOVOU OPĚROU

VITEA CARE VCTP0021

Vydání 02.18

MEYRA[®]
Usnadníme lidem pohyb



VITEA[®]
CARE
CE

POPIS PRODUKTU:

Stolička do sprchy s lehkou konstrukcí. Sedák a opěra jsou vyrobeny z polyuretanu, který nestudí na dotek. Stolička má výškově nastavitelné, stabilní nohy s gumovými protiskluzovými nástavci na koncích. Stolička se snadno udržuje. Polyuretanové plochy jsou perforované pro snazší odtok vody a mají integrovaná úchopová madla pro lepší stabilitu.

VYUŽITÍ:

Pomůcka, která usnadní a zajistí bezpečnější sprchování osobám se zhoršenou pohyblivostí.

KONTRAINDIKACE:

Neschopnost udržení vzpřímené pozice trupu. Osoby se zhoršenou koordinací, rovnováhou a vnímáním a osoby s mentálním postižením by neměly být ponechány bez dozoru.

POUŽÍVÁNÍ:

Produkt je dodáván rozložený. Před použitím produkt složte. Jednotlivé nohy zasuňte do trubek připevněných k sedací části, tak aby teleskopický mechanismus zapadnul (ozve se charakteristické cvaknutí). Jednotlivé nohy musí být vždy nastaveny na stejnou výšku. Nestejnoměrné nastavení výšky nohou může způsobit pád. Po každém použití stoličku otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemické čističe.



BEZPEČNOST POUŽITÍ:

1. Použití na nerovném povrchu (sklon větší než 5 %) může způsobit pád a zranění.
2. Je přísně zakázáno na sprchové stoličce stát.
3. Maximální nosnost sprchové stoličky je 100 kg.
4. Nepoužívejte sprchovou stoličku v případě, že objevíte jakoukoliv závadu. Poškození může způsobit pád a zranění.

ÚDRŽBA:

1. Rám stoličky čistěte vlhkým hadříkem či utěrkou.
2. Nepoužívejte při čištění žádné ostré předměty (hrozí poškození ochranného nátěru).
3. Plastové části lze čistit šetrnými čisticími prostředky.
4. Pravidelně odstraňujte nečistoty z pohyblivých částí stoličky (teleskopický mechanismus).

Správná údržba všech komponentů sprchové stoličky je nezbytná pro zachování funkčnosti a technických parametrů stoličky. Dlouhodobé skladování ve velmi vlhké místnosti či venku (zejména při nízkých teplotách) může vést ke ztrátě estetických a funkčních vlastností pomůcky.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Výška sedu: 45-56 cm

Šířka sedu: 51 cm

Váha: cca 3 kg

Materiál: hliník, polyuretan, pryž

Barva: stříbrná, bílá

Sériové číslo/datum výroby: na produktu

Životnost: 5 let od začátku používání

Nosnost: max. 100 kg

Oprava

V případě potřeby opravy kontaktujte prodejce.

Klientský servis

V případě jakýchkoli dotazů či potřeby pomoci kontaktujte prodejce.

VÝROBCE

mdh sp. z o.o.

ul. ks. W. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

Polsko

DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4 – Spořilov

Tel.: +420 272 761 102

E-mail: meyra@meyra.cz