



Návod k použití

Pěnový toaletní nástavec 4575 Soft

Typ 8451240 (s víkem), 8451245 (bez víka)

Tento návod k použití je pro vás pomůckou při manipulaci s výrobkem zajišťující bezpečné používání.

Před prvním použitím si tento návod pečlivě přečtěte.

Měkčený toaletní nástavec 4575 je nástavec vyrobený z měkkého materiálu usnadňující používání WC. Jeho použití je snadné a rychlé, nástavec se nasazuje přímo na mísu se zvednutým sedátkem.

Kontrola při převzetí

Vybalte výrobek celý z obalu a zkontrolujte úplnost zásilky a případná poškození vzniklá při přepravě. Pokud zjistíte, že výrobek nebo zásilka vykazují nějakou závadu:

- reklamujte okamžitě u dopravce,
- nechte sepsat protokol o škodě,
- neprodleně informujte distributora nebo svého prodejce.

Kontraindikace

- Neschopnost udržení vzpřímené pozice.
- Poruchy koordinace a vnímání.
- Použití pomůcky vždy konzultujte s lékařem.

Bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda toaletní nástavec na míse dobře sedí.
- Nástavec zatěžujte uprostřed.
- Po vyčištění dobře usušte. Na vlhkých plochách hrozí nebezpečí sklouznutí.

Péče a údržba

K čištění lze používat běžně prodávané, neabrazivní čisticí a dezinfekční prostředky. Respektujte přitom pokyny k dávkování od výrobce prostředku.

Přestože výrobek má stabilní konstrukci a je z odolných materiálů, podléhá určitému opotřebení.

Doporučujeme proto toaletní nástavec pravidelně kontrolovat a v případě zjištění jakýchkoliv závad kontaktovat dodavatele. Používejte výhradně originální náhradní díly. Využívejte servisních služeb školeného prodejce.

Likvidace

- Obal pomůcky je recyklovatelný.
- Kovové díly lze odevzdat do sběru.
- Plastové díly jsou recyklovatelné.

- Likvidace se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení.
- Místní firmu zabývající se likvidací zjistíte i městského či obecního úřadu.

Záruka

Záruční doba tohoto výrobku činí 24 měsíců a vztahuje se na vady materiálu a zpracování. Vyloučeny jsou opotřebitelné díly a díly / konstrukční skupiny, které podléhají opotřebení podle účelu jejich určení, a škody, které jsou následkem nadměrného namáhání, nesprávného zacházení nebo nepřípustné změny / opravy.

V případě záruky se obraťte na svého prodejce, u něhož jste tento produkt zakoupili.

Z důvodů odpovědnosti za výrobek smí opravy a údržbové práce provádět pouze autorizovaný prodejce za použití originálních náhradních dílů. Změny podmíněné technickými zlepšeními a modifikace designu vyhrazeny.

Technické údaje

Délka: 42 cm
Šířka: 41 cm
Výška nástavce: 11 cm
Nosnost: 100 kg
Hmotnost: 1,2 kg
Barva: světle šedá



Tento výrobek je ve shodě se směrnicí ES 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

Výrobce

Pharma Ouest
Actipole 2
B.P 12
F – 35540 Miniac-Morvan

Distribuce a servis pro ČR

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 - Spořilov
Tel.: +420 272 761 102
Email: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz

Datum poslední revize: 02/2018