

Návod k použití

Toaletní nástavec Easy Clip

Revize 02/2018

Tento návod k obsluze je pro vás pomůckou při manipulaci s výrobkem, zajišťující bezpečné používání.

Před prvním použitím si tento návod pečlivě přečtěte.

Kontrola při převzetí

Vybalte výrobek celý z obalu a zkontrolujte úplnost zásilky případná poškození vzniklá při přepravě. Pokud zjistíte, že výrobek nebo zásilka vykazují nějakou závadu:

- reklamujte okamžitě u dopravce,
- nechte sepsat protokol o škodě,
- neprodleně informujte nás nebo svého prodejce.

Popis

Toaletní nástavec Easy Clip lze snadno namontovat na většinu běžně prodávaných toaletních mís a zvyšuje sedací plochu o cca 10. Dodává se s víkem nebo bez víka. Připevňuje se pomocí postranních fixačních šroubů.


Kontraindikace

- Neschopnost udržení vzpřímené pozice.
- Poruchy koordinace a vnímání.
- Použití pomůcky vždy konzultujte s lékařem.

Montáž

Nástavec se dodává smontovaný, je třeba nasadit pouze připevňovací šrouby:

1. Připevňovací šroub a držák

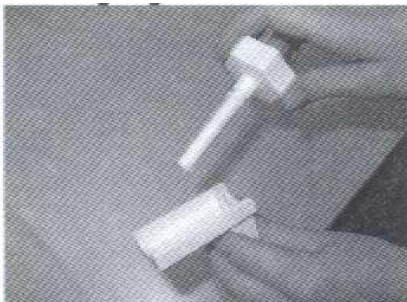

2. Sestavení



3. Zasunutí úchyty



4. Zašroubování šroubu ve směru hodinových ručiček



Odklopte standardní toaletní sedátko s poklopem nahoru. Nasadte nástavec přesně na toaletní mísu. Zafixujte nástavec utážením postranních plastových připevňovacích šroubů rukou. Nástavec je nyní připraven k použití.

Čištění

K čištění používejte nejlépe mýdlový roztok. Hodnota pH čisticího prostředku by v každém případě měla být minimálně 6. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Dezinfekce

Pokud toaletní nástavec používá více osob (např. v pečovatelském domě), je předepsána dezinfekce běžným dezinfekčním prostředkem.

Bezpečnostní pokyny

Přestože je konstrukce stabilní, díly jako úchyty, sedátko/víko vykazují určité opotřebení. Proto doporučujeme výrobek pravidelně kontrolovat a zjištěné případné závady řešit s prodejcem. Zde je třeba dbát také na pevné usazení protiskluzových prvků (přípevňovací svorky)!

- Nestoupejte si na víko toaletního nástavce!
- Dbejte na to, aby toaletní nástavec nebyl pevně přišroubovaný k WC míse, ale byl k ní jenom mechanicky upnutý.
- Zajistěte, aby přípevňovací šrouby byly rovnoměrně rukou utažené.
- Poškozené díly nechejte okamžitě u prodejce vyměnit!
- Před každým použitím zajistěte, aby protiskluzové prvky na přípevňovacích svorkách byly v bezvadném stavu.

Opravy

Používejte výhradně originální náhradní díly. Využívejte servisních služeb školeného prodejce.

Likvidace

- Obal pomůcky je recyklovatelný.
- Kovové díly lze odevzdat do sběru.
- Plastové díly jsou recyklovatelné.
- Likvidace se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení.
- Místní firmu zabývající se likvidací zjistíte i městského či obecního úřadu.

Záruka

Záruční doba tohoto výrobku činí 24 měsíců a vztahuje se na vady materiálu a zpracování. Vyloučeny jsou opotřebitelné díly a díly / konstrukční skupiny, které podléhají opotřebení podle účelu jejich určení, a škody, které jsou následkem nadměrného namáhání, nesprávného zacházení nebo nepřipustné změny / opravy.

V případě záruky se obraťte na svého prodejce, u něhož jste tento produkt zakoupili.

Z důvodů odpovědnosti za výrobek smí opravy a údržbové práce provádět pouze autorizovaný prodejce za použití originálních náhradních dílů. Změny podmíněné technickými zlepšeními a modifikace designu vyhrazeny.

Varianty

3013582-R výška 10 cm, s poklopem
3013572-R výška 10 cm, bez poklopu

Nosnost: 190 kg



Tento výrobek je ve shodě se směrnici EU 93/42/EHS.

Výrobce

MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
www.meyra.de

Záruční list

Distribuce a servis

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 - Spořilov
Tel.: +420 272 761 102
Email: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz

Varianta: s víkem bez víka

Datum dodávky:

Razítko prodejce: