

Návod k použití



Deska na vanu 3012902, 3012912

Popis

Vanovou sedačku s gumovými stavěcími nožkami můžete nastavit na všechny běžně prodávané šířky vany.

Pro bezpečné používání tohoto výrobku si před prvním použitím přečtěte tento montážní návod a návod k použití a dodržujte ho.

Předpokladem pro uznání nároků z ručení resp. záruky je v každém případě používání výrobku podle účelu určení, používání originálních náhradních dílů a pravidelné provádění údržby a prohlídek.

Použití

Tento výrobek slouží osobám s omezenou mobilitou k usnadnění koupele.

Vanová sedačka je dimenzována na maximální hmotnost uživatele 130 kg.

Vnitřní rozměr na horním okraji vany nesmí překročit vnitřní rozměr uvedený v technických údajích.

Kontraindikace

- Neschopnost udržení vzpřímené pozice.
- Poruchy koordinace a vnímání.
- Použití pomůcky vždy konzultujte s lékařem.

Kontrola při převzetí


Výrobek celý vybalte a zkontrolujte zásilku, zda je kompletní a nevykazuje poškození způsobené dopravou. Pokud byste zjistili, že výrobek nebo zásilka má nějakou vadu:

1. neprodleně reklamujte u dopravce,
2. nechejte škodu/vadu zaprotokolovat,
3. neprodleně informujte nás nebo svého prodejce.

Rozsah dodávky

Vanová sedačka:

- (1) 1x sedací deska
 - (2) 2x gumová stavěcí nožka
 - (3) 2x šroub
- 1x Návod k montáži a použití

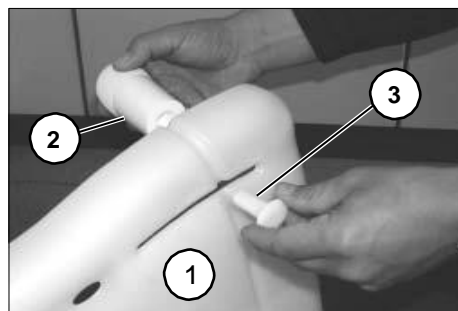

Montáž

1. Gumové stavěcí nožky namontujte pod sedačku.
2. Upevňovací šrouby prostrčte shora podélnými otvory ve vanové sedačce a zašroubujte je do gumových stavěcích nožek jenom natolik, aby se jimi ještě dalo posouvat.
3. Sedačku položte příčně přes vanu držadlem ke stěně a přisuňte ji k okraji vany.
4. Zajistěte, aby okraj sedačky ležel dostatečně daleko na okraji vany.
5. Gumové stavěcí nožky posuňte proti okraji vany natolik, aby přiléhaly k vaně a netlačily na ni.
6. Gumové stavěcí nožky ručně utáhněte.
7. Vanová sedačka je připravena k použití.

Bezpečnostní pokyny

Přestože konstrukce je stabilní, jednotlivé konstrukční díly podléhají určitému opotřebenému. Proto doporučujeme nechat výrobek každých 6 měsíců prohlédnout odborníkem.

- Nikdy nepřekračujte nosnost sedačky.
- Před použitím zkontrolujte, zda je sedačka na vaně správně usazená!
- Dbejte na to, aby vanová sedačka ležela dostatečně daleko na okraji vany!
- Pravidelně kontrolujte správné nastavení gumových stavěcích nožek!
- Před použitím stavěcí nožky ručně utáhněte!
- Seděte si vždy do středu sedací plochy!
- Opírejte se o vanovou sedačku pouze ve svislém směru.
- Nestoupejte si na sedací plochu nohama. – Nebezpečí úrazu!
- Před použitím se přesvědčte, zda je produkt v bezvadném stavu.
- Opotřebenou, zkrěhlou vanovou sedačku nenarovnávejte a již nepoužívejte.
- Mýdlo a sprchové gely zvyšují nebezpečí ukouznutí!

- Po očištění zkontrolujte správnou funkci vanové sedačky!
- Opotřebenou nebo poškozenou sedačku okamžitě vyměňte.
- Opotřebené nebo poškozené gumové stavěcí nožky okamžitě vyměňte. – Nebezpečí úrazu!

Péče a údržba

- Sedačku pravidelně čistěte běžnými čisticími prostředky.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla či ostré předměty. Doporučujeme sedačku každých 6 měsíců nechat zkontrolovat servisním technikem prodejce.
- Jestliže výrobek používá více osob (např. v pečovatelském ústavu), je předepsaná aplikace běžných dezinfekčních prostředků.
- Likvidaci sedačky je třeba provést v souladu s národními zákonnými předpisy.

CE Tento výrobek splňuje základní požadavky směrnice 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

Technické údaje

Model	Vanová deska 3012902	Vanová deska 3012912
Délka:	69 cm	74 cm
Šířka:	29 cm	29 cm
Vnitřní rozměr vany - horní okraj min.:	48 cm	53 cm
- spodní okraj max.:	59 cm	64 cm
Materiál:	HDPE (polyetylén)	HDPE (polyetylén)
Nosnost:	130 kg	130 kg
Hmotnosti:	2,1 kg	2,4 kg
Teplota vody:	max. 80 °C	max. 80 °C
Barva:	bílá	bílá
Typový štítek:	pod sedací deskou	

Distributor pro ČR

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4
tel.: 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz

Výrobce

MEYRA GmnH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
www.meyra.de

Datum poslední revize: 02/2018