

Stolička do sprchy / Židle do sprchy

Model 2016: 3016702 / 3016712 / 3016722

Montáž / Návod k použití



Úvod

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod a dbejte pokynů. Děti a mladiství by si měli tento dokument před prvním použitím přečíst s rodiči nebo opatrovníkem.

Tento návod k obsluze je pro vás pomůckou, s jejíž pomocí se seznámíte s manipulací s výrobkem tak, aby bylo zaručeno bezpečné používání.

Tento výrobek je technická pomůcka. Je nutné se s ním seznámit, vyžaduje pravidelnou údržbu a při nesprávném používání může být nebezpečný. Proto je nutné se seznámit se správným zacházením výrobku.

Pro dotazy se obraťte na odborného prodejce.

Výrobek splňuje požadavky EN 12182 Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. Zahrnuje požadavky na hořlavost použitých čalouněných materiálů a případně plastů v souladu s EN 1021-2.

Popis

Stolička do sprchy a židle do sprchy jsou pomůcky pro sezení s protiskluzovými gumovými koncovkami pro oblast koupelny a sprchy.

Pro čištění je možné sedací plochu s hygienickým otvorem i opěrku odebrat směrem nahoru.

Použití

Při alergické reakci, zčervenání kůže a/nebo otlaku při použití výrobku je nutné neprodleně vyhledat lékaře.

Tento výrobek slouží osobám s omezenou pohyblivostí k ulehčení procesu koupání na pevných, rovných a protiskluzných površích.

Kontrola při převzetí

Všechny výrobky jsou u nás kontrolovány na bezchybnost a zabaleny do speciálních krabic.

Chceme Vás ale poprosit, zkontrolujte výrobek okamžitě po dodání – nejlépe v přítomnosti dodavatele – na případné poškození při přepravě.

Obal by měl být uložen pro další případnou přepravu.

Životnost

U tohoto výrobku vycházíme z předpokládané průměrné životnosti 4 let, při předpokladu správného zacházení a dodržení pokynů údržby a kontrol.

Životnost výrobku je rovněž závislá na četnosti používání, okolí používání a ošetřování.

Díky použití náhradních dílů lze životnost výrobku prodloužit. Náhradní díly jsou zpravidla dostupné až 5 let po ukončení výroby.

Uvedená životnost nepředstavuje žádnou dodatečnou záruku.

Obsah dodávky

Stolička do sprchy / Židle do sprchy:

- (1) 1x Sedací deska
- (2) 1x Boční rám pravý
- (3) 1x Boční rám levý

- (4) 1x Spojovací trubka přední
- (5) 1x Spojovací trubka zadní
- (6) 4x Spojovací materiál
- 1x Návod k použití / montáž

Židle do sprchy:

- (7) 1x Opěrka (extra příslušenství)
- 2x Plastová koncovka

Montáž

Provedení následující montáže doporučujeme od odborného prodejce.

Bezpečnostní pokyny

Během celé montáže dejte pozor na místa sevření – nebezpečí skřípnutí!

Udržujte pracovní místo během montáže čisté!

Stolička do sprchy / Židle do sprchy

1. Spojovací trubky (4) + (5) nasadíte a přišroubujete na čepy bočních rámu (2) + (3).
2. Sedací desku (1) natlačte pevně na spojovací trubky.

Židle do sprchy

Opěrku (7) nasadíte na doraz na zádové trubky bočních rámu.

Přiložené 2 kusy plastových koncovek (15) pevně zatlačte do k tomu určených otvorů pro fixaci.

Židle do sprchy, skládací

Skládací židle do sprchy je dodávána v plně smontovaném stavu.

Pro rozložení viz kapitolu *Skládání/Rozkládání* na straně 3.

1. Nastavte výšku sedu.

Dbejte na pokyny kapitoly *Nastavení výšky sedu* na straně 2.

Návod k použití

Bezpečnostní pokyny

Opírejte se o oba boční rámy/područky pouze svisle. – Nebezpečí pádu!

Nestoupejte nohama na sedací plochu. – Nebezpečí pádu!

Ujistěte se, že jsou aretovací pružinové zámky po případném nastavení výšky správně zacvaknuté. – Nebezpečí úrazu!

Dbejte na to, aby při používání stály všechny čtyři nohy pevně na podlaze. – Nebezpečí úrazu!

Před každým použitím se přesvědčte o použitelnosti výrobku. – Nebezpečí úrazu!

Zdeformovanou stoličku/židli do sprchy nenarovnávejte a nepoužívejte. – Nebezpečí úrazu!

Udržujte područky a gumové koncovky bez přítomnosti zbytků olejů a tuků – nebezpečí úrazu!

Mýdla a sprchovací prostředky zvyšují riziko uklouznutí!

Po provedení čištění zkontrolujte správné umístění svěrek, sedací desky a opěrky!

Opotřebené nebo poškozené gumové koncovky musí být bezodkladně obnoveny – nebezpečí úrazu!

Ujistěte se před používáním stoličky do sprchy, že je opěrka správně zafixována dvěma plastovými koncovkami (15).

Společnost MEYRA nemůže být ve smyslu odpovědnosti za výrobek zodpovědná za škody nebo rizika, které jsou způsobeny dětmi bez dozoru ve spojitosti s výrobkem.

Nastavení výšky sedu

Teleskopické nohy (9) nastavte na stejnou výšku. Pro nastavení výšky nejdříve vysuňte příslušné svorky (8). Pak posuňte teleskopické nohy do požadované výšky. Následně zajistěte příslušné svorky a nechte je viditelně zapadnout.

Zkontrolujte správnou a bezpečnou aretaci svorek.

Sedák

Sedací desku (1) odejmete lehkým tlakem zespodu. Před dalším použitím sedací desku narovnejte do správné polohy a pevně nasadte na spojovací trubky.

Opěrka

Židle do sprchy:

Před použitím nasadte opěrku na doraz na zádové trubky bočních rámu a zafixujte plastovými koncovkami (15).

Područky

Židle do sprchy:

Pro výměnu poškozených područek demontujte upevňovací šrouby (14).

Skládání/Rozkládání

Skládací židle do sprchy:

Skládání

1. Sedák odjistěte lehkým nadzvednutím.
2. Jeden z bočních ráků (2) resp. (3) otočte za rám zad.
3. Sedák (1) zaklapněte dolů. – Sedák předtím zvedněte a druhý boční rám lehce vyklopte.
4. Následně otočte druhý boční rám před sedák (E).

Rozkládání

1. Přední boční rám vytočte ven.
2. Sedák vyklopte vzhůru a nasadte na boční rám.
3. Zadní boční rám vytočte dopředu.
4. Spojovací trubky natlačte (11) na boční rám.

Čištění

K čištění používejte nejlépe mýdlový roztok. Čisticí prostředek by měl v každém případě mít hodnotu pH min. 6 (neutrální čistič). K čištění nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Dezinfekce

Pokud je výrobek používán více osobami (např. v pečovatelském domě), je předepsáno používání běžně dostupných dezinfekčních prostředků. Před dezinfekcí výrobek očistěte.

Dezinfekce stíráním nebo rozprašovací je přípustná pouze kontrolovanými a bezpečnými dezinfekčními prostředky.


Seznam kontrolovaných a bezpečných dezinfekčních prostředků a jejich používání vystavený Institutem Roberta Kocha najdete na www.rki.de.

Při používání dezinfekčních prostředků mohou být plochy ovlivněny aplikací, což může omezit dlouhodobou funkčnost komponent. Dbejte proto na výrobcem předepsané doporučení použití.

Opravy

Používejte výhradně originální náhradní díly. Využijte servisních nabídek Vašeho odborného prodejce.

Likvidace

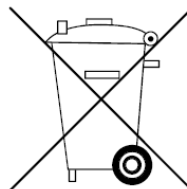

Likvidace se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení.

Informujte se na úřadu na místní sběrný dvůr.

Údržba

Chybná nebo zanedbaná péče a údržba výrobku může vést k omezení odpovědnosti výrobce.

Práce údržby

Následující plán údržby představuje průvodce pro provádění údržbových prací.

Neexistuje žádný výklad pro skutečně nutný, pro výrobek stanovený objem prací.

Plán údržbových prací viz strana 5.

Technické údaje

Model: Stolička do sprchy 3016702

Délka	44 cm
Šířka	53 cm
Výška.....	65-72 cm
Sedací plocha	40x40 cm
Výška sedu	46-53 cm
Výška područek	17,5 cm
Max. zatížení	120 kg
Hmotnost	2,5 kg
Max. teplota vody k čištění.....	80°C
Barva	bílá
Štítek	na sedací trubce

Model: Židle do sprchy 3016712


Délka	53 cm
Šířka	53 cm
Výška.....	82-89 cm
Sedací plocha	40x40 cm
Výška sedu	46-53 cm

Výška područek 17,5 cm
Max. zatížení 120 kg
Hmotnost 3,4 kg
Max. teplota vody k čištění 80°C
Barva bílá
Štítek na sedací trubce

Model: Židle do sprchy skládací 3016722

Délka 55 cm
Šířka 53 cm
Výška 82-89 cm
Sedací plocha 40x40 cm
Výška sedu 46-53 cm
Výška područek 17,5 cm
Max. zatížení 120 kg
Hmotnost 3,8 kg
Max. teplota vody k čištění 80°C
Barva bílá
Štítek na sedací trubce

Význam symbolů na výrobku

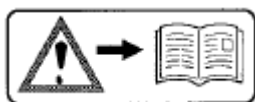

Přečtěte návod k použití a ostatní příloženou dokumentaci.



Upozornění na nebezpečí skřípnutí. – Nesahejte tam.


Význam symbolů na štítku



Výrobce



Objednací číslo

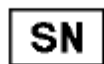

Sériové číslo



Datum výroby (rok – kalendářní týden)



Přípustná hmotnost uživatele



Přípustná celková hmotnost

Záruka

Na tento produkt přebíráme v rámci našich všeobecných obchodních podmínek zákonnou záruku a případně zřejmé resp. sjednané záruky. Pro záruční plnění resp. záruční nároky prosím obraťte na stránku 5 s oddílem pro vyplnění údajů o modelu, číslu dodacího listu s datem, sériové číslo (SN) a předejte vyplněné Vašemu odbornému prodejci.

Sériové číslo (SN) vyčtete ze štítku.

Předpoklad pro uplatnění záručního plnění resp. záručních nároků je v každém případě správné používání výrobku, použití originálních náhradních dílů od odborného prodejce jakožto i pravidelné provádění údržby a kontrol.

Záruku nelze uplatnit na poškození povrchu, poškození obutí kol, poškození díky uvolněným šroubům nebo matic jakožto i vychýlené montážní otvory díky častým úpravám.

Dále jsou vyloučeny škody na pohonu a elektronice, které byly zapříčiněny neodborným čištěním přístrojem s parními tryskami resp. úmyslným nebo neúmyslným namočením komponentů.

Rušení ze zdrojů záření, jako jsou mobilní telefony s vysokým vysílacím výkonem, hi-fi systémy a další silné zdroje rušení mimo standardní specifikace, nelze uplatnit jako záruční plnění nebo záruční nároky.

Pozor:

Nedodržování návodu k použití jakožto i neodborně provedené opravy a také zvláštní technické změny a úpravy bez souhlasu vedou k zániku jak záručního plnění resp. záručního nároku, tak také k zániku odpovědnosti za výrobek obecně.

Upozornění:

Tento návod k použití jako součást výrobku musí být předán uživateli a při další změně uživatele.

Technické změny ve smyslu pokroku si vyhrazujeme.



Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.












Záruční list / Záruka

Prosím vyplňte! V případě potřeby zkopírujte a kopii pošlete Vašemu odbornému prodejci.

<h1>Záruční list / Záruka</h1>	
model:	číslo dodacího listu:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
SN (viz štítek):	datum dodání:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Razítko odborného prodejce:	
<input type="text"/>	

Plán údržby

KDY	CO	POZNÁMKA
Před použitím	Zkontrolovat zda nejsou poškozené zádové a/nebo rámové trubky.	Kontrolu provede sám uživatel nebo ošetřovatel. Při deformaci nebo popraskání ve sváru kontaktujte ohledně opravy odborný servis. – Nebezpečí úrazu!
Před použitím	Zkontrolovat zda není poškozená sedací deska a/nebo opěrka.	Kontrolu provede sám uživatel nebo ošetřovatel. Při deformaci nebo popraskání ve sváru kontaktujte ohledně opravy odborný servis. – Nebezpečí úrazu!
Po použití	Čištění	Čištění provede sám uživatel nebo ošetřovatel.
Každých 6 měsíců (podle četnosti používání)	Zkontrolovat zda nejsou poškozeny gumové koncovky a zda pevně drží spojovací materiál.	Kontrolu provede sám uživatel nebo ošetřovatel.
Doporučení výrobce: Každých 12 měsíců (podle četnosti používání)	Kontrola bezpečnosti	Kontrolu provede odborník.

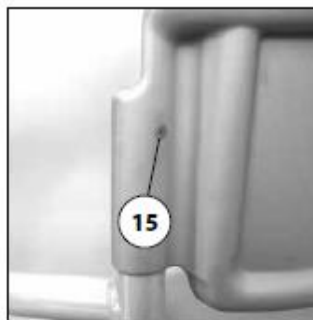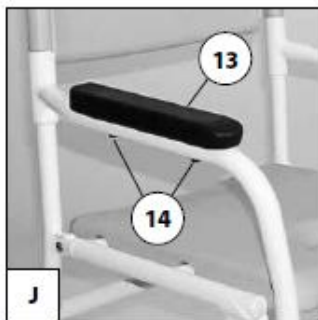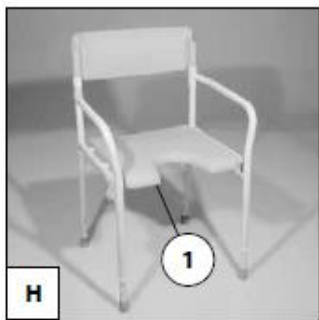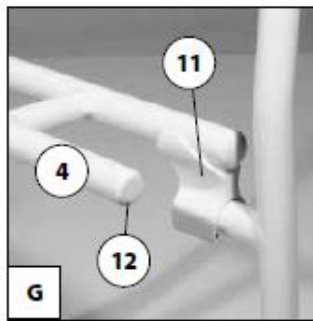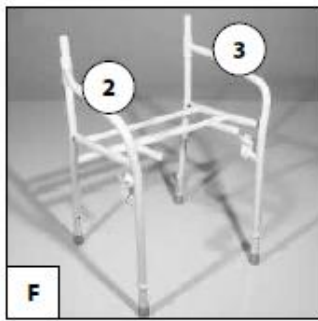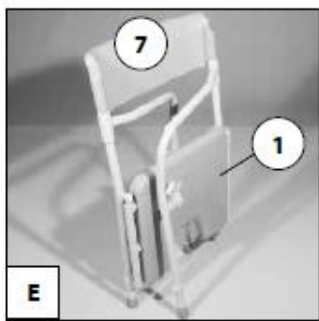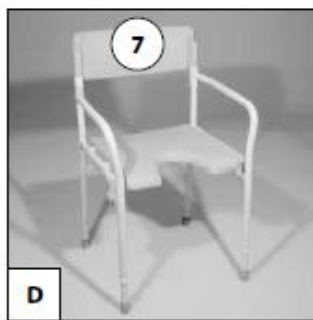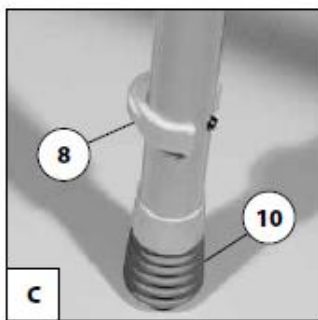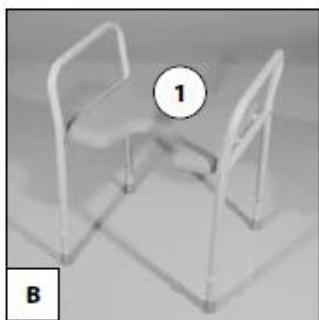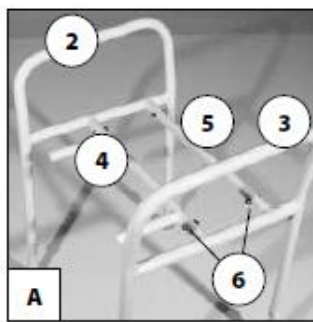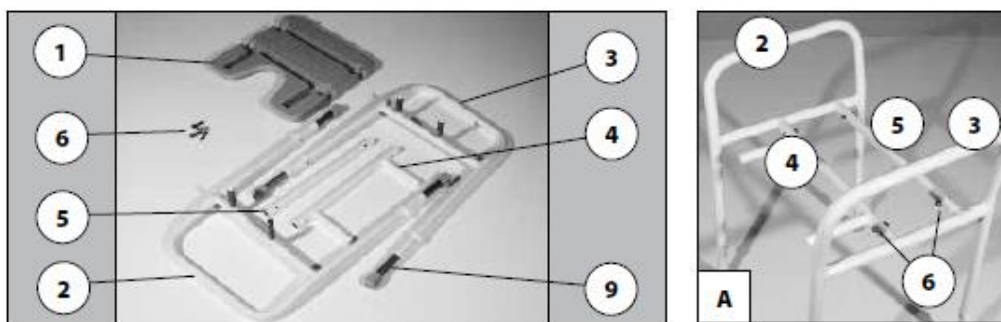

Výrobce

MEYRA GmbH
 Meyra-Ring 2
 D-32689 Kalletal-Kalldorf
www.meyra.de

Distributor pro ČR

MEYRA ČR s.r.o.
 Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4
 tel.: 272 761 102
 e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz

Datum poslední revize: 01/2016