

Etac Fresh

69 / 74 cm


78187G 17-02-09

etac®

Návod k použití


CE

A

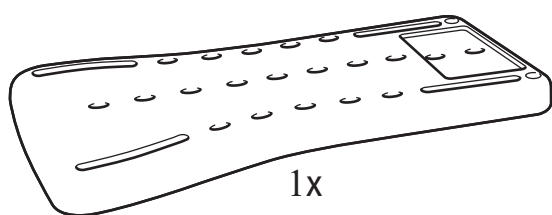


B


1

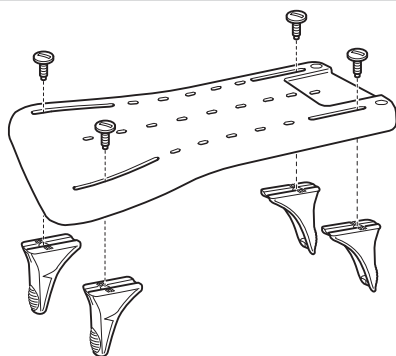


2

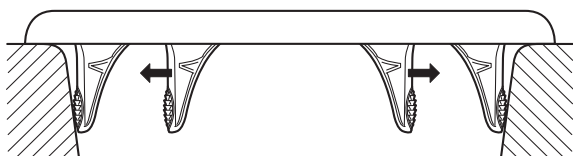




3

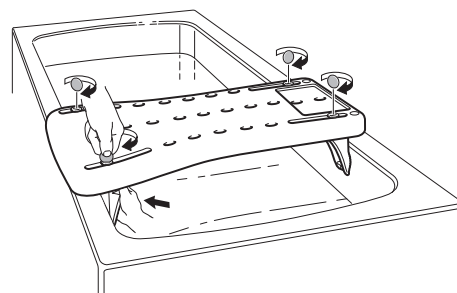


4

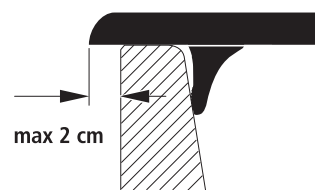


C

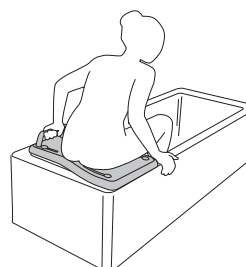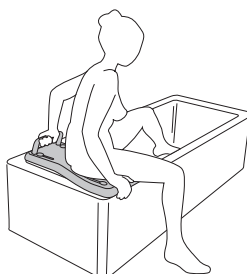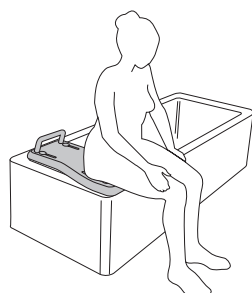


D

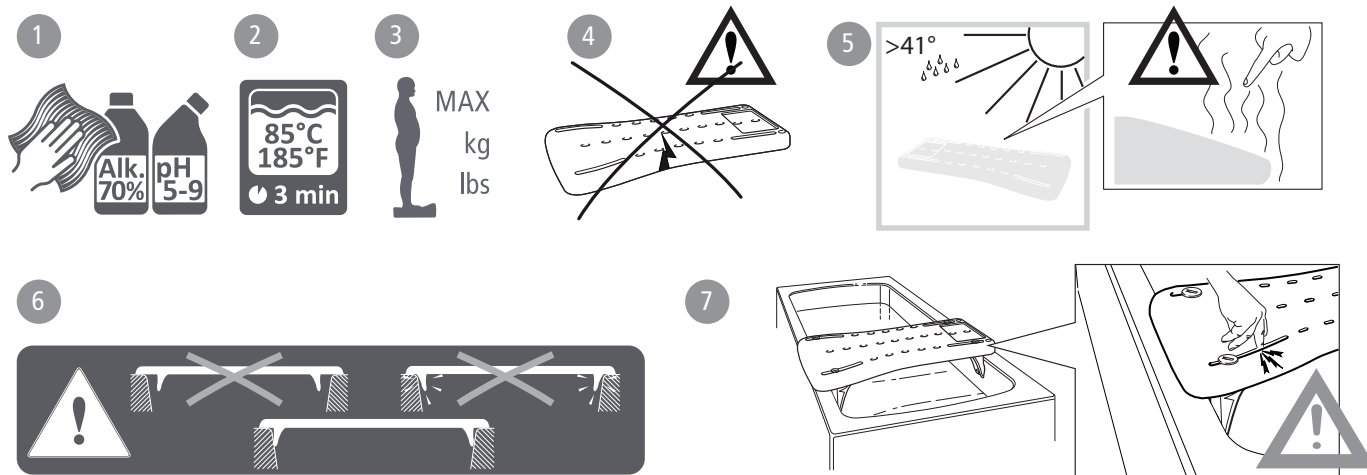

E

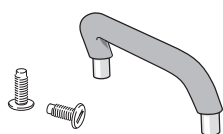

F

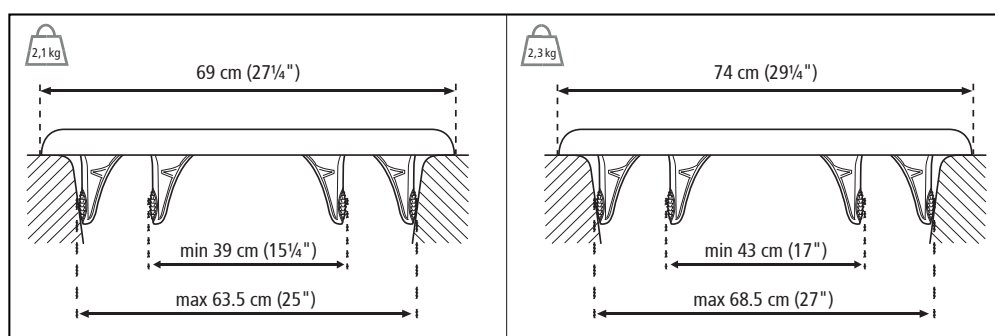

Čeština

Základní informace:

Plastová vanová deska s protiskluzovým povrchem, robustními držáky, otvory pro odtok vody a madlem pro bezpečné a snadné mytí. Extra rozšířená sedací část na jedné straně umožňuje pohodlnější a bezpečnější vstup do vany a zpět. Snadné čištění.

Obrázek A Obsah dodávky

Obrázek B Instalace

Obrázek C Použití

Obrázek D Údržba a bezpečnost

1. Výrobek očišťujte běžnými, neabrazivními čistícími prostředky s pH 5 až 9 nebo 70% dezinfekčním roztokem. Výrobek nevyžaduje žádnou další údržbu.
2. Výrobek je možné čistit sterilizací při teplotě 85°C po dobu 3 minut.
3. Maximální nosnost 150 kg.
4. Vadný nebo poškozený výrobek se nesmí používat!
5. Pokud by byl výrobek horký, může způsobit popáleniny.
6. Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek správně nainstalován.
7. Nebezpečí pohmoždění!

Použité materiály jsou odolné vůči korozi.

Použité materiály jsou odolné vůči všem běžným dezinfekčním prostředkům.

Záruka a životnost:

Záruka 5 let na materiálové a výrobní vady. Životnost výrobku 10 let.

Obrázek E Příslušenství

1. Bezpečnostní madlo (držadlo)

Obrázek F Technická data



Výrobce: Etac AB (Export)
Box 203
334 24 Anderstorp, Sweden
www.etac.com

Distributor: Meyra ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
Praha 4 - Spořilov
www.meyra.cz