
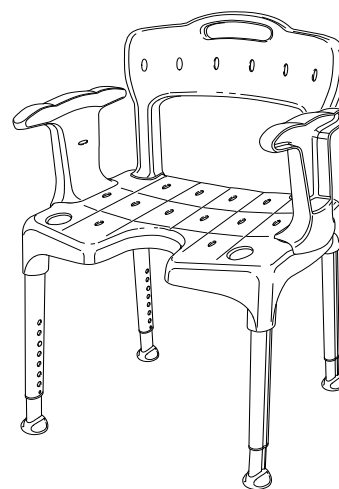
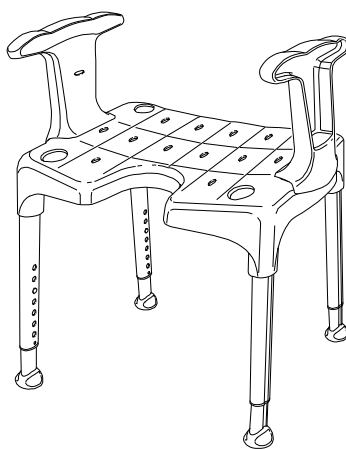


# Etac Swift/Smart/Easy/Edge


## Návod k použití

etac®


78390.17 23-01-12

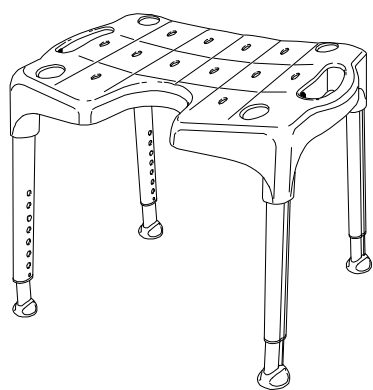


Etac Swift

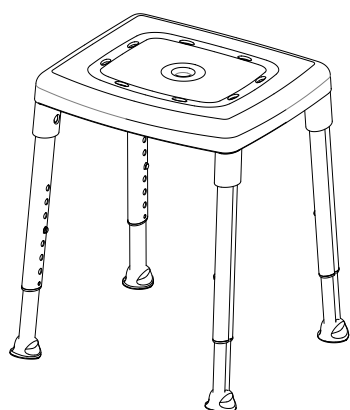

Etac Smart

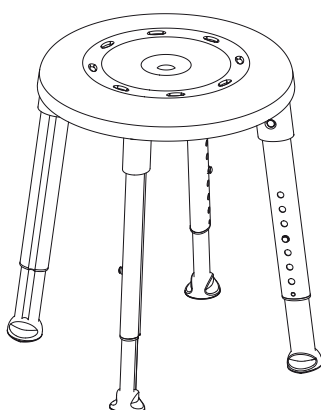


Etac Easy

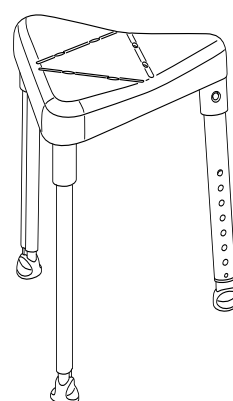

Etac Edge

Čeština 4

A

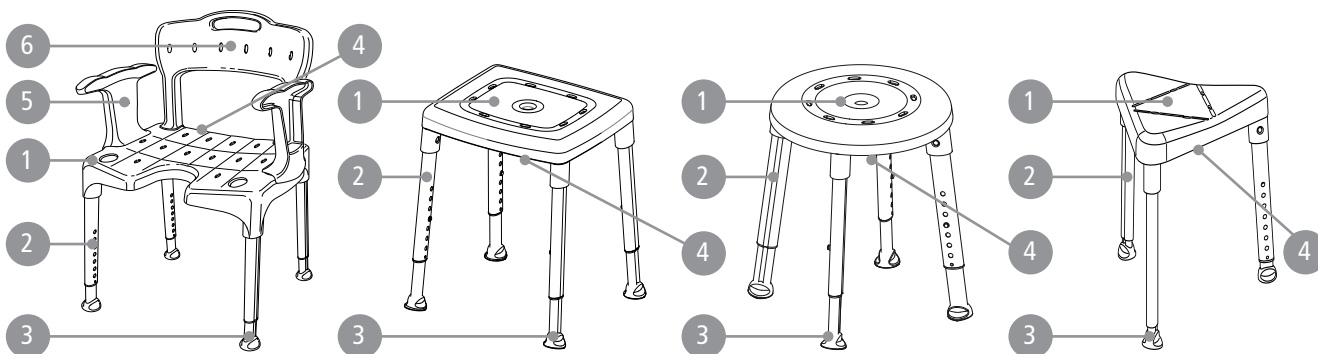


B

Swift	420-570 mm 16½"-22½"	540 x 410 mm 21¼" x 16¼"	530-540/565-595 mm 20¾"-21¼" / 22¼"-23½"	3,1/3,9/4,7 kg 7/8/10 lbs	160 kg (*150 kg) 352 lbs	210 mm / 450 mm 8¼" / 17¾"	800-950 mm 31½"-37½"
Swift low	345-420 mm 13½"-16½"	540 x 410 mm 21¼" x 16¼"	520-530/555-565 mm 20¼"-20¾" / 21¾"-22¼"	2,9 kg/4,5 kg 6/10 lbs	160 kg 352 lbs	210 mm / 450 mm 8¼" / 17¾"	725-800 mm 28½"-31½"
Smart	420-570 mm 16½"-22½"	430 x 380 mm 21¼" x 16¼"	455-465 x 410-430 mm 18"-18¼" / 16¼"-17"	3,15 kg 7 lbs	200 kg (*150 kg) 440 lbs (*330 lbs)	-	-
Smart low	345-420 mm 13½"-16½"	430 x 380 mm 17" x 15"	455-460 x 410-415 mm 18" / 16¼"	2,98 kg 6 lbs	200 kg 440 lbs	-	-
Edge	420-570 mm 16½"-22½"	450 x 405 mm 17¾" x 16"	500-520 mm 19¾"-20½"	2,6 kg 6 lbs	130 kg 286 lbs	-	-
Edge low	345-420 mm 13½"-16½"	450 x 405 mm 17¾" x 16"	490-500 mm 19¼"-19¾"	2,4 kg 5 lbs	130 kg 286 lbs	-	-
Easy	420-570 mm 16½"-22½"	400 mm 16"	495-535 mm 19½"-21"	2,75 kg 6 lbs	200 kg (*150 kg) 440 lbs (*330 lbs)	-	-


\*č. výrobku 81901070 / 81901080 / 81901090 / 81951070 / 81951080 / 81951090 / 81701480

Swift	380 mm 15"	448 mm 17¾"	
Swift low	380 mm 15"	448 mm 17¾"	
Smart	-	-	
Smart low	-	-	
Edge	-	-	
Edge low	-	-	
Easy	-	-	

### C

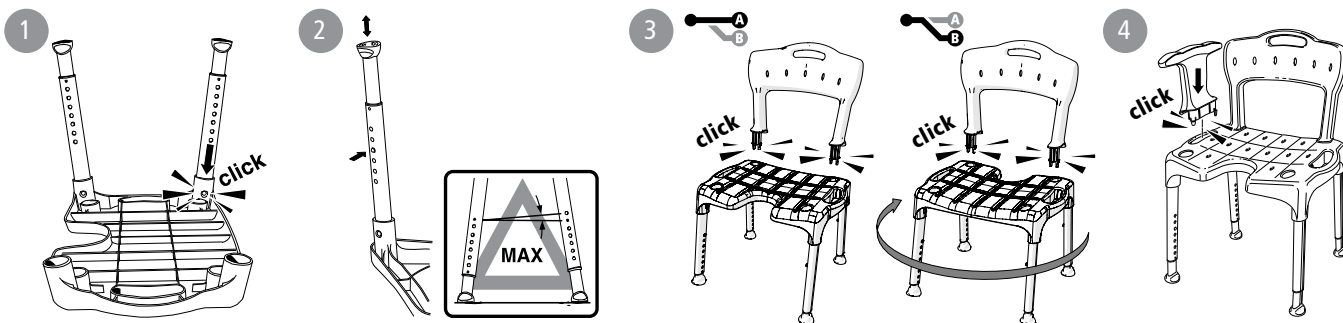


### D

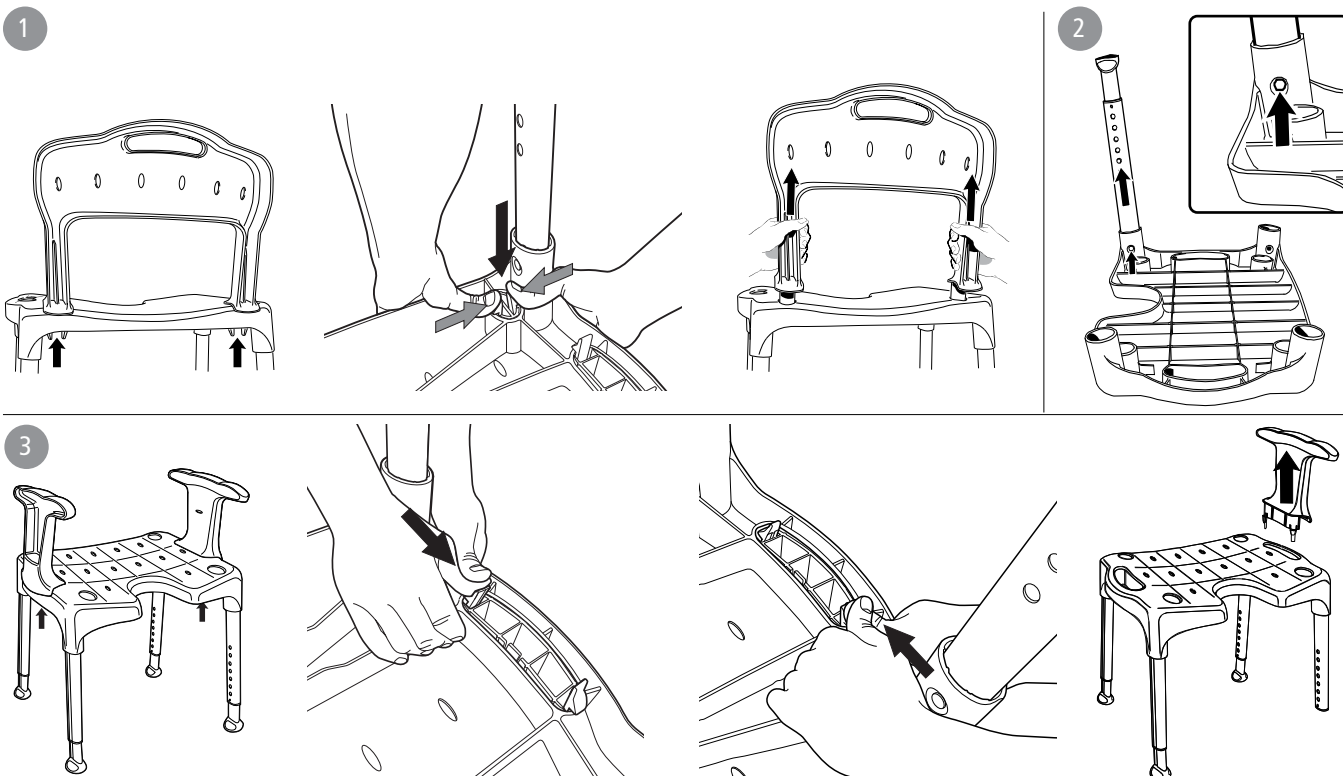

### E



### F

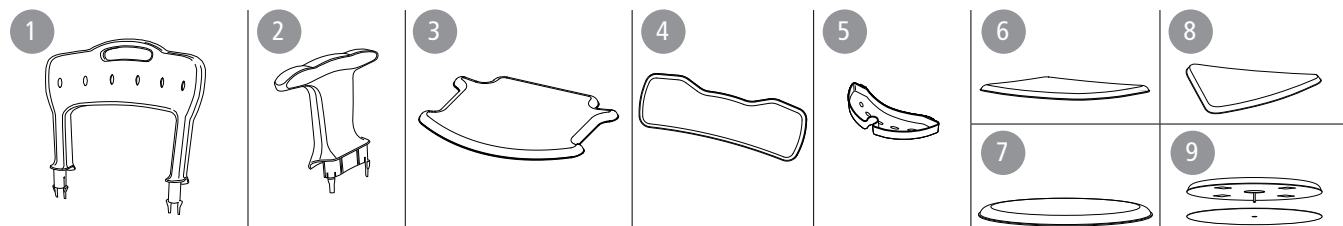

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek od společnosti Etac. Abyste předešli zranění při montáži, manipulaci a používání, je důležité, abyste si nejprve přečetli tento návod, který uchovejte i pro pozdější použití. Návod k použití najdete také na [www.etac.com](http://www.etac.com). Můžete si zvolit váš jazyk přes link "International" a "Lokale Websites". Zde najdete i další dokumentaci k výrobku, informace pro předepisujícího lékaře, informace před nákupem a návody k opravám.



Tento symbol je uveden v návodu spolu s textem. Označuje případy, kdy může být ohrožena bezpečnost uživatele nebo asistenta.



Obrázky, na které je v textech odkazováno, najdete v přední části návodu (strany 2 až 3). Pro odpovídající text viz obrázky A až F.

## Popis

### Sprchové stoličky/židle Etac:

Sprchové stoličky/židle Etac mají stabilní design se zabudova-nou flexibilitou, která se přizpůsobí nerovným podlahám. Všechny výrobky mají výškově nastavitelné hliníkové nohy, které se snadno připevňují. Nohy jsou vychýleny směrem ven pro maximální stabilitu bez ohledu na výšku. Všechny výrobky jsou vybaveny koncovkami, které poskytují dobrou přilnavost i na nerovných a vlhkých podlahách. Výrobky lze naklonit dopředu, aby se dále usnadnilo vstávání.

Stoličky jsou navrženy s protiskluzovým vzorem, který zajišťuje bezpečné a protiskluzové sezení, i když jsou mokré. Sedačky mají také drenážní otvory, které účinně odvádějí přebytečnou vodu ze stoličky.

### Sprchová stolička/židle Swift:

Etac Swift je k dispozici jako sprchová stolička, sprchová stolička s područkami a kompletní sprchová židle s područkami a opěrkou zad. Područky/zádová opěrka se nasazují a odebírají bez nutnosti použití nářadí a v případě potřeby je lze dodatečně přidat/odstranit. Sedačka je oboustranná a má hygienickou prohlubeň. Pokud nejsou použity područky, otvory umožňují stabilní úchop a oporu.

## Zamýšlené použití

Etac Swift/Edge/Easy/Smart (dále také nazývané jako výrobek) je určen ke kompenzaci různých typů zranění nebo postižení, které omezují pohyblivost uživatele.

Výrobek nabízí bezpečné a stabilní sezení ve sprše nebo v koupelně. Modely s područkami také poskytují podporu při sezení, vstávání nebo při přesunu.

Výrobek je určen pro dospělé uživatele, obecně osoby s tělesnou výškou alespoň 146 cm a hmotností nejméně 40 kg.

Výrobek je určen pro použití v domácím prostředí i v institucích. Výrobek je vhodný pro použití ve vlhkých prostorách, nikoli však v bazénech nebo podobném korozivním prostředí.

Výrobek byl testován a vyhovuje požadavkům stanoveným v EN ISO 10993-1 a SS EN 12182.

Výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

### Kontraindikace

Nejsou známy žádné kontraindikace.



Výrobek by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy.

## Popis výrobku

viz obrázek A

A1. Sedák A2. Nohy A3. Koncovky

A4. Štítek výrobku\*

A5. Područka A6. Zádová opěrka

\*Datum výroby lze vyčíst z čárového kódu na výrobku. Číslo 11 je uvedeno pod čárovým kódem v závorce. Kombinace čísel za těmito závorkami je datum výroby.

Swift	Smart	Easy	Edge
●	●	●	●
●	●	●	●
●			

## Technické údaje

viz obrázek B

## Montáž

viz obrázek C

## Demontáž

viz obrázek D

1. Zádová opěrka 2. Nohy 3. Područky

## Záruka, životnost

Záruka 5 let na materiálové a výrobní vady. Podmínky naleznete na [www.etac.com](http://www.etac.com)  
Životnost 10 let. Úplné informace o životnosti výrobku naleznete na [www.etac.com](http://www.etac.com).



## Bezpečnost & údržba

viz obrázek E



- Vadný výrobek se nesmí používat.
- E1.** U nohou stoličky není povolen výškový rozdíl o více než jeden otvor (3°).
- E2.** Při pohybu do stran se neopírejte pouze o jednu područku.

**E3.** Maximální hmotnost uživatele.

**E4.** Výrobek čistěte čistícím prostředkem bez rozpouštědel s hodnotou pH 5-9 nebo 70% dezinfekčním roztokem.

**E5.** Je-li nutné, výrobek lze sterilizovat při max. 85° C/185° F po dobu 3 minut.

V případě, že dojde k nežádoucí události v souvislosti s používáním výrobku, měla by být včas oznámena místnímu prodejci a příslušnému národnímu úřadu. Místní prodejce předá informace výrobci.

## Opětovné použití

Výrobek je vhodný pro opakované použití. Počet opakovaných použití závisí na tom, jak často a jakým způsobem je výrobek používán. Před dalším použitím výrobek důkladně vyčistěte a dezinfikujte a zkontrolujte jeho bezpečnost. V případě potřeby proveďte nápravná opatření.

## Skladování

Výrobek by měl být skladován ve vnitřních prostorách na suchém místě při teplotě nad 5°C. Pokud byl výrobek skladován po delší dobu (více než čtyři měsíce), musí být jeho funkce před použitím překontrolovány odborníkem.

## Příslušenství

viz obrázek F

- F1. Zádová opěrka
- F2. Područky / pár
- F3. Polstr sedačky
- F4. Polstr zádové opěrky
- F5. Odkládací miska pro mýdlo/Držák sprchové hlavice
- F6. Polstr sedačky
- F7. Polstr sedačky
- F8. Polstr sedačky
- F9. Otočná deska

Swift	Smart	Easy	Edge
●			
●			
●			
●			
●			
	●		
		●	
			●
●	●		



Etac Supply Center AB  
Långgatan 12  
SE-334 33 Anderstorp  
[www.etac.com](http://www.etac.com)



78390

7 320450 126567 >

etac®