
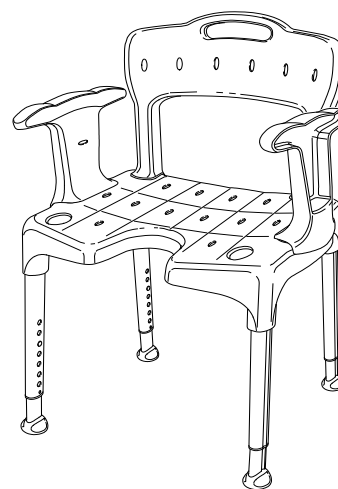
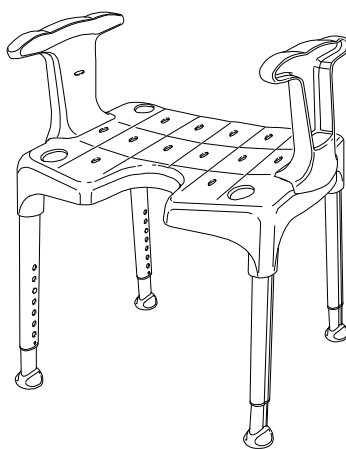


Etac Swift




Návod k použití

etac®

78390P 21-05-11

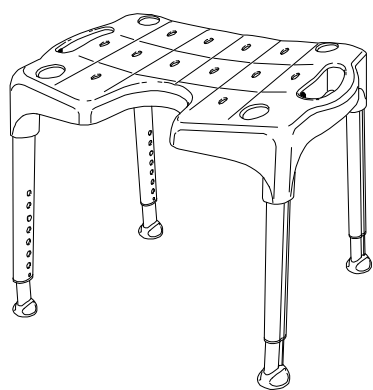

Etac Swift

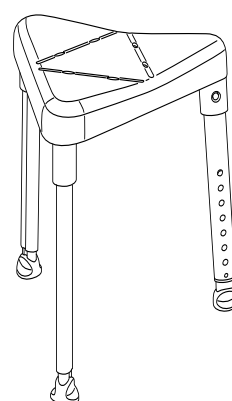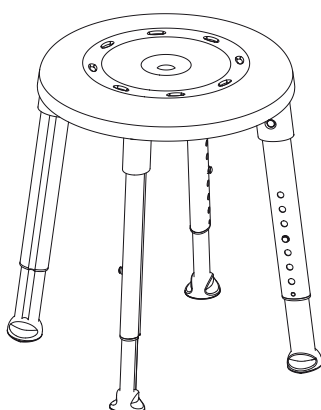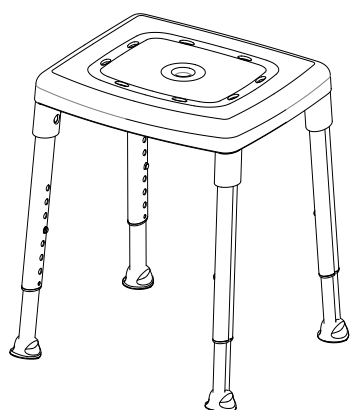


Etac Smart

Etac Easy

Etac Edge

A

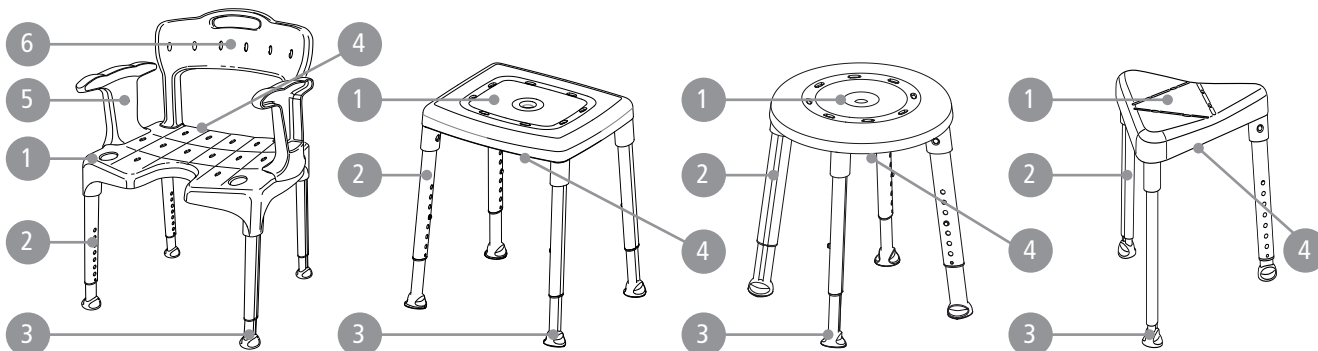


B

Swift	420-570 mm 16½"-22½"	540 x 410 mm 21¼" x 16¼"	530-540/565-595 mm 20¾"-21¼" / 22¼"-23½"	3,1/3,9/4,7 kg 7/8/10 lbs	160 kg 352 lbs	210 mm / 450 mm 8¼" / 17¾"	800-950 mm 31½"-37½"	
Swift low	345-420 mm 13½"-16½"	540 x 410 mm 21¼" x 16¼"	520-530/555-565 mm 20¼"-20¾" / 21¾"-22¼"	2,9 kg/4,5 kg 6/10 lbs	160 kg 352 lbs	210 mm / 450 mm 8¼" / 17¾"	725-800 mm 28½"-31½"	
Smart	420-570 mm 16½"-22½"	430 x 380 mm 21¼" x 16¼"	455-465 x 410-430 mm 18"-18¼" / 16¼"-17"	3,15 kg 7 lbs	200 kg (*150 kg) 440 lbs (*330 lbs)	-	-	
Smart low	345-420 mm 13½"-16½"	430 x 380 mm 17" x 15"	455-460 x 410-415 mm 18" / 16¼"	2,98 kg 6 lbs	200 kg 440 lbs	-	-	
Edge	420-570 mm 16½"-22½"	450 x 405 mm 17¾" x 16"	500-520 mm 19¾"-20½"	2,6 kg 6 lbs	130 kg 286 lbs	-	-	
Edge low	345-420 mm 13½"-16½"	450 x 405 mm 17¾" x 16"	490-500 mm 19¼"-19¾"	2,4 kg 5 lbs	130 kg 286 lbs	-	-	
Easy	420-570 mm 16½"-22½"	400 mm 16"	495-535 mm 19½"-21"	2,75 kg 6 lbs	200 kg (*150 kg) 440 lbs (*330 lbs)	-	-	


* č. výrobku 81901070 / 81901080 / 81901090 / 81951070 / 81951080 / 81951090

Swift	380 mm 15"	448 mm 17¾"		PP	TPE	Alu
Swift low	380 mm 15"	448 mm 17¾"				
Smart	-	-				
Smart low	-	-				
Edge	-	-				
Edge low	-	-				
Easy	-	-				

C

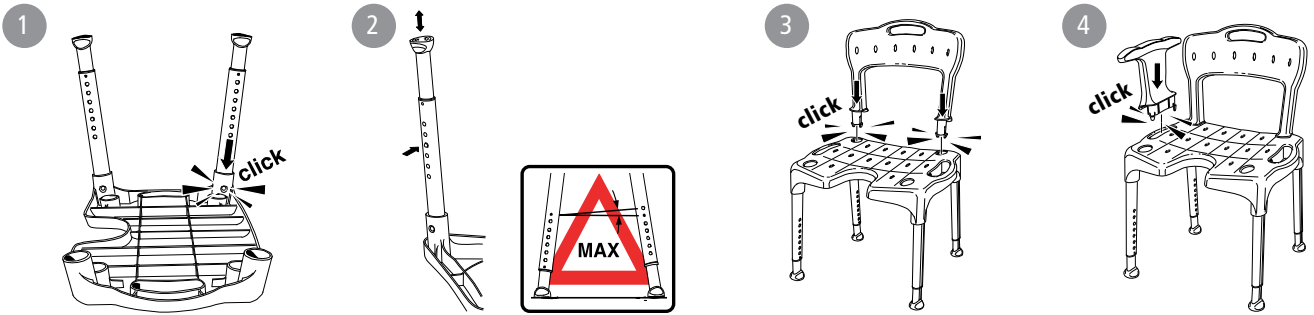


D

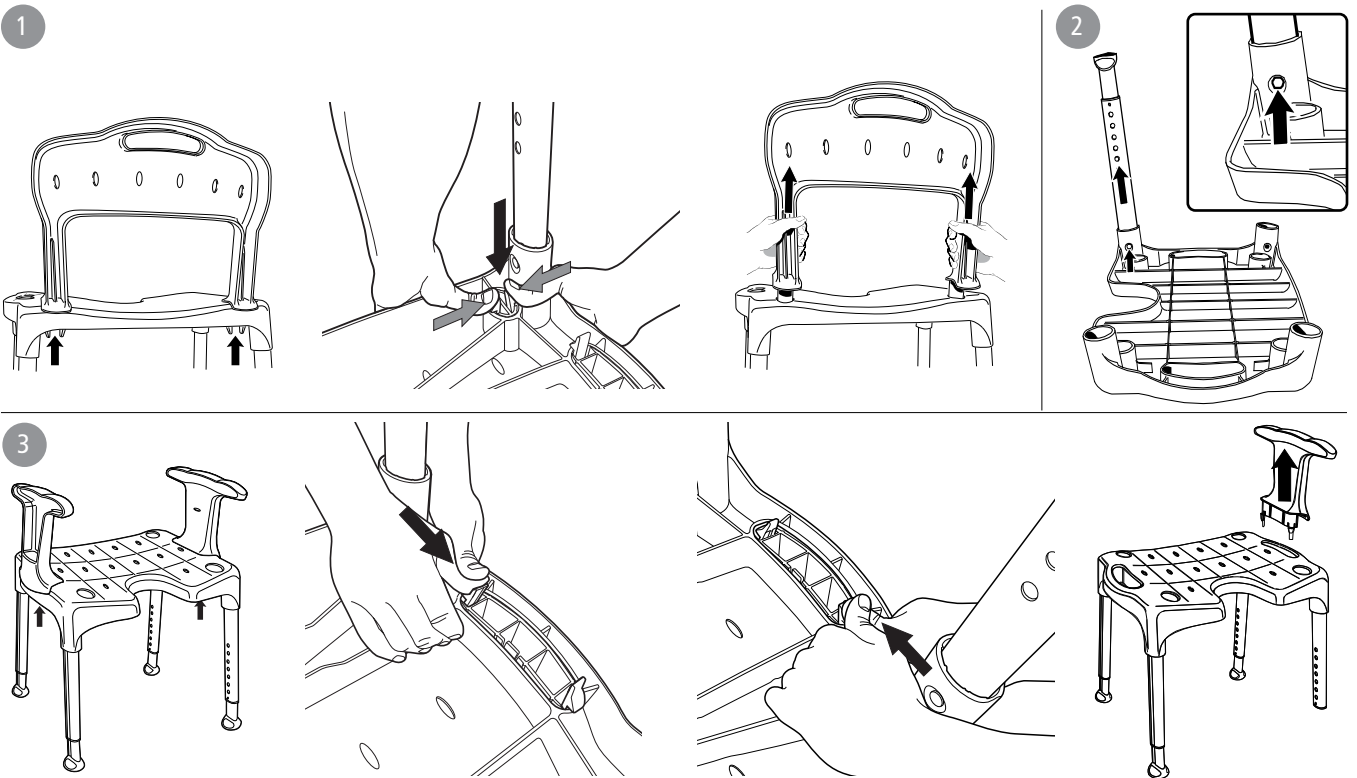

E



F

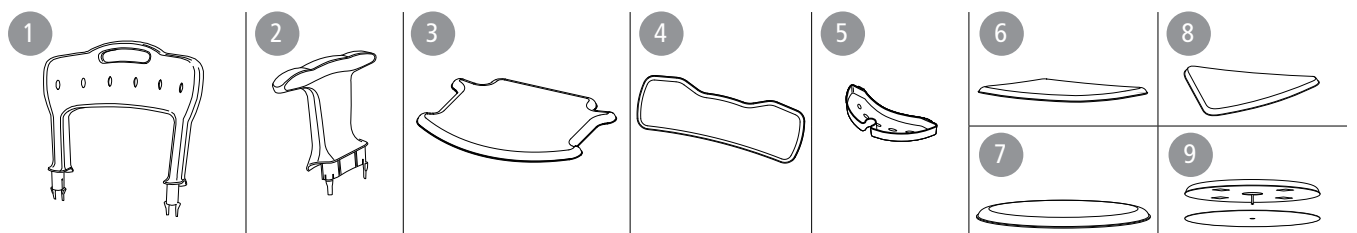

Děkujeme vám za rozhodnutí pro zakoupení výrobku společnosti Etac.
Abyste předešli zranění během manipulace a používání, je třeba si pečlivě přečíst tento návod.
V tomto návodu je uživatelem osoba sedící na židli. Pečovatel je osoba, která uživateli pomáhá.



Tento symbol se objevuje v návodu spolu s textem. Označuje případy, kdy může být ohrožena bezpečnost uživatele nebo pečovatele.



Obrázky, na které se odkazuje na stránkách, najdete na začátku návodu (strany 2 a 3).
Viz obrázky A až F pro odpovídající text.

Popis

Etac sprchové stoličky/sprchové židle:

Etac sprchové stoličky/sprchové židle mají stabilní design se zabudovanou flexibilitou, která se přizpůsobí nerovným podlahám. Všechny výrobky mají výškově nastavitelné hliníkové nohy, které se snadno instalují. Nohy jsou mírně rozšířené pro maximální stabilitu bez ohledu na výšku. Všechny výrobky mají koncovky nohou, které zajišťují dobrou přilnavost i na nerovných a vlhkých podlahách. Pro ještě snadnější vstávání lze výrobky naklonit dopředu.

Sedátka jsou navržena s protiskluzovým vzorem, který zajišťuje bezpečné a neklouzavé sezení i v mokru.

Sedátka mají také drenážní otvory, které účinně odvádějí přebytečnou vodu ze stoličky.

Swift sprchová stolička/sprchová židle:

Etac Swift je k dispozici jako sprchová stolička, sprchová stolička s područkami a kompletní sprchová židle s područkami a opěrkou zad. Područky/zádová opěrka se nasazují a odnímají bez nutnosti použití nářadí a v případě potřeby je lze dodatečně přidat/odstranit. Sedátko je oboustranné a má hygienickou prohlubeň. Pokud není nutné použít područky, otvor pro ně umožňuje stabilní úchop a oporu.

Účel použití

Etac Swift/Edge/Easy/Smart (dále jen výrobek) je určen ke kompenzaci různých typů zranění nebo postižení, které omezují pohyblivost uživatele.

Výrobek nabízí bezpečné a stabilní sezení ve sprše nebo v koupelně. Modely s područkami také poskytují podporu při posazení, vstávání nebo při přesunu. Výrobek je určen pro dospělé uživatele, obvykle osoby s výškou min. 146 cm a hmotností nejméně 40 kg. Výrobek je určen jak pro použití v domácím prostředí, tak i v pečovatelských zařízeních. Výrobek je vhodný pro použití ve vlhkých prostorech, nikoli však v bazénech nebo v podobném korozivním prostředí.

Výrobek byl testován a splňuje požadavky EN ISO 10993-1 a SS EN 12182. Výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

Kontraindikace

Žádné kontraindikace nejsou známy.



Tento výrobek by měl být recyklován v souladu se státními předpisy.

Popis výrobku

Viz obrázek A

A1. Sedátko A2. Nohy A3. Koncovky

A4. Štítek výrobku

A5. Područka A6. Zádová opěra



Swift	Smart	Easy	Edge
●	●	●	●
●	●	●	●
●			

Technické údajeObrázek B

MontážObrázek C

DemontážObrázek D

1. Zádová opěra 2. Nohy 3. Područky

Záruka, životnost

Záruka na materiál a výrobní vady 5 let. Podmínky najdete na www.etac.com.

Životnost 10 let. Kompletní informace o životnosti výrobku najdete na www.etac.com.

Bezpečnost a údržbaObrázek E



• Vadný výrobek nebo příslušenství se nesmí používat.

E1. Výškový rozdíl o více než jeden (3°) otvor na nohách židle není povolen.

E2. Při pohybu do stran se neopírejte pouze o jednu područku.

E3. Max. hmotnost uživatele.

E4. Výrobek čistěte běžnými čistícími prostředky bez rozpouštědel s pH 5-9 nebo 70% lihovým roztokem.

E5. Výrobek lze čistit sterilizací při 85°C/185°F po dobu 3 minut, pokud je to vyžadováno.

V případě, že dojde k nežádoucí události v souvislosti s používáním výrobku, měla by být včas oznámena místnímu prodejci a příslušnému národnímu úřadu. Místní prodejce předá informace výrobci.

Opětovné použití

Výrobek je vhodný pro opakované použití. Počet opakovaných použití závisí na tom, jak často a jak je výrobek používán. Před každým dalším použitím výrobek důkladně vyčistěte a dezinfikujte a zkontrolujte jeho bezpečnost. V případě potřeby proveďte opatření, jako je výměna náhradních dílů.

Příslušenství	Viz obrázek F	Swift	Smart	Easy	Edge
F1. Zádová opěra		●			
F2. Područky/pár		●			
F3. Polstr sedátka		●			
F4. Polstr zádové opěry		●			
F5. Miska na mýdlo/Držák sprchové hlavice		●			
F6. Polstr sedátka			●		
F7. Polstr sedátka				●	
F8. Polstr sedátka					●
F9. Otočný polstr		●	●		

Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp
Sweden

Tel 0371-58 73 00
Fax 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

Etac R82 GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Germany

Tel 02366-5006-0
Fax 02366-5006-200
info@etac.de
www.etac.de

Etac AB (export)
Box 203
334 24 Anderstorp
Sweden

Tel 46 371-58 73 30
Fax 46 371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.com

Etac R82 B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen,
Nederland

Tel +31 72 547 04 39
info.holland@etac.com
www.etac.com

Etac AS
Pb 249,
1501 Moss,
Norway

Tel 815 69 469
Fax 69 27 09 11
hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no

Etac UK Limited
29 Murrell Green Business Park
London Road, Hook, Hampshire
RG27 9GR, United Kingdom

Tel 01256 767 181
Fax 01256 768 887
info@etacuk.com
www.etac.com

Etac A/S
Egeskovvej 12
8700 Horsens
Denmark

Tel 79 68 58 33
Fax 75 68 58 40
info@etac.dk
www.etac.dk

R82 UK Limited.
Unit D4A, Coombswood Business
Park East
Coombswood Way, Halesowen
West Midlands B62 8BH
United Kingdom

Tel 0121 561 2222
Fax 0121 559 5437
enquiries@etac.uk.r82.com
www.etac.com

R82, Inc.
12801 E. Independence Boulevard
P.O. Box 1739
Matthews, NC 28106, USA

Tel 800 336 7684
Fax 704 882 0751
Information@snugseat.com
www.etac.com



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp



78390

etac®