


MOBALUX Sklopná sedačka do sprchy

Model 3013972

Montáž / Návod k použití

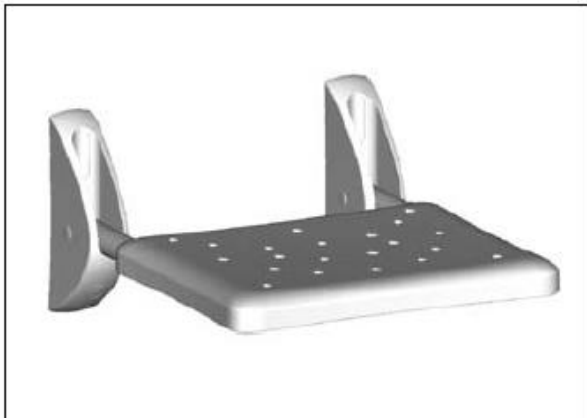

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili zvolením tohoto výrobku.

Tento návod k obsluze je pro vás pomůckou, s jejíž pomocí se seznámíte s manipulací s výrobkem tak, aby bylo zaručeno bezpečné používání.

Před prvním použitím si pečlivě přečtete tento návod.

Kontrola při převzetí

Rozbalte prosím celý výrobek a zkontrolujte, zda je kompletní a zda není poškozen transportem. Pokud byste zjistili, že tento výrobek nebo zásilka vykazuje přes očekávání chyby, tak:

1. Reklamujte u přepravce.
2. Nechte škody zaprotokolovat.
3. Informujte neprodleně svého prodejce.

Použití

Tento výrobek slouží osobám s omezenou pohyblivostí s ještě dostatečnou sedací funkcí k ulehčení procesu koupání ve sprše.

Popis

Sklopná sedačka do sprchy umožňuje díky uchycení na zeď individuální umístění ve sprše, dle textury zdi a konstrukce.

Snadno omyvatelná sedací plocha se skládá z polypropylenu příjemnému k pokožce,

nosných trubek z hliníku potaženého plastem a uchycení na zeď z velmi pevného polyamidu.

Obsah dodávky

Sklopná sedačka do sprchy

- 1x Sestavená sklopná sedačka do sprchy
- 1x Upevňovací materiál

Montáž

Umístění sklopné sedačky do sprchy lze ve sprše zvolit libovolně, v závislosti na aplikaci, jsou-li vhodné místní podmínky. Toto by mělo být dopředu posouzeno odborným technikem.

- Sklopte sedací plochu dolů.
- Srovnejte sedací plochu v požadované výšce vodorovně k podlaze.
- Musí být zaručeno, že se uživatel při sezení bezpečně oběma chodidly podepře o podlahu.
- Označte si na stěnu otvory pro uchycení. Náčrt s údaji pro vrtání se nachází na konci tohoto návodu.
- Vrtání děr jakožto i montáž s vhodně zvoleným upevňovacím materiálem dle textury zdi by měl provést pouze odborný technik!

Upevňovací materiál

S výrobkem dodaný upevňovací materiál je určen pro určitou strukturu stěn (např. beton BN 25). Pokud by na místě pro uchycení byla jiná struktura stěny, je odborný technik povinen se na vhodný upevňovací materiál informovat a tento použít.

! **Pozor:** Za nesprávný nebo nesprávně strukturálním podmínkám zvolený upevňovací materiál jakožto i nesprávnou montáž neručíme.

Návod k použití

Pro použití sklopné sedačky do sprchy sklopte sedací plochu směrem dolů. Po použití a

vyčištění sklopte sedací plochu znovu směrem nahoru.

Bezpečnostní pokyny

I přes velmi stabilní výrobní technologie podléhají díly jako sedací plocha, nosné trubky a držáky na stěnu určitému opotřebení. Proto doporučujeme nechat výrobek zkontrolovat odborným technikem každých 6 měsíců. Přitom je třeba také zkontrolovat bezpečnost sedačky z hlediska šroubovacích spojů.

Montáž pouze odborným technikem!

Nestoupejte si na sedací plochu, hrozí nebezpečí pádu!

Doporučujeme nainstalovat do sprchy pro jistotu bezpečnostní madla.

Sedací desku sklapujte opatrně, dbejte na to, aby se ruce nedostaly mezi stěnu a sedačku nebo mezi závěsové části. – Nebezpečí skřípnutí!

Před každým použitím se přesvědčte o použitelnosti výrobku!

Technické údaje

Délka	42 cm
Šířka	32 cm
Výška	8 cm
Hmotnost	1,1 kg
Max. zatížení	130 kg

Čištění

K čištění používejte nejlépe mýdlový roztok. Čisticí prostředek by měl v každém případě mít hodnotu pH min. 6 (neutrální čistič). K čištění nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Dezinfekce

Pokud je výrobek používán více osobami (např. v pečovatelském domě), je předepsáno používání běžně dostupných dezinfekčních prostředků. Před dezinfekcí výrobek očistěte.

Pro ruční dezinfekci výrobku doporučujeme Incidin plus v 0,25 až 0,5 % koncentraci pro aplikaci nebo 4 % roztok Sagrotan.

Opravy

Používejte výhradně originální náhradní díly. Využijte servisních nabídek Vašeho odborného prodejce.

Likvidace

- Obal výrobku lze odevzdat do sběrného dvora.
- Kovové části lze odevzdat k opětovnému využití do sběrného dvora.
- Plasty lze odevzdat do sběrného dvora.
- Elektrické části a řídicí desky lze zlikvidovat jako elektroodpad.
- Likvidace se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení.
- Informujte se na úřadu na místní sběrný dvůr.

Záruka

Na tento produkt přebíráme v rámci našich všeobecných obchodních podmínek zákonnou záruku, která se týká použitého materiálu a chyb ve zpracování. Z toho jsou vyloučeny opotřebitelné díly a díly, které podléhají opotřebením dle povahy určeného účelu, jakožto i škody, které vzniknou následkem nadměrného namáhání, nesprávného používání, násilného poškození nebo nepřípustné úpravy/opravy. V případě uplatnění záruky se obraťte na vašeho odborného prodejce, u kterého jste tento výrobek zakoupili.

Z důvodů odpovědnosti za výrobek smí být opravy, údržba prováděna pouze autorizovaným odborníkem s použitím originálních náhradních dílů. Změny podmíněné technickým zlepšením a designovou modifikací zůstávají vyhrazené.


Věříme, že vám bude výrobek vždy dobře sloužit.

Štítek

Štítek pod sedací plochou



Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

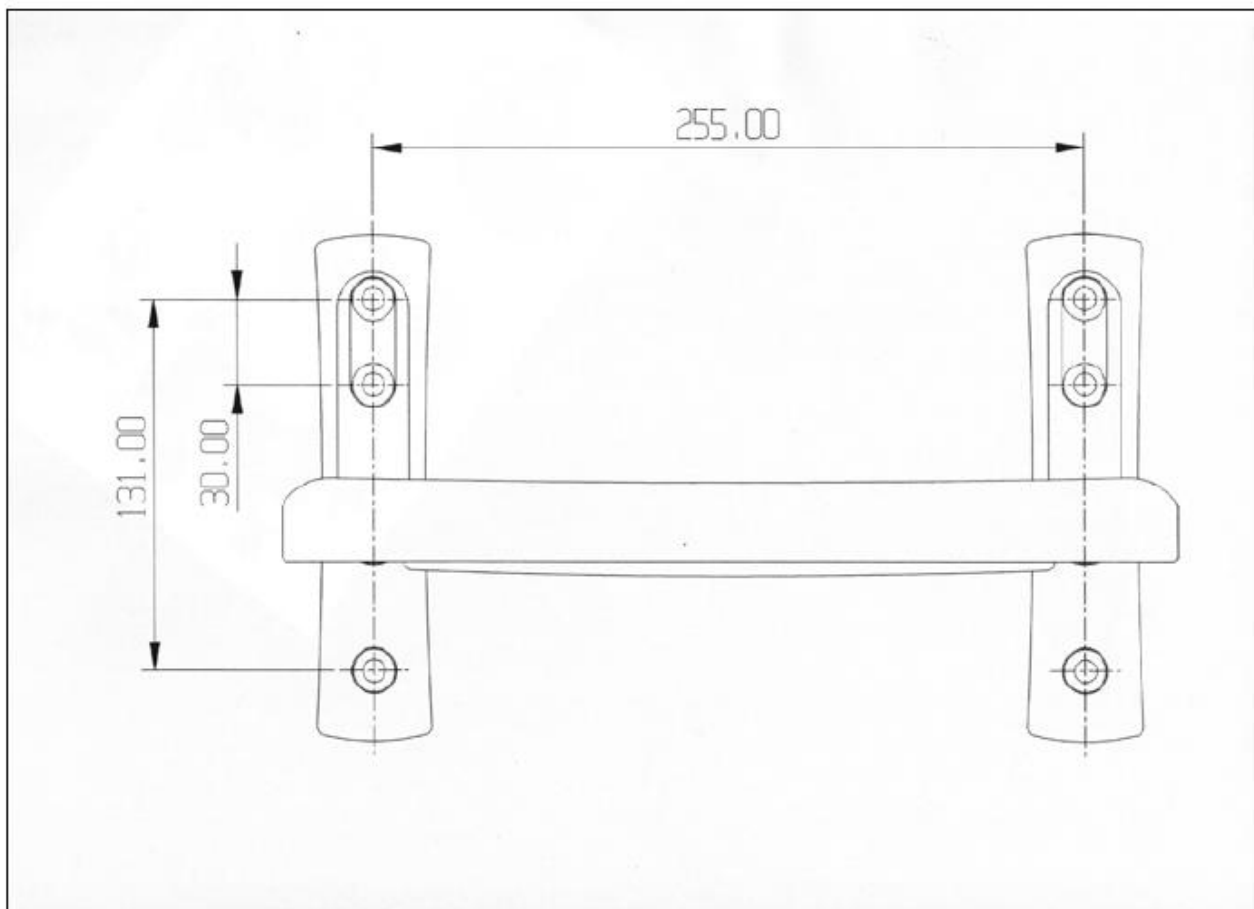

Výrobce

MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
www.meyra.com

Distributor pro ČR

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4
tel.: 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz

Datum poslední revize: 10/2013. Technické změny vyhrazeny!