

Návod k použití

Nástavec na WC

Model 3010502

Polyuretanový toaletní nástavec



Kontrola při převzetí

Vybalte celý výrobek z obalu a zkontrolujte úplnost zásilky. Zkontrolujte, zda zásilka nebyla při přepravě poškozena.

Pokud zjistíte, že výrobek nebo zásilka vykazují nějakou závadu:

- reklamujte jej/ji okamžitě u dopravce,
- nechte sepsat protokol o škodě,
- neprodleně informujte prodejce.

Popis a použití

Nástavec je vyrobený z měkké polyuretanové pěny a je možné jej použít na většinu toaletních prkének/mís.

Nástavec nestudí na dotek a svými vlastnostmi předchází tvorbě otlaků.

Při jakýchkoli poraněních pokožky v sedací oblasti se o používání pomůcky poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Kontraindikace

Neschopnost udržení vzpřímené pozice.
Poruchy koordinace a vnímání.

Bezpečnostní upozornění

Zajistěte, aby nástavec byl nasazen na WC řádně. Při poškození pomůcku přestaňte používat a kontaktujte prodejce. Opravy nikdy neprovádějte sami.

Čištění

K čištění používejte nejlépe mýdlový roztok. Hodnota pH čistícího prostředku musí být minimálně 6, nejlépe mezi 6–8. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující rozpouštědla.

Dezinfekce

Případnou dezinfekci provádějte běžným dezinfekčním prostředkem dle návodu výrobce.

Likvidace

Likvidace se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení.

Uchycení / montáž

Nástavec nasuňte zpředu na toaletní prkénko/mísu maximálně do hrany.

Technické parametry

Hloubka:	43 cm
Šířka:	38 cm
Výška:	3,5 cm
Hmotnost:	1,1 kg
Nosnost:	130 kg
Barva:	modrá

Záruka

Záruční doba tohoto výrobku činí 24 měsíců a vztahuje se na vady materiálu a zpracování.

CE Tento výrobek je ve shodě se směnicí 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

Výrobce:

MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
www.meyra.de

Distributor pro ČR:

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
tel.: 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz

Datum poslední revize: 02/2018