

# PONDUS



REHASENSE

## *Nájezdové rampy pro invalidní vozíky*

Uživatelský manuál (CZ)



CE

# 1 Obecné informace

---

Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku a zároveň Vám chceme poskytnout důležité informace o používání našeho výrobku.

V tomto manuálu najdete veškeré informace týkající se správného a bezpečného používání tohoto zdravotnického prostředku, dále jen „Pondus“.

Před prvním použitím našeho výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento manuál a dodržujte všechna naše doporučení.

Rehasense neustále vyvíjí své výrobky a vyhrazuje si právo měnit specifikace výrobku bez předchozího upozornění.

V případě zájmu a jakýchkoliv dotazů týkajících se našich výrobků kontaktujte naše přidružené zdravotnické obchody nebo přímo společnost Rehasense®. Kontaktní údaje jsou uvedeny na poslední straně manuálu.

## 2 Použití

---

Rampy “Pondus” jsou zdravotnické prostředky pomáhající uživatelům invalidních vozíků. Umožňují uživatelům invalidních vozíků vjíždět na vyšší místa, obrubníky, schody, a také vjíždět a vyjíždět z automobilů. Rampy lze používat v místnostech i venku. Jakékoli jiné použití ramp než pomoc pro invalidní vozíky je zakázáno.

## 3 Bezpečnostní pravidla

---

Před použitím rampy si přečtěte uživatelský manuál. Výrobce nenes odpovědnost za poškození a nehody způsobené nesprávným použitím.



### Bezpečnostní pokyny/použití výrobku

- Používejte pouze rampy v ideálním stavu.
- V případě zjištění jakýchkoli závad okamžitě kontaktujte prodejce.
- Dejte pozor na označení na výrobku.
- Přečtěte si tento uživatelský manuál. Jakákoli poškození výrobku způsobená nesprávným používáním výrobku nebudou výrobcem uznána a nebudou podléhat záručním opravám.
- Nezatěžujte rampy hmotností větší než uvedená na štítku výrobku.
- Dodržujte pokyny týkající se výšky svahů. Nepoužívejte rampy nad doporučenou výškou schodů a nájezdu.
- Používejte rampu pouze k zamýšlenému účelu.
- Neprovádějte žádné konstrukční změny výrobku.
- Při rozkládání a skládání ramp dávejte si pozor, abyste si nepřiskřípli prsty nebo jiné části těla.
- Používejte pouze na stabilním povrchu.



Budte opatrní, když uvidíte tento symbol. Při skládání a rozkládání ramp může dojít k zachycení prstů nebo jiných částí těla. Dávejte pozor na všechny mezery, vzdálenosti ramp a vyhněte se zbytečnému nastavování.

## 4 Dodání

---

Rampy jsou vyrobeny z hliníku odolného proti korozi. Povrch ramp je dodatečně pokrytý protiskluzovým materiálem. Balení ramp obsahuje dva stejné kusy.

### Dodání:

Rampy se dodávají složené v kartonových krabicích. Balení obsahuje:

- 2 rampy
- 1 uživatelský manuál


Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny prvky zobrazené na obrázku níže. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo chybějících prvků kontaktujte prodejce.

## 5 Popis výrobku

---

Níže uvádíme příklad popisu rampy.


### Skládací rampa (1100F2, 1500F2, 2000F2)

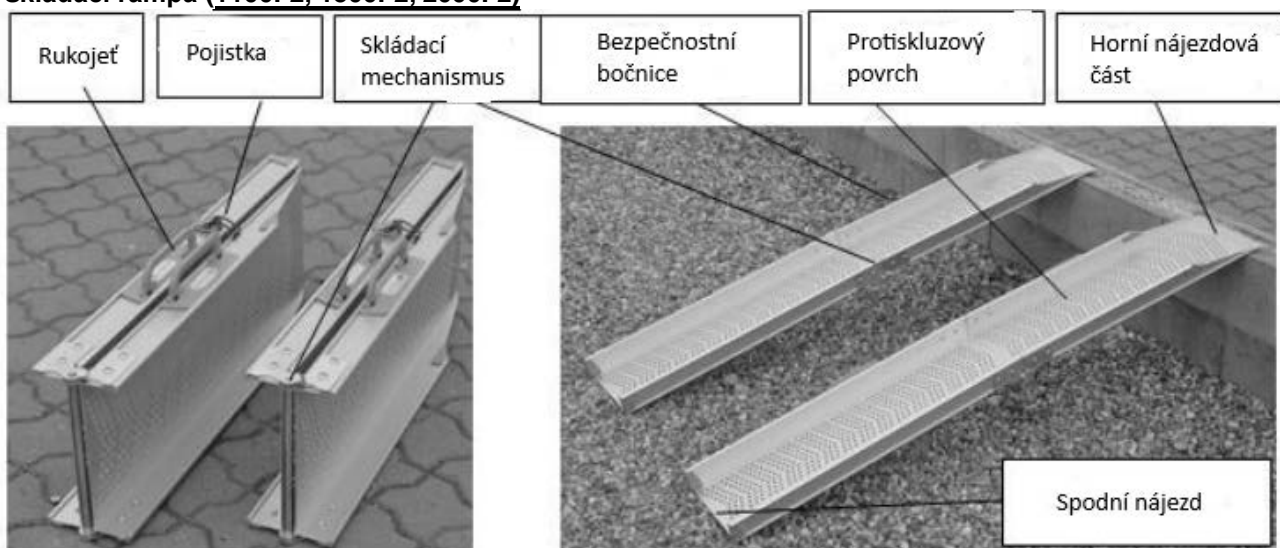

Složená rampa

Rampa připravená k použití


### Výsuvná rampa (1200T2, 2000T2, 2000T3, 2900T3)

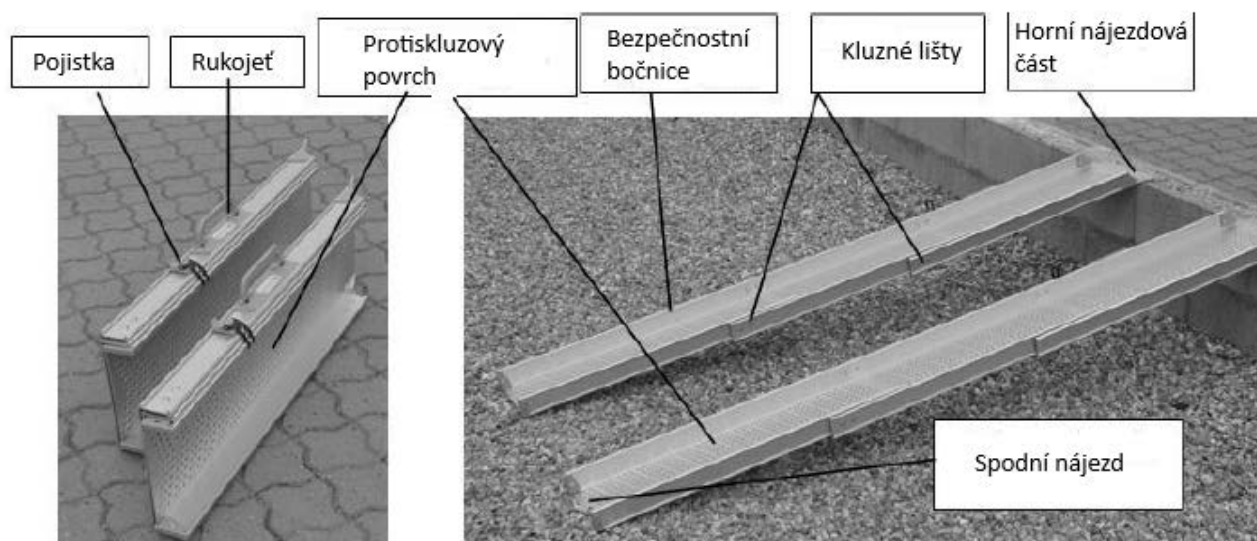

Složená rampa

Rampa připravená k použití

## Výsuvná a skládací rampa (2770FT3)

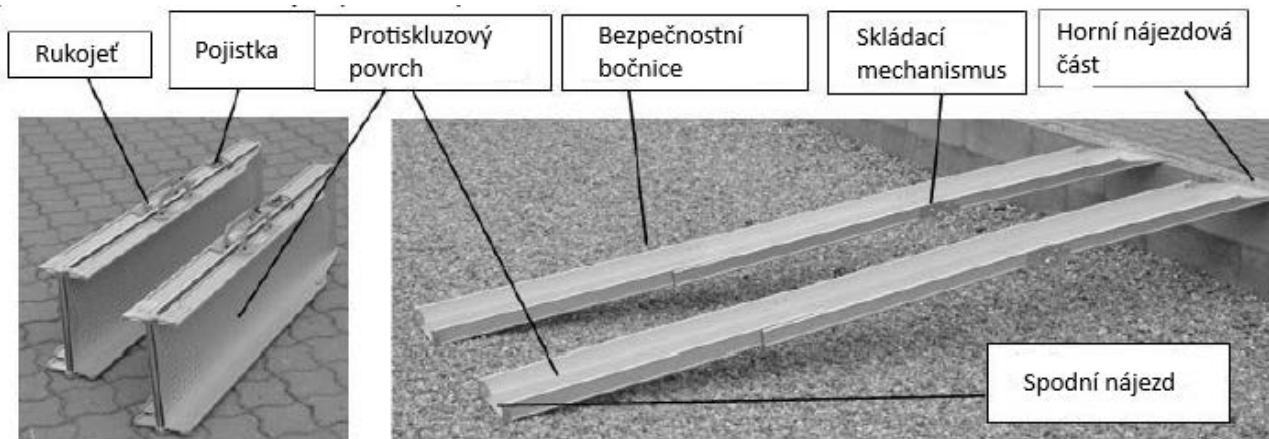

Složená rampa

Rampa připravená k použití

Uchwyt	Rukojeť
Blokada	Pojistka
Mechanizm do składania	Skládací mechanismus
Ścianki zabezpieczające	Bezpečnostní bočnice
Powierzchnia antypoślizgowa	Protiskluzový povrch
Nakładka górna na podest	Horní nájezdová část
Blokada	Pojistka
Rączka	Rukojeť
Powierzchnia antypoślizgowa	Protiskluzový povrch
Ścianki zabezpieczające	Ochranné bočnice
Ślizgi	Kluzné lišty
Górne podparcie	Horní nájezdová část
Dolne podparcie	Spodní nájezdová část
Rączka	Rukojeť
Blokada	Pojistka
Powierzchnia antypoślizgowa	Protiskluzový povrch
Ścianki zabezpieczające	Ochranné bočnice
Mechanizm do składania	Skládací mechanismus
Górne podparcie	horní nájezdová část
Dolne podparcie	Spodní nájezdová část

Při používání ramp dodržujte doporučení výrobce:

- Pro rozložení rampy uvolněte ochranné pojistky umístěné na stranách ramp. Poté rozložte rampu.
- Rampy mají bočnice chránící proti posunutí do stran.
- Horní část rampy by měla být při používání vždy nahoře.
- Spodní část rampy by měla být vždy na povrchu.
- Rampy používejte pouze na tvrdém, stabilním povrchu.
- Kluzné lišty musí být vždy umístěné vzájemně rovnoběžně.
- Před přiblížením k rampě zkontrolujte, zda jsou kluzné lišty umístěny správně a zda je rampa stabilní.
- Pro složení uvolněte ochrannou pojistku a složte/posuňte – v závislosti na modelu kluzné lišty – rampu.

### Obecné informace, jak používat

- Rampy mají dva ochranné bočnice, které chrání proti sklouznutí.
- Rampy mají dva opěrné body:
  - Horní nájezdová část musí být vždy umístěna na vrcholu překážky, kterou je třeba překonat.
  - Spodní nájezdová část musí být vždy umístěna v nejnižším místě před překážkou.
- Rampy musí být umístěny na stabilním povrchu.
- Rampy musí být vždy umístěny rovnoběžně.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou rampy stabilní.



## 6 Přeprava

Rampy lze velmi snadno a rychle složit, což uživatelům usnadňuje přepravu. Během přepravy vždy zajistěte a znehybněte rampy, aby nedošlo k jakýmkoli nehodám.

## 7 Pondus Rampy

### Technické údaje

Č. zboží	Typ rampy	Max. délka (mm)	Šířka pojezdu (mm)	Max. sklon (podle modelu) (mm)	Max. zatížení obou ramp (kg)	Hmotnost obou ramp (kg)
PS000550	550S	550	210	110	400	2,9
PS001170	1200S	1170	210	230	400	5,8
PF201100	1100F2	1100	210	220	400	7,1
PF201500	1500F2	1500	210	300	400	9,2
PF202000	2000F2	2000	210	400	300	11,7
PF201190	1200T2	1190	195	240	350	7,3
PT202030	2000T2	2030	195	400	300	11,3
PT301990	2000T3	1990	180	400	300	12
PT302890	2900T3	2890	180	580	250	16,2
PFT32770	2800FT3	2770	195	600	250	16,6

## 8 Štítek

Technický štítek je umístěn na jedné ze stran výrobku. Níže je zobrazen příklad štítku:

Sumer seryjny



Wyrób medyczny

Nazwa wyrobu

Data produkcji

Numer wyrobu

Max. waga użytkownika

Max. długość

Max. wysokość

Zapoznaj się z instrukcją obsługi

Producent

Numer seryjny	Sériové číslo
Wyrób medyczny	Zdravotnický prostředek
Nazwa wyrobu	Název výrobku
Data produkcji	Datum výroby
Numer wyrobu	Číslo výrobku
Max. waga użytkownika	Max. hmotnost uživatele
Max. długość	Max. délka
Max. wysokość	Max. výška
Zapoznaj się z instrukcją obsługi	Přečtěte si uživatelský manuál
Producent	Výrobce

## 9 Čištění

---

- Udržujte rampy v čistotě a pravidelně je čistěte.
- Lehké nečistoty a prach otřete vlhkým hadříkem.
- Větší nečistoty odstraňte neinvazivními chemickými prostředky, které nezpůsobují korozi.
- Nepoužívejte silné čisticí prostředky nebo bělidla.
- Otřete do sucha měkkým hadříkem.

## 10 Údržba

---

Rampy jsou v podstatě bezúdržbové. Vždy před použitím se však doporučuje zkontrolovat, zda povrch ramp je čistý. V případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí kontaktujte prodejce. Doporučuje se, aby byl výrobek pravidelně kontrolován odborníky.

- Zkontrolujte všechny ochranné prvky a upevnění ramp.
- Neprodleně vyměňte všechny poškozené, uvolněné díly.

## 11 Likvidace

---

Opatřené rampy předejte k likvidaci. Nevyhazujte rampy s komunálním odpadem.

## 12 Záruka

---

Výrobce poskytuje záruku 2 roky na výrobek. Záruka se vztahuje na vady způsobené vinou výrobce. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku nebo na vady vzniklé použitím výrobku jiným způsobem, než je popsáno v manuálu.



**REHASENSE**

**V případě jakýchkoli dotazů nebo pochybností týkajících se výrobku kontaktujte společnost Rehasense nebo distributora.**

### Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4

### Výrobce:

**Rehasense Sp. z o.o.**  
Sulejowska 45G  
97-300 Piotrków Trybunalski

[www.rehasense.com](http://www.rehasense.com)  
[info@rehasense.com](mailto:info@rehasense.com)