

madita maxi.

Osvědčená a pevná terapeutická židle



Návod k použití

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

chtěli bychom Vám poděkovat za důvěru a za to, že jste si vybrali náš výrobek. Před prvním použitím produktu Madita si pozorně přečtěte tento návod k použití a řiďte se jím. Přihlédněte, prosím, k tomu, že vyobrazení v tomto návodu se mohou mírně lišit od Vámi zakoupeného produktu (např. barvou). Technické změny vyhrazeny.

Důležitá informace!

Zajistěte, aby návod k obsluze zůstal u produktu.

VÝROBCE

Schuchmann GmbH & Co. KG

Dütestraße 3

49205 Hasbergen

tel +49 (0)5405/909-0

www.schuchmann.de

DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4 - Spořilov

tel.: +420 272 761 102

www.meyra.cz

Obsah

1. Příprava terapeutické židle pro použití	1
1.1 Doprava	1
1.2 Bezpečnostní opatření před použitím	1
1.3 Bezpečnost likvidace	1
1.3.1 Obal	1
1.3.2 Produkt	1
1.4 Kde skladovat návod k použití	1
2. Popis produktu	2
2.1 Informace o materiálu	2
2.2 Zacházení / Transport	2
2.3 Oblasti použití, použití dle určeného účelu	2
2.4 Použití odporující určenému účelu / varovná upozornění	3
2.5 Výbava základního modelu	3
2.6 Seznam příslušenství	4
2.7 Přehled produktu	4
3. Nastavení	5
3.1 Kolečka	5
3.2 Úhel sedu	5
3.3 Výška sedu	6
3.4 Sklon zádové opěrky	6
3.5 Hloubka sedu	7
3.6 Výška zádové opěrky	7
3.7 Područky	7
4. Příslušenství	8
4.1 Nastavení opěrky hlavy	8
4.2 Nastavení hrudních pelot	8
4.3 Nastavení kyčelních pelot	8

4.4 Parkovací brzda.....	8
4.5 Podnožka	9
4.6 Výsuvná stupačka.....	9
4.7 Dřevěný terapeutický stolek	9
4.8 Abdukční klín	9
4.9 Prodloužení těžiště	10
5. Opravy a čištění.....	10
5.1 Čištění	10
5.2 Opravy.....	10
5.3 Náhradní díly	10
5.4 Doba použití a opětovné použití	10
6. Technické údaje.....	11
7. Záruka	11
8. Identifikace.....	12
8.1 Sériové číslo / Datum výroby.....	12
8.2 Verze produktu	12
8.3 Vydání manuálu.....	12
8.4 Poznámky k záruce	12

1. Příprava terapeutické židle pro použití

1.1 Doprava

Při obdržení výrobek zkontrolujte, zda je kompletní, nemá vady a dejte pozor na případné škody způsobené dopravou.

Zkontrolujte zboží v přítomnosti doručitele

Pokud by se vyskytly škody způsobené dopravou, požádejte o záznam stavu (zjištění závad) v přítomnosti doručitele. Písemnou reklamaci zašlete do Meyra ČR.

1.2 Bezpečnostní opatření před použitím

Správné používání terapeutické židle vyžaduje přesné a pečlivé poučení doprovodné osoby. Prosíme Vás, abyste si před prvním použitím výrobku pozorně přečetli tento návod k obsluze a řídili se jím.

Polstrované části, především područky, mohou být horké při jejich vystavení přímému slunečnímu záření. Dané části přikryjte nebo jinak chraňte produkt před přímým slunečním zářením.

1.3 Bezpečnost likvidace

V zájmu zachování ochrany životního prostředí, aby se předešlo znečištění životního prostředí, a také zlepšení recyklace surovin, prosím, berte na vědomí pokyny k likvidaci v bodech 1.3.1 a 1.3.2.

1.3.1 Obal

Obal produktu je třeba uchovat pro potřeby opětovného transportu. V případě potřeby opravy produktu nebo v případě reklamace v záruční době použijte prosím, pokud je to možné, právě originální obal, který je pro přepravu optimální.

Třídte obalový materiál za účelem recyklace dle jejich klasifikace. Nenechávejte obalový materiál bez dozoru, může být zdrojem nebezpečí.

1.3.2 Produkt

Třídte materiál, ze kterého je produkt vyroben, za účelem recyklace dle jejich klasifikace (viz informace o materiálu v bodě 2.1).

1.4 Kde skladovat návod k použití

Návod k použití, prosím, pečlivě uchovejte u produktu pro možnost opětovného přečtení.

2. Popis produktu

2.1 Informace o materiálu

Základní rám a jednotlivé prvky jsou vyrobené z nerez. oceli a hliníku a práškově lakované. Potahy jsou ze 100% polyesteru a jsou ohnivzdorné (dle DIN EN 1021-1+2).

2.2 Zacházení / Transport

Terapeutická židle není určena k nošení, je vybavena kolečky. Pokud bude nutné produkt přenést z důvodu překážky, ujistěte se, že všechny pohyblivé části jsou utažené. Postavte se vedle židle, uchopte ji na obou stranách v přední a zadní části sedu a přeneste ji na požadované místo.

Před transportem židle nastavte všechny části do nejvíce kompaktní pozice (složte stupačku, nastavte nejnižší výšku sedu atd.).



Před přenášením utáhněte všechny pohyblivé části!



Terapeutická židle nesmí být zvedána, pokud na židli někdo sedí!

2.3 Oblasti použití, použití dle určeného účelu

Terapeutická židle MADITA je koncipována pro děti a mladistvé, kteří nemohou volně stát nebo sedět, přičemž jejich omezené držení trupu nevyžaduje nepřetržité sezení v sedací skořepině.

2.4 Použití odporující určenému účelu / varovná upozornění:



POZOR!

- Dbejte na to, aby terapeutickou židli používalo pouze jedno dítě/jeden mladistvý.
- Terapeutickou židli používejte pouze na rovném a pevném povrchu.
- Nepoužívejte terapeutickou židli k přepravě osob.
- Pro zajištění bezpečného zvedání terapeutické židle při přepravě se postavte vedle židle a uchopte ji na obou stranách v přední a zadní části sedu. Pohyblivé části, např. nastavování hloubky sedu, musí být při přenášení pevně utažené.
- Nikdy nenechávejte dítě v terapeutické židli sedět bez dozoru.
- Správné používání terapeutické židle vyžaduje přesné a pečlivé zaučení doprovodné osoby.
- Maximální nosnost (viz bod 6) nesmí být překročena.
- Nepoužívejte terapeutickou židli s vadnými, opotřebenými nebo chybějícími díly.
- Z důvodů protipožární ochrany nesmí terapeutická židle stát v blízkosti otevřeného ohně nebo jiného silného zdroje tepla, jako je elektrický nebo plynový ohříváč.
- Používejte příslušenství a náhradní díly firmy Schuchmann, použitím jiných dílů ohrožujete bezpečnost dítěte v terapeutické židli.
- Terapeutickou židli používejte pouze tehdy, když jsou všechny konstrukční díly správně připevněné a nastavené. Před usazením dítěte na židli věnujte zvláštní pozornost řádnému upevnění sedáku a stupačky.
- Během nastavování terapeutické židle existuje riziko zachycení nebo skřípnutí končetin.
- Pečující osoby, které mají potíže se čtením, musí mít k dispozici jinou osobu, která návod k použití přečte nahlas, aby pečující osoba plně pochopila, jak židli používat.

2.5 Výbava základního modelu

- Základní model terapeutické židle MADITA je vybaven područkami, stupačkou, madlem pro tlačení a standardním sedákem s potahem.
- Výška sedu je nastavitelná pomocí kličky, úhel sedu je nastavitelný pomocí dvou plynových pístů á 200 N, obsluha přes nožní pedál.
- 4 dvojitá kolečka (100 mm), z toho 2 jsou vybaveny brzdou
- Barva rámu: antracitově šedá metalíza

2.6 Seznam příslušenství

- standardní opěrka hlavy – polstrovaná, výškově nastavitelná
- hluboká opěrka hlavy s bočním vedením – polstrovaná, výškově a úhlově nastavitelná
- mělká opěrka hlavy (typ mušle) – polstrovaná, výškově a úhlově nastavitelná
- odnímatelná záda
- hrudní peloty
- kyčelní peloty
- abdukční klín
- centrální brzda
- dřevěný terapeutický stolek
- inkontinentní potah sedu
- výsuvná dřevěná stupačka
- fixační pomůcky (kurty)

2.7 Přehled produktu

Obrázek níže ukazuje nejdůležitější konstrukční části spolu s pojmy, které naleznete v tomto návodu k obsluze.



3. Nastavení

Nastavení a úpravy výrobku či příslušenství mohou být provedeny pouze lidmi, kteří obdrželi potřebné instrukce od odborného prodejce.


Ujistěte se, že žádná z končetin uživatele, není v oblasti provádění úpravy jakéhokoliv druhu, aby se minimalizovalo nebezpečí zranění.

3.1 Kolečka

Terapeutická židle by měla být vždy zajištěna proti nechtěnému posunutí zabrzděním obou zadních koleček. Pro zabrzdění sešlápněte špičkou nohy páčku brzdy (A) na obou zadních kolečkách (B). Pro odjištění brzdy zvedněte páčku brzdy špičkou nohy nahoru (C).



Brzdy slouží pouze k zajištění židle proti nechtěnému posunutí na rovných plochách!

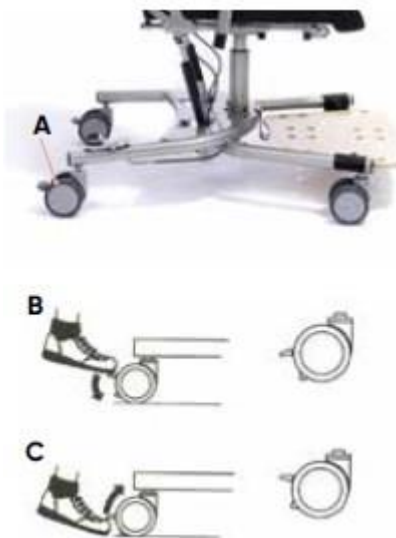

3.2 Úhel sedu

Úhel sedu lze nastavit pomocí dvou plynových pístů. Pro nastavení úhlu sedu sešlápněte nožní pedál (D). Lehkým tlakem napolohujte sedák do aktivní nebo pasivní polohy. Nožní pedál (D) může být zajištěn proti nechtěnému použití kolíkem na tažném lanku (naleznete ho na vnitřní straně nožního pedálu). Pro zajištění zatáhněte za kolík, až zapadne do zámku. Zapadnutí podpoříte lehkým tlakem na nožní pedál. Aretaci zrušíte vytažením a pootočením kolíku o čtvrt otáčky.




3.3 Výška sedu

Výšku sedu Madity Maxi lze nastavit až o 12 cm. Standardně je dodána v nejnižší poloze. Pro změnu výšky sedu otočte klíčkou (A) vespod sedačky.

Po změně výšky sedu musí být seřizeny plynové písty. Toto provedete demontáží šroubů na spodním konci obou plynových pístů v rámci otvorů (B).



Toto nastavení by mělo být provedeno pouze odborníkem!

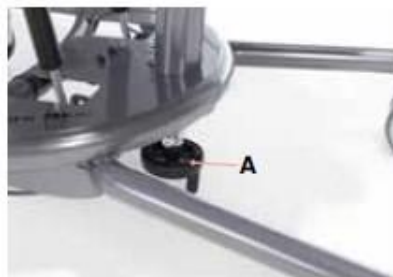


3.4 Sklon zádové opěrky

Úhel zádové opěrky lze nastavit použitím upínací páčky (C) na pravé straně sedáku.



Prosím pevně zajistěte páčku po každém nastavení.

Úhel zádové opěrky lze nastavit i pro silné zatížení. Toto provedete umístěním šroubů (D) do požadované polohy na obou stranách sedáku.

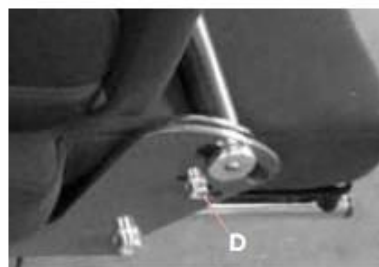

3.5 Hloubka sedu

Hloubku sedu lze nastavit uvolněním dvou šroubů (A) na obou stranách židle.



Po každém nastavení šrouby opět dobře utáhněte!




3.6 Výška zádové opěrky

Pro změnu výšky zádové opěrky uvolněte oba šrouby (B) na zadní straně zádové opěrky.



Po každém nastavení šrouby opět dobře utáhněte!

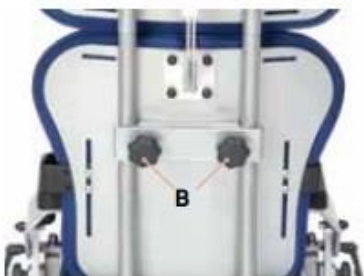


3.7 Područky

Područky jsou úhlově, výškově a šířkově nastavitelné.

Pro nastavení úhlu područky uvolněte upínací páčku (C) na straně područky. Nastavte područku do požadované polohy a páčku opět utáhněte. Pro nastavení výšky područky uvolněte šroub (D) na spodní straně područky. Nastavte područku do požadované výšky a šroub opět utáhněte. Pro nastavení područky do šířky uvolněte šroub pod sedákem (E). Nastavte područku do požadované šířky a šroub opět utáhněte.



Po každém nastavení šrouby opět dobře utáhněte!

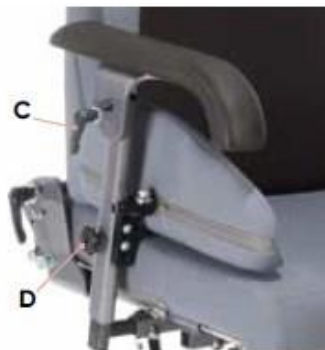

4. Příslušenství

4.1 Nastavení opěrky hlavy

Opěrku hlavy lze nastavit do výšky. Abyste opěrku hlavy mohli nastavit, uvolněte všechny čtyři matky (A) na zadní straně a nastavte opěrku hlavy do požadované výšky.



Po každém nastavení šrouby opět dobře utáhněte!



4.2 Nastavení hrudních pelot

Hrudní peloty lze nastavit do výšky a do šířky. Pro nastavení uvolněte šrouby (B) na zadní straně zádové opěrky a nastavte hrudní peloty do požadované výšky a šířky.



Po každém nastavení šrouby opět dobře utáhněte!



4.3 Nastavení kyčelních pelot

Úhel a šířku (šířku sedu) kyčelních pelot lze nastavit uvolněním šroubů (C) a umístěním kyčelních pelot do požadované polohy. Výšku kyčelních pelot nastavíte oběma šrouby (D). Navíc k výškovému nastavení kyčelních pelot lze kyčelní peloty umístit do různé výšky na područkách (E).



Po každém nastavení šrouby opět dobře utáhněte!



4.4 Parkovací brzda

Parkovací brzdou může obsluhovat i sám uživatel. Pokud uživatel stlačí páčku, která je umístěna na sedacím systému, směrem dolů, je brzda uvolněna. Pokud je páčka směrem nahoru, brzda je aktivní.

4.5 Podnožka


Nastavování úhlu kolenního kloubu připojení se západkou, které umožňuje nastavení po malých krocích. Pro nastavení musí být uvolněny šrouby na obou stranách (A). Poté je třeba uvolnit šrouby (B) na zadní straně podnožky pro nastavení výšky.



Po každém nastavení šrouby opět dobře utáhněte!

4.6 Výsuvná stupačka

Výsuvná stupačka je lehce namontovatelná a zajišťuje pohodlné sezení. Jednoduše zatáhněte za zajišťovací čepy (C), abyste stupačku vysunuli. Při nasazování stupačky nejdříve nasadte zadní závěs (D) na rám a poté se ujistěte, že čepy (C) správně zapadly a stupačka je tak zajištěna.

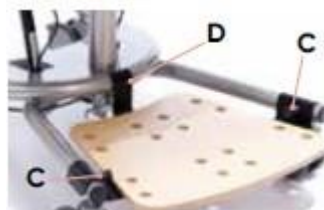

4.7 Dřevěný terapeutický stolek

Nasuňte terapeutický stolek na levé straně do úchyty (E) vedle područky a utáhněte křídlovou matku (F). Výšku terapeutického stolku lze nastavit přizpůsobením područek (viz bod 3.7). Pro odklopení terapeutického stolku na stranu, například při usazování nebo sesedání uživatele do/z terapeutické židle, uvolněte křídlovou matku (F), pootočte stolek směrem nahoru a do strany židle.



4.8 Abdukční klín

Pro nastavení abdukčního klínu do výšky uvolněte křídlovou matku (G). Pro nastavení hloubky umístění abdukčního klínu uvolněte křídlovou matku (H) pod sedákem.



Po každém nastavení šrouby opět dobře utáhněte!

4.9 Prodloužení těžiště

Prodloužení těžiště slouží pouze k větší stabilitě židle zejména při použití větších sedacích skořepin a tím extrémně velkém úhlu sklonu sedačky.



Prodloužení těžiště není nastavitelné!

5. Opravy a čištění

5.1 Čištění

Všechny části rámu čistěte houbou nebo vlhkým hadříkem. Potahy jsou odnímatelné a mohou být vyprány v pračce na 40°C. Potahy nesaňte v sušičce a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a podobné produkty.

Dbejte na základní hygienu.

5.2 Opravy

Denně provádějte vizuální kontrolu a pravidelně u židle kontrolujte případné praskliny, zlomy, chybějící části a jiné závady. V případě jakýchkoli defektů či funkční poruchy, kontaktujte společnost Meyra ČR.

5.3 Náhradní díly


Pokud si přejete mít k dispozici náhradní díly, kontaktujte společnost Meyra ČR s uvedením sériového čísla terapeutické židle.

Náhradní díly a příslušenství mohou být na židli nainstalovány pouze zkušenými a vyškolenými pracovníky.

5.4 Doba použití a opětovné použití

Předpokládaná doba používání židle MADITA se odvíjí od intenzity používání a počtu opětovného použití. Celkem užitečná doba činí "8" roků v případě zacházení v souladu s informacemi v tomto návodu k použití. Produkt může být používán déle než je uvedené časové období, pokud je v bezvadném stavu. Předpokládaná doba používání se nevztahuje na spotřební součásti, jako jsou například potahy, kola a baterie. Údržba a posouzení stavu v případě úvahy o opětovném použití, musí být rozhodnuta odborným prodejcem. Terapeutická židle MADITA je vhodná pro opětovné použití. Před předáním židle novému uživateli, dbejte pokynů pro čištění a údržbu v kapitole 5. Průvodní doklady, jako je návod k použití, jsou součástí výrobku a musí být předány novému uživateli. Demontáž není před opětovným použitím zapotřebí. V případě skladování doporučujeme složit produkt na nejmenší rozměry, aby se ušetřilo místo.

6. Technické údaje

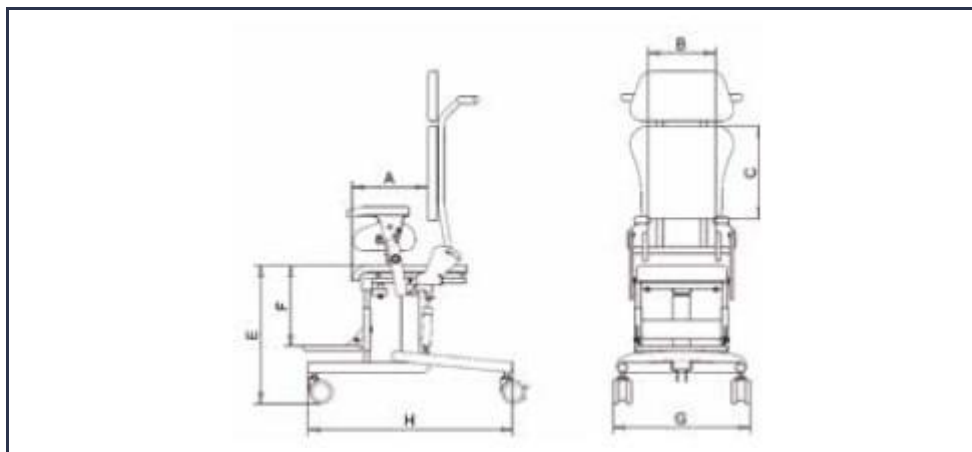

Rozměry - základní model MADITA MAXI

A	Hloubka sedu	36 - 47 cm
B	Šířka sedu	34 - 44 cm
C*	Výška zad s krátkou opěrou	40 cm
C*	Výška zad s dlouhou opěrou	48 cm
C**	Výška zad s krátkou zesílenou opěrou	48 cm
C**	Výška zad s dlouhou zesílenou opěrou	56 cm
E	Výška sedu	48 - 60 cm
F	Délka lýtkové části nohy	18 - 45 cm
G	Celková šířka	64 cm
H	Délka základny	80 cm
	Úhel sedu	(-)5° - 30°
	Úhel zad	(-)5° - 25°
	Max. nosnost	120 kg
	Hmotnost	26 kg

* Tloušťka použitého hliníkového plechu 3 mm

** Tloušťka použitého hliníkového plechu 4 mm

7. Záruka

U všech výrobků platí dvouletá zákonná záruční lhůta. Ta začíná dodávkou, resp. předáním zboží. Jestliže se v průběhu tohoto období na dodaném zboží vyskytne vada materiálu, bude produkt bezplatně dodán výrobcí k přezkoumání. Následně dojde dle uvážení k opravě nebo výměně produktu za nový.

8. Identifikace

8.1 Sériové číslo / Datum výroby

Sériové číslo, datum výroby a jiné informace jsou k nalezení na typovém štítku, který je umístěn na všech produktech (A).



8.2 Verze produktu

Terapeutická židle MADITA je k dostání ve třech velikostech a lze ji doplňovat o nejrůznější příslušenství (viz bod 4).

8.3 Vydání manuálu

Návod k použití MADITA – stav změny E; vydání 09.2018

8.4 Poznámky k záruce

Poznámky k záruce – kontaktní osoba dodavatele, datum předání produktu: