

Akupresurní podložka Qmed

Akupresurní a masážní pomůcka.

Používání akupresurní podložky může zlepšit vitalitu, stimulovat uvolňování endorfinů, odbourávat stres. Může uvolnit bolest, zlepšit spánek a posílit celkovou obranyschopnost.

Materiál:

100 % čistá bavlna, netoxické ABS plasty, ekologický bio molitan

Pokyny pro vyjmutí podložky z obalu:

1. Otevřete fólii, ve které je podložka uložena.
2. Vyjměte komprimovanou podložku z fólie.
3. Umístěte podložku na rovnou plochu po dobu asi 24 hodin, aby nabyla správné velikosti a tvaru.
4. Vložte podložku do povlaku – takto je připravena k použití.

Doporučení:

Před použitím pomůcky doporučujeme seznámit se s principy akupresury. V případě jakýchkoli pochybností doporučujeme poradit se o používání s lékařem.

Upozornění!

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Údržba:

Rozpusťte ve vlažné vodě malé množství čistícího prostředku a podložku opatrně vyčistěte v rukách. Po několikerém propláchnutí nechejte podložku okapat při pokojové teplotě. Podložku neperte v pračce ani nesušte v sušičce.

Výrobce:

mdh sp.z o.o.

Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Polsko

www.qmedplus.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz

