

Gymnastický míč PEANUT Qmed

Nafukovací gymnastický míč z kvalitního materiálu. Pumpička je součástí balení.

Míč je vhodný pro všechny druhy tradiční léčby, jako je fyzioterapie, ergoterapie, cvičení zádových svalů, prenatalní cvičení, standardní rehabilitace, cvičení psychomotoriky a pro zlepšení držení těla.

Před prvním použitím míč nafoukněte nejdříve na cca 85 % jeho finálního průměru. Dofouknutí na finální průměr proveďte až za několik málo hodin.

Kontraindikace:

- bolest během cvičení,
- stavy po zranění kostí (dislokace, zlomenina),
- nesrostlé/nezahojené zlomeniny kostí,
- zánět kloubů a tkání v okolí kloubů,
- otoky,
- čerstvé jizvy po operacích a jiné rány.

Materiál: PVC

Nosnost: až 250 kg

Upozornění:

Vhodnost používání míče konzultujte se svým fyzioterapeutem. Bezpečnostní provedení zajišťuje pomalé ucházení v případě propíchnutí. Míč je určen výhradně k použití v interiéru na rovné a pevné podlaze. Míč nepřefukujte na větší průměr, než na jaký je určen. Držte míč dále od ostrých předmětů a zdrojů tepla.

Použití:

Vyjměte míč z obalu. Rozložte míč na podlahu tak, aby se narovnal všechny přehyby. Před nafouknutím nechte míč chvíli položený v pokojové teplotě. Pro nafouknutí nejprve vyjměte špunt (ucpávku), přiložte hubici pumpičky a míč nafoukněte do požadovaných rozměrů. Následně vytáhněte hubici pumpičky a míč opět zajistěte špuntem.

Údržba:

Míč v případě znečištění omyjte mýdlovou vodou a následně jej osušte hadříkem do sucha.

Výrobce:

mdh sp.z o.o.

Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź, Polsko
<http://www.mdh.pl>

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
tel.: +420 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz

