

## Masážní míček LACROSSE Qmed

Masážní míček LACROSSE poskytuje účinnou masáž hlubokých svalových skupin a lze jej použít na prakticky jakoukoli část těla. Efektivně uvolňuje hýžděové svaly, fascie chodidel a dvojhlavé lýtkové svaly. S řádně zvolenými cviky je možné léčit různé zdroje bolesti.

### Kontraindikace:

- produkt nepoužívejte na otevřené rány nebo na modřinách
- produkt nepoužívejte k masáži na kloubech a/nebo kostech
- přerušete používání, pokud je nepříjemné nebo způsobuje bolesti, závratě, slabý krevní oběh nebo jiné fyziologické abnormality; poraďte se o dalším použití s lékařem

### Specifikace:

Materiál: 100% silikon  
Barva: oranžová, černá  
Průměr: 6 cm  
Označení: DRQM3W0KBXXXP - oranžový  
DRQM3W0LAXXXP - černý

### Výrobce:

**mdh sp.z o.o.**

Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Polsko

[www.qmedplus.pl](http://www.qmedplus.pl)

### Distributor:

**MEYRA ČR s.r.o.**

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: [meyra@meyra.cz](mailto:meyra@meyra.cz)

[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)



Revize: 10/2020