

HŘEJIVÉ / CHLADIVÉ POLŠTÁŘKY QMED

Horká/studená terapie je skvělá při akutních zánětech, poranění, namožení a podvrtnutí, modřinách a naraženinách. Tepelná terapie je vhodná ke zmírnění chronické bolesti, zlepšení krevního oběhu a dosažení relaxace. Pomáhá i sportovcům. Komprese lze použít mnohokrát.

Indikace:

- Léčba lumbaga
- Ischias
- Chronická poranění
- Revmatická myalgie
- Ztuhlost kloubů
- Menstruační křeče

Kontraindikace:

- Změny kůže v důsledku působení pomůcky.

Použití:

Hřejivá terapie:

1. Vložte polštářek do středně výkonné mikrovlnné trouby (800 W) na 50 sekund.
2. Vyjměte jej a zkontrolujte teplotu.
3. Opakujte operaci vkládání a vyjímání každých 10 sekund, abyste dosáhli optimální teploty.
4. Aplikujte na pokožku bez dalšího ochranného krytu.
5. Nepřekračujte celkem 80 sekund, přehřátí může výrobek roztrhnout.

Chladivá terapie:

1. Vložte polštářek na 2 hodiny do mrazáku.
2. Aplikujte na pokožku bez dalšího ochranného krytu.
3. Po použití vložte gelový polštářek na 1 hodinu do mrazáku, než ho znovu použijete.
4. Když gelový polštářek nepoužíváte, uchovávejte ho v mrazicím sáčku v mrazáku.

Upozornění:

Aplikujte na postiženou oblast ne déle než 20 minut, před opětovnou aplikací počkejte alespoň 20 minut.

Údržba:

Otírejte měkkým vlhkým hadříkem bez použití saponátu.

Složení:

87% voda, 10% glycerin, 2% sodná sůl karboxymethylcelulózy, 1% nylon
Rozměry: 10x15 cm, 13x27 cm, 20x30 cm

POZOR! Před použitím si přečtěte návod!

Basic UDI-DI: 59017804DRQR3BNN

Výrobce:

mdh Sp.z o.o.

Maratońska 104

94-007 Łódź, Polsko

tel. +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl

Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz