

Posilovací guma Qmed

Posilovací guma je určena na cvičení i rehabilitaci. Guma se používají k odporovému tréninku zaměřenému na zlepšení svalové síly konkrétních svalových skupin oslabených v důsledku poúrazové a pooperační imobilizace i v případě neurologických onemocnění. Výrobek se používá při léčbě nestability páteře a kloubů a při cvičení korekce držení těla.

Posilovací guma je dostupná ve třech barvách pro označení stupně odporu.

- Červená – mírný
- Zelená – střední
- Modrá – silný

Indikace:

- doporučení pro cvičení obecného rozvoje s použitím posilovací gumy
- doporučení pro silový a rehabilitační trénink horních a dolních svalů s použitím posilovací gumy

Kontraindikace:

- Nepoužívejte u pacientů s poruchou citlivosti a u osob s kožními změnami, jako jsou vředy, puchýře, odřeniny atd.











Údržba:

Omyjte ve vlažné vodě s mýdlem. Sušte mimo dosah umělých zdrojů tepla. Před opětovným použitím použijte mastek.

Materiál: 100 % latex

Velikost: 15 cm x 45 m a 15 cm x 2,5 m

Základní UDI-DI: 59017804DRQM3BMV

	<u>Výrobce</u>		<u>Chraňte před vlhkostí</u>
	<u>Datum výroby</u>		<u>Chraňte před slunečním zářením</u>
	<u>Číslo šarže</u>		<u>Zdravotnický prostředek</u>
	<u>Varování</u>		<u>Katalogové číslo</u>
	<u>Přečtěte si návod k použití</u>		<u>Splnění požadavků EU Nařízení 2017/745</u>

Výrobce:

mdh sp.z o.o.

ul. Maratońska 104

94-007 Łódź, Polsko

tel. +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl

Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz