

TEJPOVACÍ PÁSKA QMED

Kineziologická páska je tenký, pružný, elastický bavlněný pásek s hypoalergenním akrylovým lepidlem. Tloušťkou a elasticitou je téměř totožná s lidskou kůží, což umožňuje ponechat kineziologickou pásku na místě obvykle několik dní.

Neobsahuje latex, je voděodolná, prodyšná a dokáže se natáhnout až na 140% své původní délky. Terapeutická kineziologická páska se často používá v rehabilitaci, fyzioterapii, ortotice, revmatologii, ortopedii a sportu.

Indikace:

- Protahování
- Podvrtnutí
- Zranění

Kontraindikace:

- Změny kůže v důsledku působení pomůcky.
- Pokud se na kůži objeví podráždění nebo zarudnutí, přestaňte používat. Nepožívejte na otevřené rány.
- Tento výrobek není určen jako úplná náhrada za profesionální lékařské ošetření. Před prvním použitím se poraďte s fyzioterapeutem.

Použití:

- Aplikujte 30 minut před aktivitou
- Vyhněte se roztahování konců pásky
- Odstraňte nečistoty, oleje a pleťové vody z oblasti aplikace
- Po nalepení pásky silně třete, aby se lepidlo na pásce aktivovalo
- Zastříhněte přebytečné části pro lepší přilnavost
- Netrhejte! Jemně odstraňte pásku z pokožky
- Při každé aplikaci odměřte správné množství pásky
- Okraje a rohy mohou být oříznuty, pokud se odlepí/zvednou

Balení: 1 ks

Rozměr: 5 cm x 5 m

Složení: 97% bavlna, 3% spandex

Dostupné ve 4 barvách.

Basic UDI-DI: 59017804DRQR5CNW

Výrobce:

mdh sp. z o.o.

ul. Maratońska 104

94-007 Łódź, Polsko

tel. +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz

