


## Pomůcka pro osobní hygienu Etac TORCEL

Praktický pomocník pro osobní hygienu na WC pro osoby se sníženou pohyblivostí.


### Přednosti:

- Vyrobeno z lehkého materiálu pro snadné použití.
- Do kleští může být umístěn toaletní papír, žínka či menší ručník.
- Pomůcku lze dezinfikovat chemicky nebo tepelně.

### Použití:

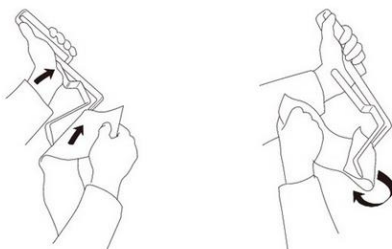

1. Rozevřete kleště stlačením rukojeti a navlékněte papír/žínku mezi kleště.
2. Papír volně narolujte kolem kleští tak, aby byla pokryta i špička.

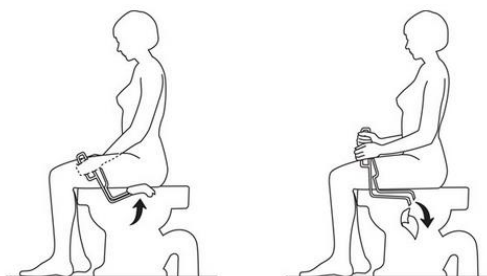

3. Přiložte papír/žínku k intimním partiím mezi nohami a proveďte očištění/umytí.
4. V případě použití toaletního papíru rozevřete kleště a setřeste papír do záchodu.

**Délka:** 33 cm

**Hmotnost:** 100 g

**Materiál:** Polyamidový plast

**Údržba:** Vyčistěte produkt s čisticím prostředkem bez obsahu rozpouštědel (pH 5-9) nebo se 70% dezinfekčním roztokem. V případě dezinfekce teplem dodržujte maximální teplotu 85°C.

### VÝROBCE

Etac Supply Center AB  
Langgatan 12  
334 24 Anderstorp  
Sweden  
[www.etac.com](http://www.etac.com)

### DISTRIBUTOR

**MEYRA ČR s. r. o.**  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
tel.: +420 272 761 102  
e-mail: [meyra@meyra.cz](mailto:meyra@meyra.cz)  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)

