

## Návod k použití

# Antidekubitní sedáky a sedací systémy Varilite



## POPIS SEDÁKŮ VARILITE

Jedná se o antidekubitní sedáky (**Reflex, Zoid PSV, Evolution PSV a Meridian**) a anatomicky tvarované sedací systémy s antidekubitním polstrováním (**Meridian wave a Proform NX**). Pro všechny výrobky je společné, že jsou tvořeny systémem vzduch-pěna. Pěnové jádro sedáku poskytuje oporu sedu a zároveň zajišťuje, že se sedák po odlehčení nafoukne. Vzduchové komory pak umožňují rovnoměrnou distribuci zatížení sedacích partií. Sedáky mají velmi nízkou hmotnost, což je předurčuje k použití na aktivní vozíky. Nosnost všech sedáků je 280 kg.

## BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ

Před použitím sedáků Varilite si přečtěte následující instrukce a při používání dbejte bezpečnostních pokynů, aby nemohlo dojít ke zranění.

- Pravidelně kontrolujte stav nafouknutí sedáku, zejména při změně nadmořské výšky může dojít ke změně tlaku uvnitř sedáku.
- Buďte opatrní při manipulaci s ostrými předměty, aby nedošlo k propíchnutí sedáku.
- Případné opravy musí provádět autorizovaný servis.
- Nikdy nepoužívejte sedák bez potahu – je vyroben z bezpečnostního materiálu zamezujícího vzplanutí.


## NAFOUKNUTÍ SEDÁKU - NASTAVENÍ TLAKU

**Automatický ventil:** Některé sedáky mají automatický ventil, který po zatížení odpustí část vzduchu. U sedačky nikdy nedojte k úplnému vypuštění. Ventil reguluje tlak v závislosti na hmotnosti uživatele, tak aby poskytoval optimální komfort a oporu. Po odlehčení se sedák automaticky sám nafoukne. Sedáky s tímto ventilem jsou bezúdržbové, není potřeba jakékoli manipulace s ventilem.

### Ventil umožňující přednastavení tlaku:


Některé sedáky jsou vybaveny ventilem umožňujícím přednastavení tlaku dle přání uživatele, jsou označeny **PSV** (Pressure Setting Valve). Tento ventil je vybaven ukazatelem nastavení tlaku (1-2-3).

Doporučujeme používat nastavení 2, dokud nezjistíte, že Vám vyhovuje jiné nastavení. Před nafukováním sedáku jej odlehčete – neseďte na něm. Otevřete nafukovací ventil (proti směru hodinových ručiček). Nechte sedák samonafouknout. Když je zcela nafouknutý, zavřete nafukovací ventil (po směru hodinových ručiček).

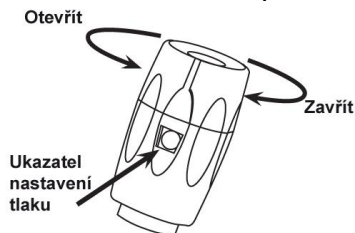

Poté umístíte sedák na vozík a usadíte na něj uživatele v patřičné pozici. Otevřete ventil a nechte unikat vzduch. Vzduch bude unikat cca 10 – 15 vteřin, dokud se ventil sám nezavře dle přednastavené hodnoty (1-2-3). Poté zavřete ventil, abyste zabránili dalšímu úniku vzduchu způsobenému například změnou zatížení pohybem uživatele na sedáku.

**Standardní ventil:** Některé sedáky mají standardní ventil, pomocí kterého si uživatel sám nastaví tlak sedáku, který mu vyhovuje. Před nafukováním sedáku jej odlehčete – neseďte na něm. Otevřete nafukovací ventil (proti směru hodinových ručiček). Nechte sedák samonafouknout. Když je zcela nafouknutý, zavřete nafukovací ventil (po směru hodinových ručiček).

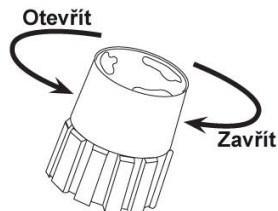


Poté umístíte sedák na vozík a usadíte na něj uživatele v patřičné pozici. Otevřete ventil a nechte unikat vzduch. V principu potřebujete poklesnout o cca 2,5 – 5 cm. Zavřete ventil v okamžiku, kdy je opora poskytovaná sedákem pro uživatele vyhovující. Adekvátní je taková poloha, kdy zůstane pod nejmíce zatíženou částí sedací partie cca 2,5 – 1,3 cm sedáku. V ostatních místech je výše sedáku větší.

## ZÁKLADNA „DROP BASE“

Může se stát, že výška sedáku Varilite je pro uživatele příliš vysoká a její umístění na vozík by nebylo možné. V tom případě lze pro instalaci sedáků použít základnu „DROP BASE“ umožňující snížení původní výše sedačky vozíku od země.

Na tuto základnu pak lze instalovat sedáky Varilite a zachovat tak stejnou výšku sedu jako před použitím sedáku. Instalaci základny „DROP BASE“ a její nastavení musí provést odborná firma distributora.

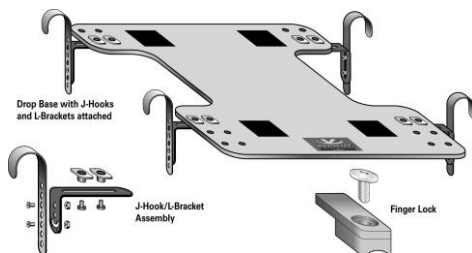

## ÚDRŽBA SEDACÍCH SYSTÉMŮ VARILITE

**1X TÝDNĚ** nechte nafukovací ventil otevřený přes noc, tak aby se mohl samonafukovací polštář zcela nafouknout v nezatíženém stavu.

Základové desky sedacích systémů lze čistit mýdlovými čistícími prostředky a teplou vodou. Neponořujte zcela do vody. Samonafukovací polštář lze otírat vlhkým hadříkem. Nikdy neponořujte. Potah polštáře lze

sejmout a prát (max 60°), sušit na vzduchu. Při čištění používejte obvyklé čisticí prostředky (saponáty) v návodu stanovené koncentraci. Sedáky neskladujte při extrémně vysokých teplotách a nevystavujte je přímému slunci. Buďte opatrní při manipulaci s ostrými a těžkými předměty, neskladujte je na sedáku.

## **ZÁRUKA A OPRAVY**

Na sedáky a sedací systémy je poskytována odpovědnost za vady a jakost v rozsahu všeobecných obchodních podmínek v délce trvání 2 roky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a vady vzniklé nesprávným používáním. Se záručními, ale i s pozáručními opravami se vždy obraťte, z důvodu zachování záruky, pouze na naše odborné pracoviště na níže uvedené adrese.

## **VÝROBCE**

Varilite, A division of Cascade Designs, Inc.  
4000 1st Avenue S  
Seattle, WA 98134  
<http://varilite.com>

## **DISTRIBUCE A SERVIS**

MEYRA ČR s.r.o.  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4 – Spořilov  
Tel.: +420 272 761 102  
E-Mail: [meyra@meyra.cz](mailto:meyra@meyra.cz)  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)

Dodavatel ujišťuje spotřebitele, že na tento výrobek bylo vystaveno prohlášení o shodě.

Návod ze dne 25.11.2014, verze 11.014, revize 10.2017