

Návod k použití:

Ride[®] Forward[™] Cushion



Ride Designs[®] pobočka společnosti Aspen Seating, LLC

8100 SouthPark Way
Littleton, Colorado 80120 USA

bezplatně (pouze USA): 866.781.1633
tel.: 303.781.1633
www.ridedesigns.com

Dodavatel: Tento návod musí být předán konečnému uživateli tohoto produktu, protože obsahuje důležité informace pro správné používání tohoto produktu.

Uživatel: Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte celý tento návod a uschovejte ji pro budoucí použití.

Zamýšlené použití a pokyny k instalaci

Zamýšlené použití

Ride Designs[®]Forward[™]Cushion je nastavitelný sedák pro invalidní vozík, který byl pečlivě vyvinut pro uspokojení potřeb pokožky a držení těla, a byl navržen tak, aby jej bylo možné namontovat na více stylů a velikostí invalidních vozíků a pomohl tak při podpoře a umístění uživatelů na invalidním vozíku.

Nosnost

Maximální hmotnost uživatele je 136 kg.

Obecná bezpečnostní opatření

Bezpečné použití tohoto produktu závisí na vašem dobrém úsudku a zdravém rozumu, jakož i na tom, jak vás poskytovatel, pečovatelský pracovník a/nebo zdravotník a vy samotní budete dodržovat varování, upozornění, poznámky a pokyny v tomto návodu.

POZNÁMKA: Označuje důležité věci, které je třeba si pamatovat při používání tohoto produktu.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození výrobku nebo zranění uživatele.

⚠ **POZOR:** Nedodržení upozornění může vést k poškození výrobku.

POZNÁMKA: Tento návod jsme sestavili podle nejnovějších specifikací a informací o produktech, které byly k dispozici v době publikace. Vyhradujeme si právo provádět změny, jakmile budou nutné. Jakékoli změny našich produktů mohou způsobit mírné odchylky mezi obrázky a popisky v tomto návodu a zakoupeným produktem. Ohledně nejnovější literatury a informací se vždy obraťte na svého nejbližšího autorizovaného dodavatele Ride Designs, distributora nebo na www.ridedesigns.com.

⚠ Před použitím tohoto produktu si prosím přečtete tento návod.

⚠ Všechny sedáky Ride Designs jsou navrženy tak, aby pomohly snížit výskyt proleženin. Žádný sedák však nedokáže zcela eliminovat tlak v sedě nebo zabránit proleženinám. Sedáky Ride Designs nenahrazují péči o pokožku, která zahrnuje správnou stravu, čistotu a pravidelné techniky uvolňování tlaku.

⚠ Použití sedáku Ride Forward Cushion bez správně sestavených součástí, včetně vnitřního a vnějšího potahu a pěnového polštáře, může způsobit zranění uživatele.

⚠ Instalace sedáku na invalidní vozík může ovlivnit těžiště invalidního vozíku a může způsobit převrácení invalidního vozíku dozadu, což může vést ke zranění. Vždy posuďte, zda je na vašem invalidním vozíku třeba přidat ochranu proti převrnutí nebo adaptér těžiště po amputaci, aby se zvýšila stabilita.

⚠ Nesprávné umístění nebo připevnění sedáku Ride Forward Cushion k vašemu invalidnímu vozíku může způsobit zranění. Váš invalidní vozík musí mít na popruhu nebo pevném sedadle doplňkový suchý zip, aby se dal sedák připevnit.

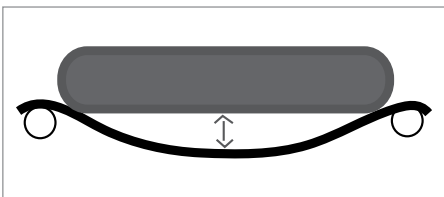
⚠ Nesprávné upevnění a přizpůsobení sedáku Ride Forward Cushion může způsobit zranění uživatele.

⚠ Konfigurace invalidního vozíku a správná opora od chodidel k zádům jsou zásadní pro úspěšné použití jakéhokoli sedáku pro invalidní vozík. Nedodržení těchto faktorů může mít za následek zranění uživatele.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Materiály Ride Forward fungují optimálně při pokojové teplotě. Nenechávejte sedák delší dobu v teplotách pod 5 °C. Před použitím vždy nechte sedák Ride Forward Cushion dosáhnout pokojové teploty. Sezení na příliš teplém nebo studeném povrchu může způsobit poranění pokožky.

Pokyny k instalaci a použití

Doporučujeme, aby počáteční upevnění sedáku provedl dodavatel nebo terapeut certifikovaný společností Ride Designs. Sedák Ride Forward Cushion je ve spojení s unikátním potahem navržen tak, aby pohodlně stabilizoval držení těla a pomohl snížit riziko poškození kůže.



Příprava invalidního vozíku pro připevnění Ride Forward Cushion

Sedák Ride Forward Cushion je navržen tak, aby bylo možné jej připevnit jak na závěsné, tak na pevné sedadlo invalidních vozíků.

POZNÁMKA: Pokud je mezi závěsným sedadlem vašeho vozíku a spodní částí sedáku mezera, je třeba polstrování utáhnout nebo vyměnit.

⚠ **POZOR:** Sedák Ride Forward Cushion nesmí přesahovat více než 2,5 cm před přední část sedadla vašeho invalidního vozíku.

Nainstalujte a upravte Ride Forward Cushion

1. Umístěte sedák na invalidní vozík tak, aby se zadní část sedáku (se štítkem se složením) přímo dotýkala zádové opěrky sedadla. Zajistěte, aby se suchý zip ve spodní části povlaku připevnil k suchému zipu na sedadle vašeho invalidního vozíku.

2. Jemně se přesuňte na sedák. Nakloňte se dopředu a posuňte zadek k zadní části sedáku. Zajistěte, aby vaše kyčelní kosti spočívaly uvnitř reliéfu na okrajích sedáku a aby vaše hýžďové svaly byly podpírány v zadních rozích sedáku.

3. Upravte si výšku podnožky tak, aby se vaše nohy pohodlně opíraly o přední část sedáku. Správná výška podnožky je nezbytná pro optimální výkon sedáku.

⚠ Pokud z jakéhokoli důvodu cítíte, že vaše pokožka není dobře chráněna, držení těla není dostatečně kontrolováno a/nebo nedobře snášíte sezení na sedáku, pak sedák Ride Forward Cushion není vhodnou volbou sedáku a měli byste zvážit sedák Ride Java Cushion nebo si přizpůsobit sedák Custom Cushion. Kontaktujte Ride Designs nebo vašeho certifikovaného dodavatele Ride Designs pro více informací o Ride Java Cushion nebo Ride Custom Cushion (pouze USA).

Plán počátečního užívání

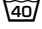




Před tím, než budete na sedáku sedět delší dobu, je vhodné jej vyzkoušet na kratší časové úseky. Po každém použití vizuálně zkontrolujte části těla, které se dotýkají sedáku. Jakékoliv zarudnutí by mělo zmizet do 10-30 minut. Pokud zarudnutí přetrvává déle než 30 minut, kontaktujte svého lékaře nebo terapeuta. Pokud při kontrole kůže po užívání nepozorujete zarudnutí trvajících déle než 30 minut, prodlužte dobu sezení postupně (1/2 až 1 hodinu každý den). Po každé delší době sezení pokračujte v kontrolách zarudnutí kůže. Obecně doporučená maximální doba sezení jsou dvě až čtyři hodiny. Kontrola kůže by měla být prováděna nejméně jednou denně, a to i poté, co je stanovena tolerance kůže. Pokračujte v rutinních technikách přerušovaného uvolňování tlaku (buď zvedání se na ruku nebo přenášení váhy pomocí náklonu), podle doporučení vašeho lékaře.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Pokud zarudnutí spojené s používáním sedáku Ride Forward Cushion přetrvává déle než 30 minut, přestaňte na sedáku sedět a okamžitě kontaktujte svého terapeuta nebo lékaře.

⚠ Musí být prováděny pravidelné kontroly a úpravy, aby byla zajištěna adekvátní poloha vašich sedacích kostí v případě možného přírůstku hmotnosti nebo mírného poklesu výšky polštáře, ke kterému může dojít po dobu životnosti výrobku. Nedodržení pravidelných kontrol a úprav pro polohu vašich sedacích kostí může mít za následek zranění.

Následně

Doporučujeme navštívit lékaře, aby zkontroloval vaši sedící polohu a integritu pokožky alespoň jednou ročně nebo kdykoli dojde ke změně hmotnosti, držení těla nebo celkového stavu, který by mohl ovlivnit vaši schopnost bezpečně, pohodlně a funkčně sedět.

Symboly pro praní prádla	
	Prát v teplé vodě (40 °C)
	Nepoužívat bělidlo
	Sušit na vzduchu
	Nečistit chemickými prostředky
	Nežehlit

Péče a údržba sedáku Ride Forward Cushion Čištění vnějšího povlaku

- Sejměte sedák Ride Forward Cushion z invalidního vozíku.
- Sundejte vnější povlak z polštáře. Zapněte povlak.
- Perte v pračce nebo v ruce v teplé vodě (40 °C, běžný prací prostředek, nebělit).
- Sušte pověšené na vzduchu.

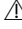
Čištění sedáku

- Vnitřní povlak odolný proti vlhkosti je navržen tak, aby chránil pěnové materiály sedáku, a neměl by být odstraňován. Pokud je znečištěný, jednoduše jej otřete vlhkým hadříkem.
- Po zaschnutí vložte polštář do povlaku. Ujistěte se, že je povlak správně umístěn zepředu dozadu.
- Umístěte sedák na invalidní vozík tak, aby se zadní část sedáku (se štítkem se složením) přímo dotýkala opěrky sedadla.


Životnost produktu

Maximální předpokládaná doba používání tohoto produktu jsou čtyři roky.

Opakované použití

 **NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Před předáním sedáku jinému uživateli se poraďte s autorizovaným prodejcem Ride Designs. Pokud zjistíte jakékoli poškození, produkt **NEPOUŽÍVEJTE**.

Likvidace

 Součásti a materiály recyklujte podle místních, státních a národních předpisů.

Záruční podmínky

Sedák Ride Forward Cushion byl pečlivě vyroben tak, aby vyhovoval vašim potřebám při sezení na invalidním vozíku. Tato omezená záruka je účinná po dobu 24 měsíců od data dodání původnímu kupujícímu. Pokud je zjištěna jakákoli vada materiálu nebo zpracování, společnost Ride Designs-součást opraví nebo vymění dle svého uvážení. Tato omezená záruka se nevztahuje na každodenní opotřebení nebo poškození, které je důsledkem nevhodného zacházení, nesprávného používání, zanedbávání nebo nedodržování pokynů k péči a údržbě.

Na potah na sedák je poskytována záruka 90 dnů. Záruka zahrnuje poškození způsobené zpracováním, vady materiálu nebo chyby způsobené výrobcem. Tato záruka se nevztahuje na propáleniny od cigaret, poškození potahu ostrými předměty, které mohou způsobit protržení, nebo poškození v důsledku nedodržení pokynů k praní.

Reklamac a opravy by měly být vyřízeny prostřednictvím vašeho nejbližšího autorizovaného dodavatele rehabilitační technologie Ride Designs. Před zpracováním záruční reklamac může být vyžadována kopie účtenky vystavené pro koupený produkt.



Sedák Ride Forward Cushion funguje nejlépe při použití se zádovou opěrkou Ride Designs

Nastavitelná zádová opěrka Ride Corbac™ váží o něco více než standardní polstrování zad a lze ji snadno upravit tak, aby pomohla zlepšit držení těla a zarovnání na invalidním vozíku. Nesnižuje hloubku ani šířku invalidního vozíku. Uživatel cítí, že sedí v invalidním vozíku, ne na něm.

Další alternativa, Java Back, nabízí patentovaný biomechanicky přesný design, který umožňuje asistentovi rychle, snadno a nezávisle optimalizovat pánevní oporu a vyvažovat trup způsobem, který napodobuje přirozený rytmus a pohyb těla. Uživatel zažívá pohodlí a stabilitu v klidu a žádné omezení funkcí a pohyblivosti. Zádové opěrky Java jsou k dispozici v celé řadě výšek, šířek a hloubek.

Pro lidi s náročnějšími potřebami na kontrolu držení těla zvažte zádovou opěrku Ride Custom (pouze USA), která je nejlepší v podpoře držení těla a péči o pokožku.



Poznámky k instalaci

Patenty: www.ridedesigns.com/patents
© 2017, Ride Designs. 090-030-C



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Německo