


Original

Návod k použití

Technický list můžete
stáhnout z webové
stránky
www.tartadesign.it

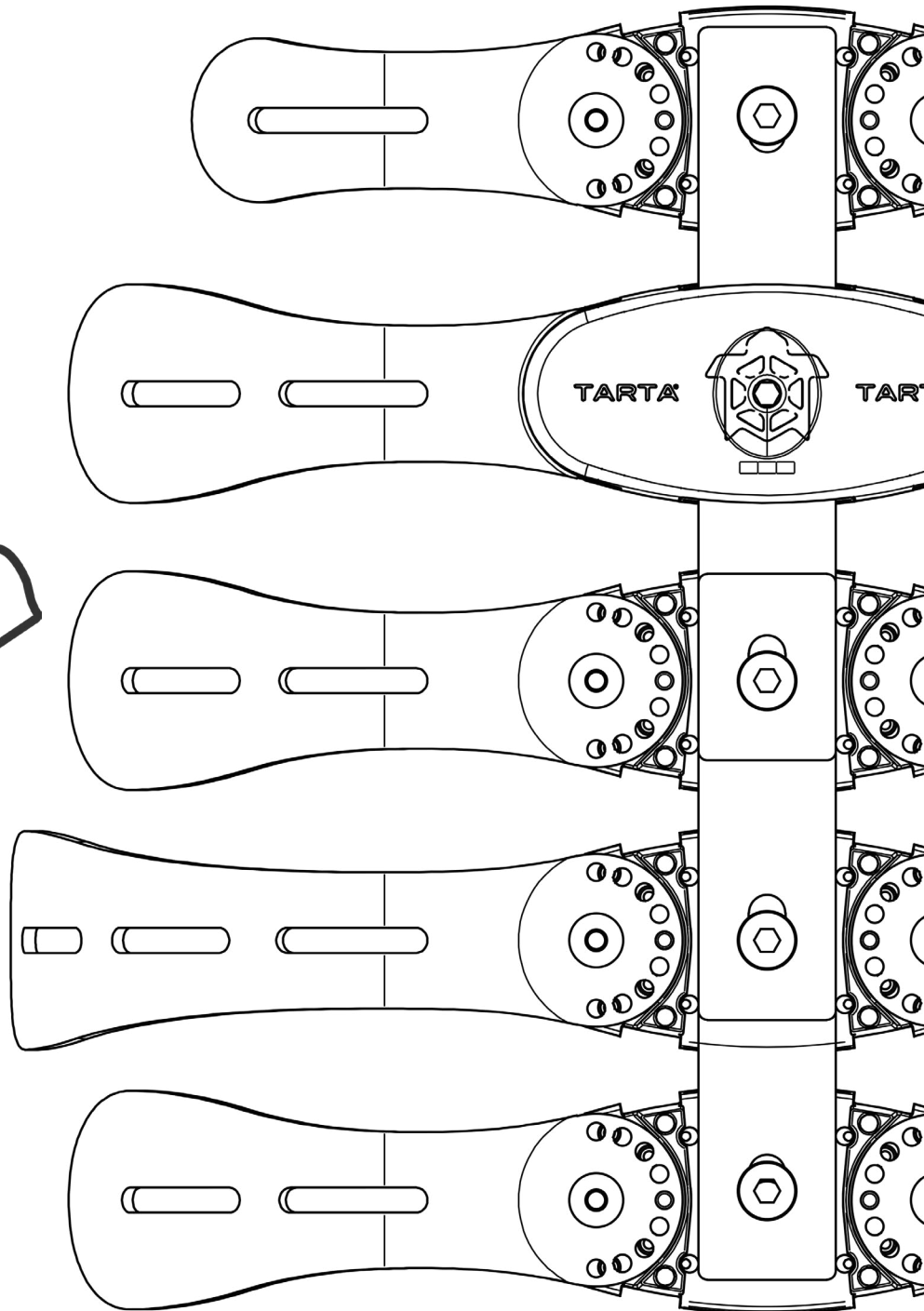


TARTA[®]
by Orthosanit Diffusion

CODE GMN: 805577471ORIR5



Obsah

Co je systém Tarta®	p.	02
Upozornění ..	p.	03
Kontraindikace	p.	03
Čištění a údržba	p.	04
Symboly	p.	04
Likvidace	p.	04
Záruka 24 měsíců	p.	04
Jak je to vymyšlené	p.	05
Háčky ..	p.	06
Návod k montáži	p.	10

Co je systém Tarta®?

Modulární systém TARTA® je zádová opěra navržená tak, aby ji bylo možné individuálně přizpůsobovat a zlepšit tím držení těla uživatele. TARTA® představuje tu nejlepší ergonomii vyplývající z kombinace tří faktorů - konstrukce, materiál, technologie. Jedná se o výrobek zkonstruovaný skupinou odborníků na držení těla, který nabízí vysoký stupeň pohodlí, využívá futuristický a fascinující design a řídí se filosofií "vše v jednom".

Původní myšlenkou systému TARTA® bylo zlepšit držení těla osob se zdravotním postižením, se všemi jejich speciálními potřebami, nicméně rychle jsme si uvědomili, že toto řešení musíme rozšířit na další oblasti použití ve prospěch mnoha lidí, kteří tráví velkou část svého dne vsedě. Příkladem výrobků, které jsme vyrobili vedle použití pro vozíky, jsou kancelářské židle, křesla, dětská vysoká židle a praktický "mobilní systém" pro pohovky a křesla. Avšak to je jen začátek - možnosti jsou opravdu nekonečné. Materiály používané u systému TARTA® byly navrženy tak, aby se dosáhlo maximálního výkonu. Předpjatá ocel použitá u pružin sleduje pohyb uživatele a poskytuje mu tak svobodu pohybu. Poté se vrací do původní polohy.

Polstrování je vyrobené z pratelného, prodyšného materiálu.

Zádovou opěru TARTA® tvoří skelet podobný hrudnímu koši, v němž jsou nastavitelná hliníková žebra, která kopírují polohu uživatele. Žebra jsou připevněna k centrálnímu "obratli", jehož tvar a velikost lze upravit.

To vše simuluje páteř. Kompletní systém pak završuje polstrování různých tvarů a velikostí, které optimálně vyhovuje individuálním potřebám.

Systém svou jednoduchostí poskytuje mnoho výhod jak při standardním použití, tak v oblasti speciální odborné výroby, kde nabízí možnost sestavení zakázkové verze, vyznačující se čistými, prostými liniemi.



Upozornění

- Pomůcku může předepsat pouze odborný lékař.
- Je zodpovědností odborného lékaře:
 - 1. předepsat pomůcku.
 - 2. předepsat uživateli nejvhodnější velikost pomůcky.
 - 3. předepsat uživateli vhodnou dobu kontinuálního používání.
- V případě, že pomůcka není kompletní nebo je poškozená, nepoužívejte ji a okamžitě se obraťte na prodejce, který Vám ji poskytl.
- Montáž zádové opěrky TARTA® na invalidní vozík může mít vliv na jeho těžiště a způsobit jeho převrácení, které může případně vést ke zranění. Z tohoto důvodu po montáži zádového systému TARTA® zkontrolujte stabilitu invalidního vozíku v terénu nakloněném mezi 12° a 15° jízdou všemi směry (dopředu, dozadu, doprava, doleva). Z důvodu zvýšení stability vždy posuďte případnou nutnost použití stabilizačních koleček proti převrácení nebo úpravu těžiště invalidního vozíku.
- Zádovou opěru TARTA® nepoužívejte k tlačení ani zvedání invalidního vozíku. Nesprávný způsob použití může způsobit náhodné oddělení zádové opěry od invalidního vozíku.
- Po provedení požadovaných nastavení se ujistěte, zda jsou jednotlivé šroubky dostatečně utažené a zda je zádová opěra připravena k použití.
- Pravidelně kontrolujte ty mechanické části pomůcky, které se mohou používáním uvolnit nebo vychýlit od tvaru v době pořízení; v takovém případě se prosím obraťte na autorizovaného technika, který provede u Vašeho systému TARTA® nezbytnou údržbu.
- Systém TARTA® musí být seřizován a montován pouze akreditovanými zdravotnickými pracovníky, ortopedickými techniky nebo pracovníky pověřenými společností Tarta by Orthosanit Diffusion srl.
- Je vhodné, aby se poloha uživatele pravidelně měnila (pokud je to možné), aby se zabránilo nadměrnému tlaku na kteroukoli část těla a sezení v ní bylo pohodlnější.
- Nevystavujte pomůcku otevřenému ohni ani žhnoucím předmětům: tyto jí mohou poškodit a způsobit zranění uživatele.
- **Nevystavujte pomůcku přímému slunečnímu záření. Nenechávejte pomůcku uvnitř vozu na přímém slunci. Zvýšení teploty může poškodit lepidlo nanesené na lamely suchých zipů.**
- Zabraňte kontaktu pomůcky s ostrými a/nebo špičatými předměty nebo nástroji, které mohou poškodit celistvost, zejména její polstrování.
- Před použitím pomůcky uživatelem zkontrolujte teplotu součástí, se kterými přijde uživatel do styku (nesmí být ani příliš horké, ani příliš studené).
- Žádné úpravy konstrukce nebo součástí zařízení by neměl provádět nikdo jiný než kvalifikovaný technik.
- Pro správnou instalaci musí být invalidní vozík vybaven napínací zádovou opěrkou.

Pomůcka byla zkonstruována k poskytnutí opory pro uživatele s maximální hmotností 100 kg.

Kontraindikace

- Nepoužívejte v přímém kontaktu s pokožkou; je vhodné, aby uživatel vždy nosil oděv, který umožňuje vyhnout se přímému kontaktu s materiálem, ze kterého je pomůcka vyrobena, aby se zabránilo možnosti jakékoli alergické reakce.
- Nepoužívejte v kontaktu s poraněnými částmi těla.
- Nepoužívejte v případě intolerance materiálů, ze kterých je pomůcka vyrobena.

Nedodržení výše uvedených pokynů může způsobit vážné zranění samotného uživatele, stejně jako ostatních osob.

Čištění a údržba

- Jednotlivé části pomůcky lze čistit měkkým hadříkem namočeným ve vodě a řádně vyždímaným.
- Pomůcku neponořujte do vody.
- Neprovádějte žádnou údržbu pomůcky: v případě poškození se obraťte na prodejce.
- Polstrování lze prát v automatické pračce na 30°C.

Symbols

	Označení CE - odpovídá směrnici EU 2017/745 (MDR)
	Tento symbol identifikuje výrobce a musí být doplněn jménem a adresou výrobce
	Kód výrobku
	Výrobní šarže
	Upozornění! Před použitím pomůcky si přečtěte návod k použití
	Neobsahuje latex

Likvidace

- Pomůcku lze zařadit do tuhého městského odpadu v souladu s místními zákony o recyklaci odpadu.

Záruka 24 měsíců


Každá pomůcka TARTA® je pečlivě kontrolována a testována, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň kvality. Počínaje datem nákupu se ke každému výrobku TARTA® vztahuje 24 měsíční záruka na vady materiálu a zpracování za předpokladu, že byl vystaven běžnému používání. Pokud během 24 měsíců od nákupu pomůcky odhalíte výrobní vadu nebo vadu zpracování, společnost Tarta by Orthosanit Diffusion srl se zavazuje dle vlastního uvážení pomůcku buď opravit nebo ji bezplatně vyměnit. Tato záruka se nevztahuje na díry, trhliny nebo popáleniny.

Veškeré reklamace nebo opravy je nutno směřovat na nejbližšího autorizovaného prodejce. Kromě zde výslovně uvedených záruk jsou všechny ostatní záruky vyloučeny, včetně všech předpokládaných záruk prodejnosti nebo vhodnosti pomůcky pro konkrétní účely.

Záruky kromě výše popsanych jsou vyloučeny. Uplatnění záruky je omezeno na opravu nebo výměnu zboží. V žádném případě nesmí zranění způsobená rozbitím výrobku v rámci záruky vést k nárokům na následné odškodnění ani nároky na odškodnění nesmí přesáhnout hodnotu prodaného nevyhovujícího zboží.

Jak je to vymyšlené

Jádrem mechanismu je řada "obratlů", které jsou vzájemně spojené díly (pružinami) z předpjaté oceli a napodobují tvar a vlastnosti páteře.

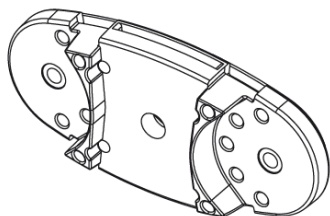

Obratel



Pružina o tloušťce 1 mm

"Páteř" může tvořit různý počet obratlů, od minimálně tří pro velmi aktivní verzi až do výšky ramen pro osoby, které potřebují plnou oporu zad.

Každý jednotlivý obratel má výšku 5 cm a vychýlení 1 cm, takže systém TARTA® může nabídnout možnost změny výšky pomocí stejné zádové opěrky.

Na každém z obratlů jsou čtyři zátky, které po odstranění umožňují boční sklon "páteře" asi 10°, kde je nutné sledovat linii výrazných deformit, jako je skolióza.

Ke každému obratli lze připevnit "žebra", která jsou k dostání v 4/5 různých velikostech a která podepírají a/nebo obklopují záda.


Každý z nich lze nastavit jednoduchým posunutím zajišťovací zátky, abyste našli přesnou polohu pro omezení pohybu nebo pro oporu.

Materiálem použitým pro lamely (žebra) je hliník; má tu výhodu, že může být modelován milimetrově, aby vyhovoval každé individuální potřebě.



Žebro

Polstrování se po instalaci přizpůsobuje a snadno nastavuje pomocí suchých zipů.




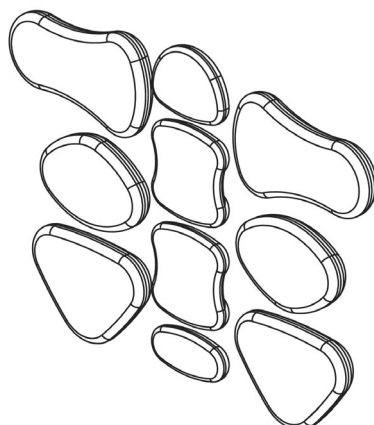








Polstrování

Háčky

Zajišťovací systém pro skládací invalidní vozíky



CODE:
A/PGV S-M L-XL

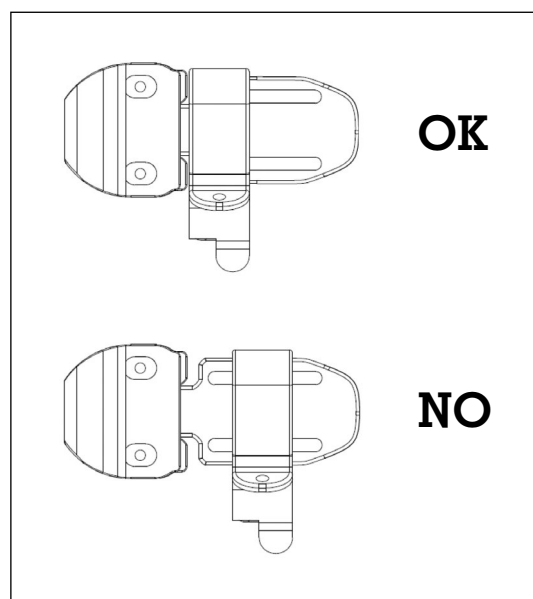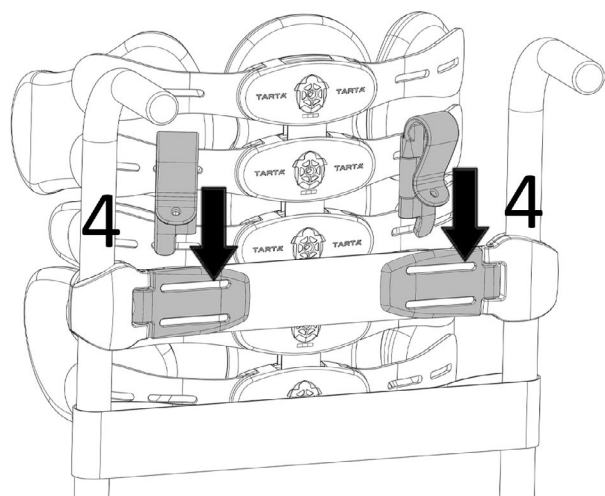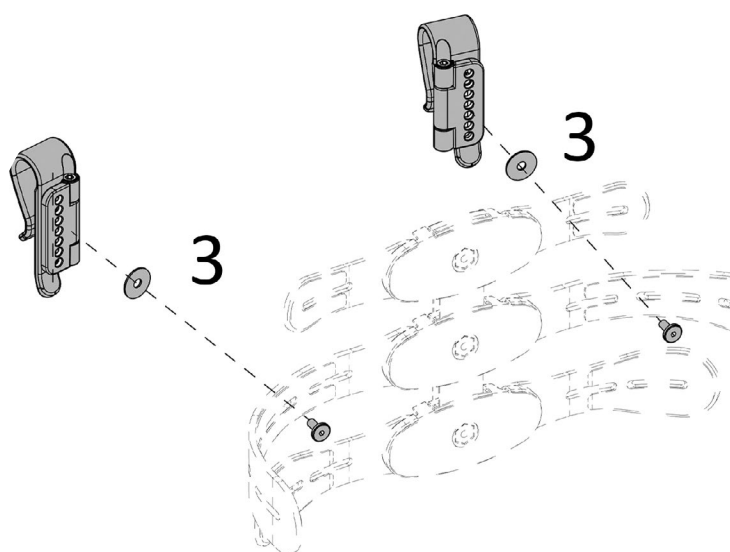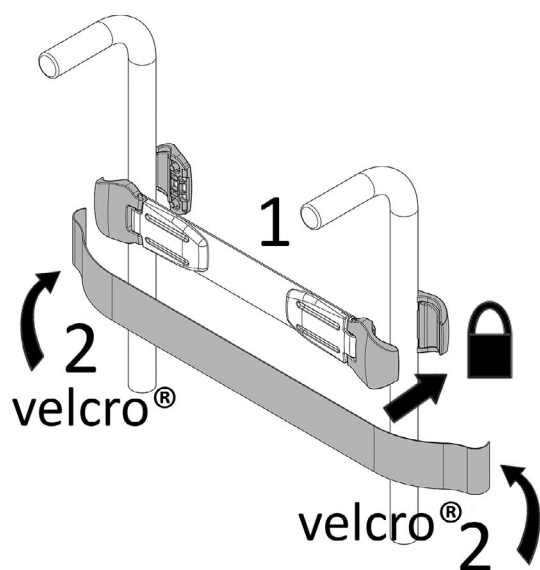

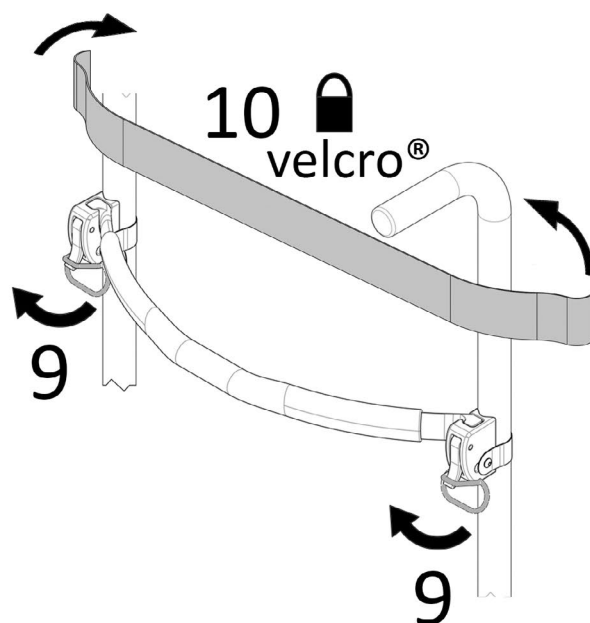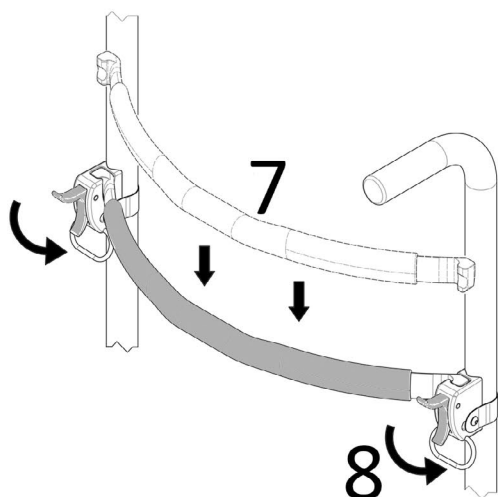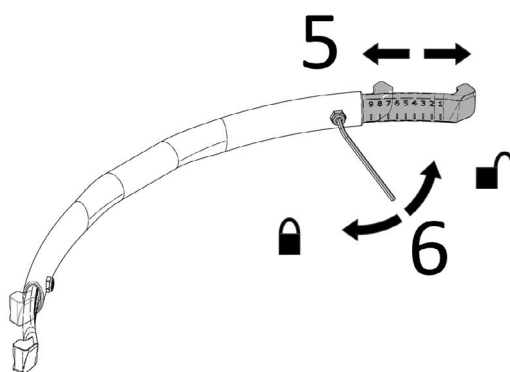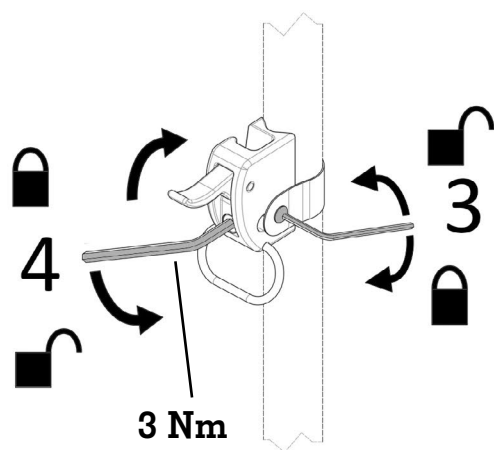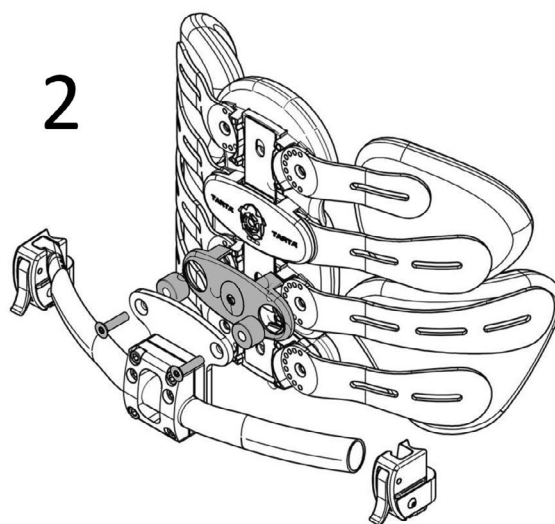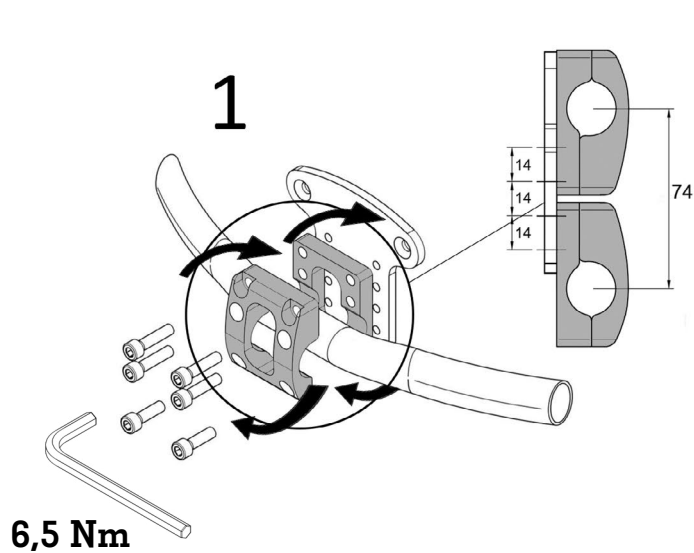



Zajišťovací systém pro invalidní vozíky s pevným rámem

CODE:
AH/OR-R- S/M L-XL

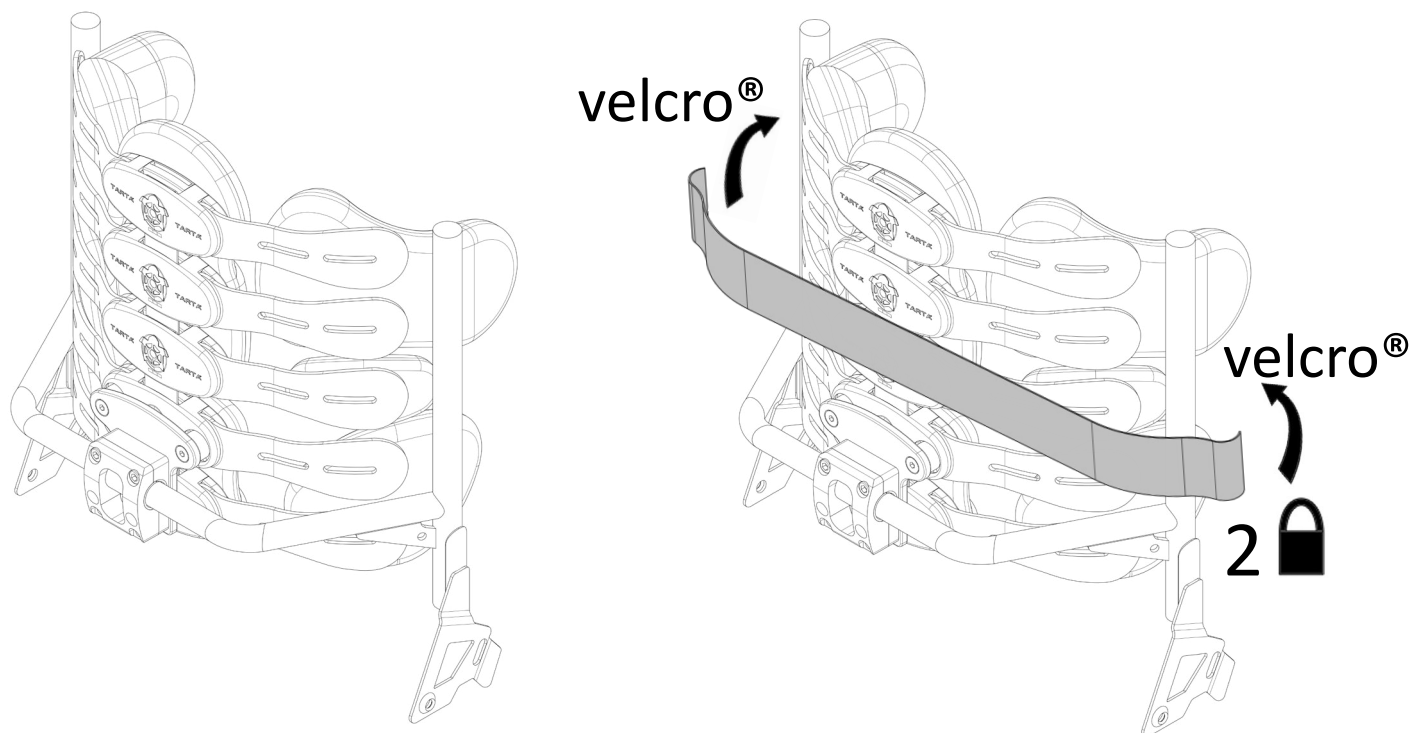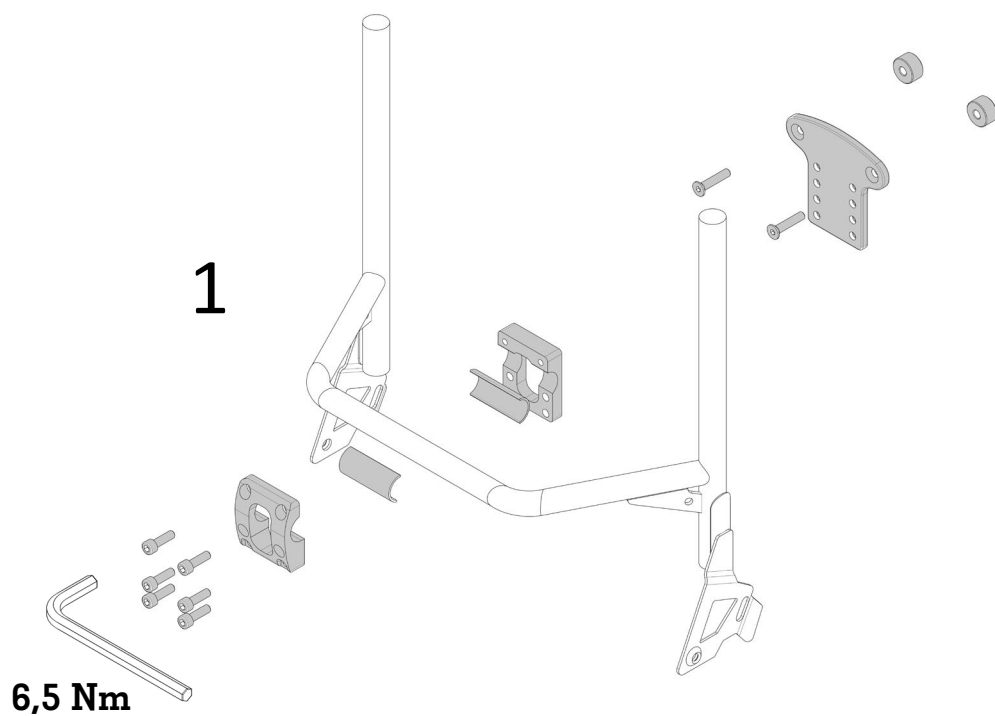


**Zajišťovací systém pro invalidní vozíky
s pevným rámem**


**CODE:
A/G S-M L-XL**

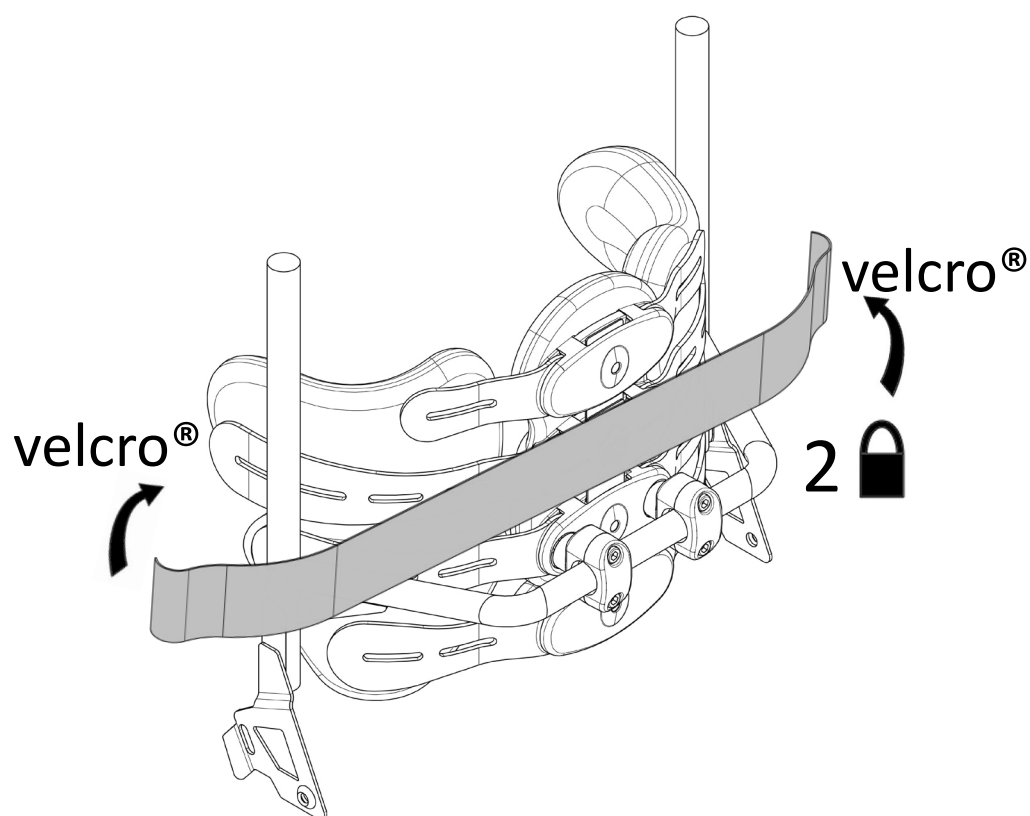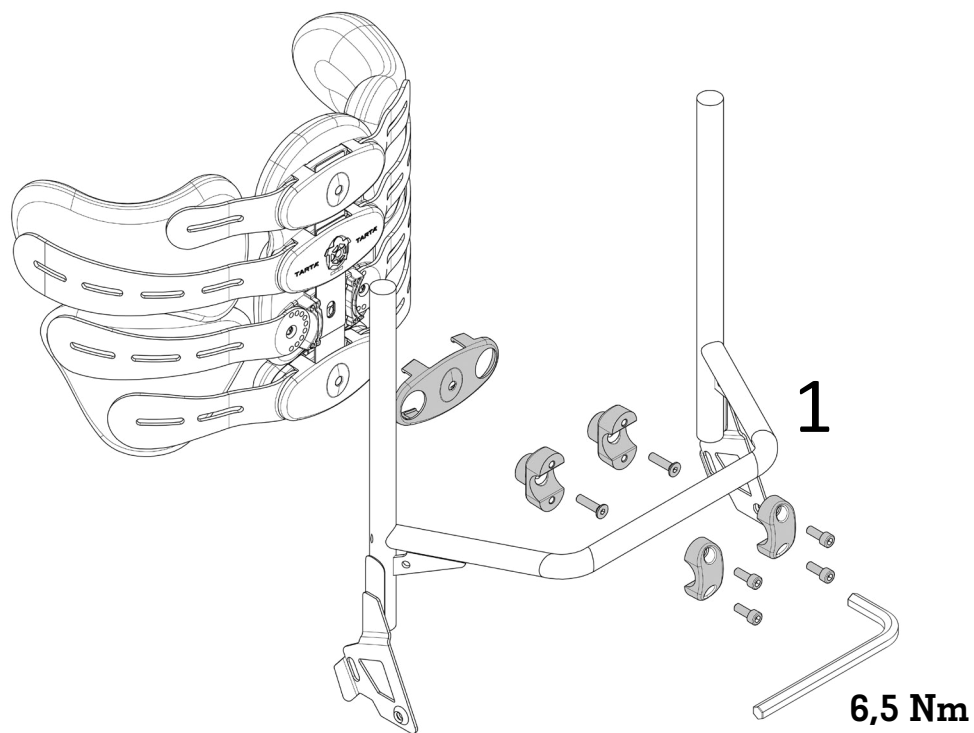


Návod k montáži

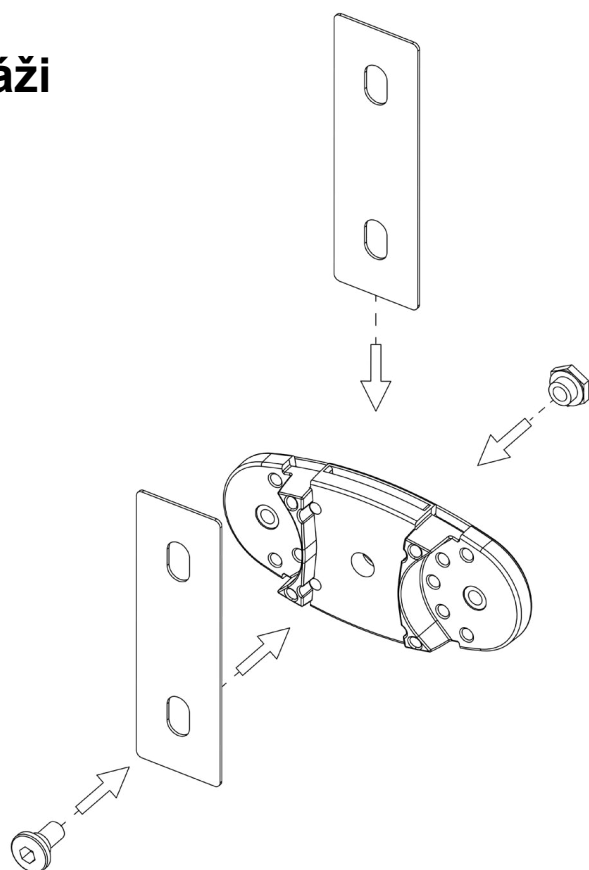





01

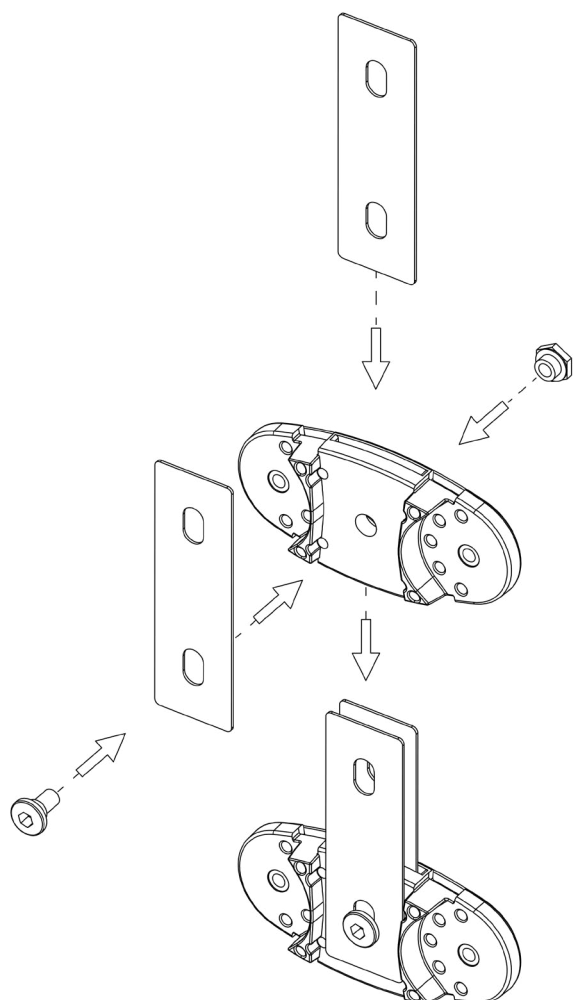


02

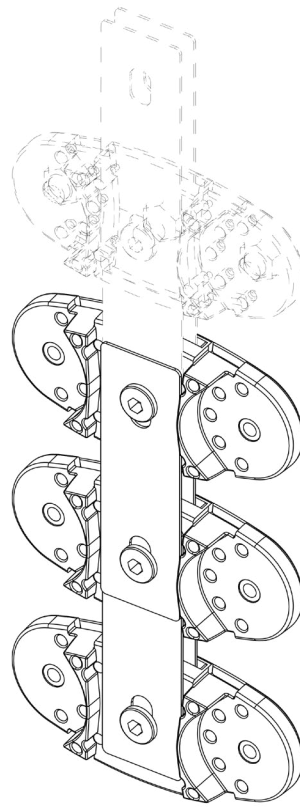


03

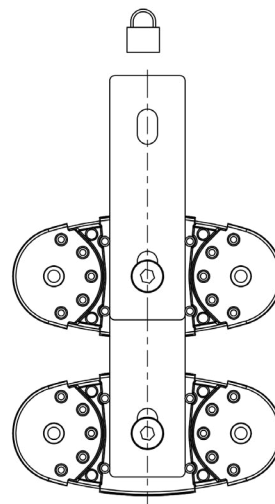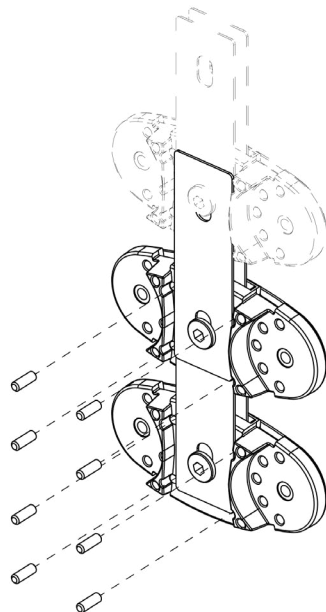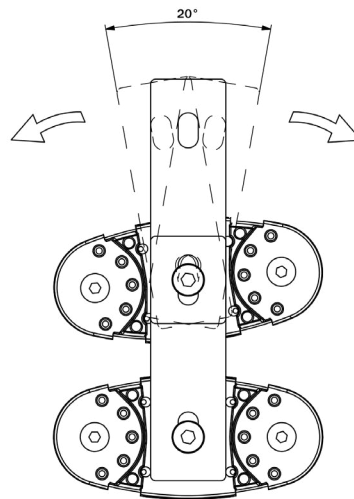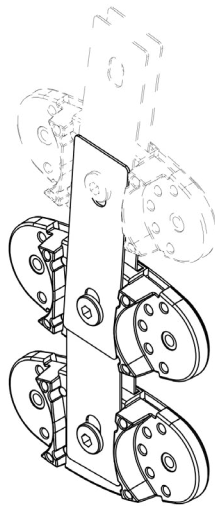



04

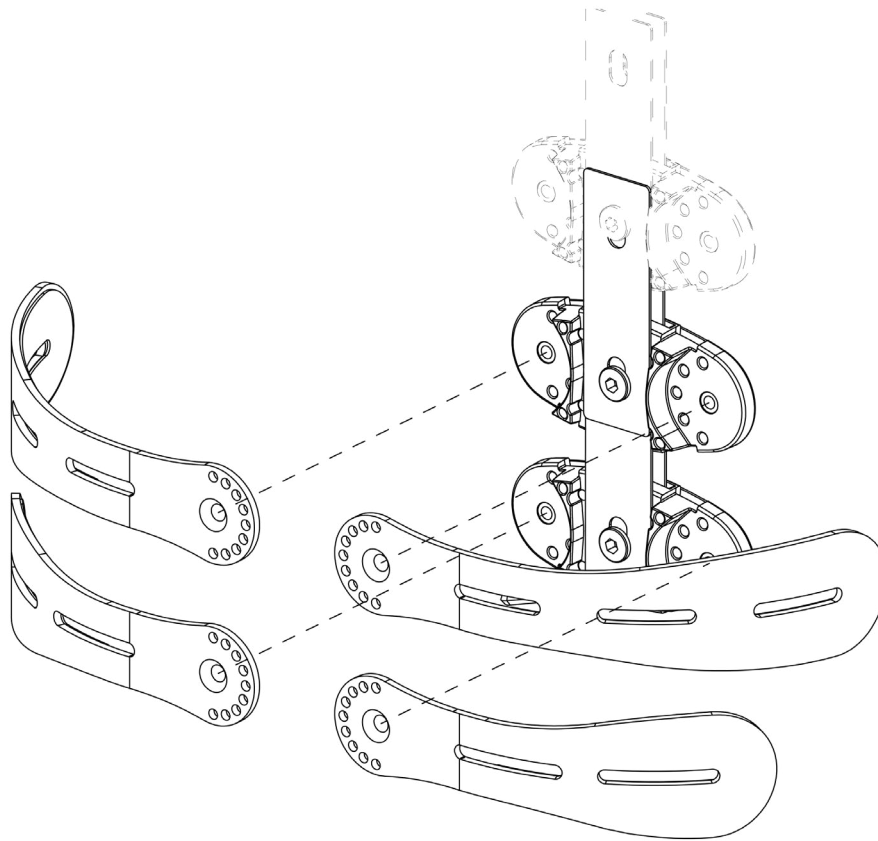


05

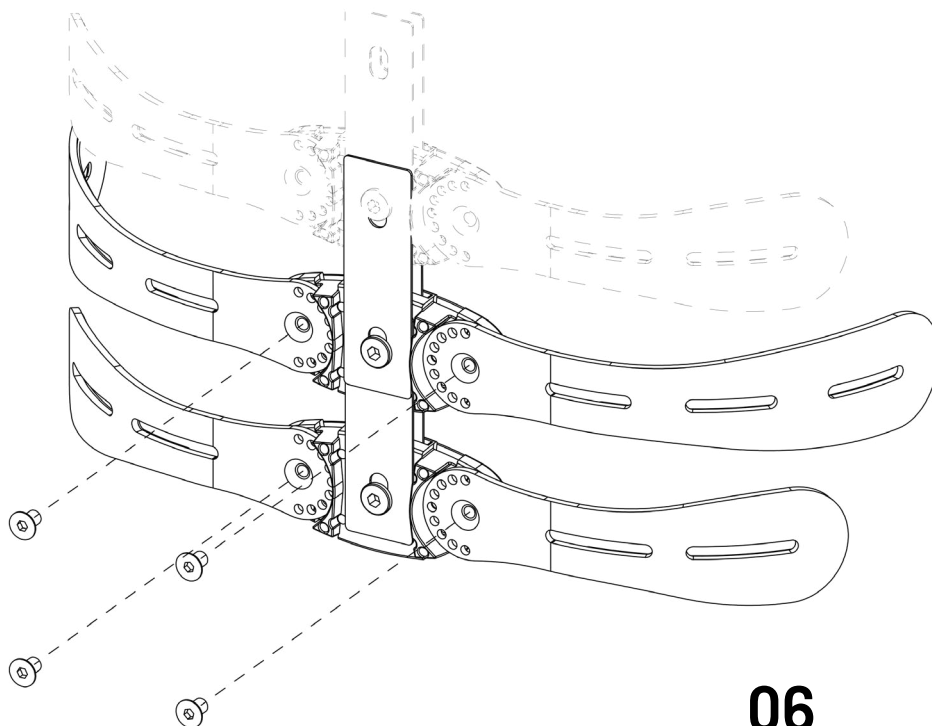




06

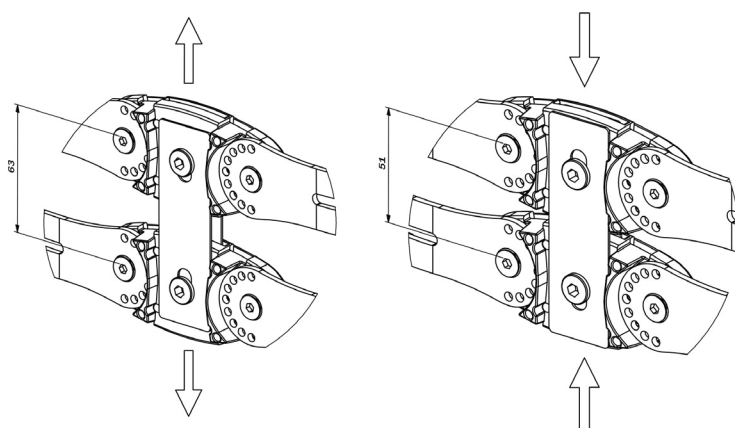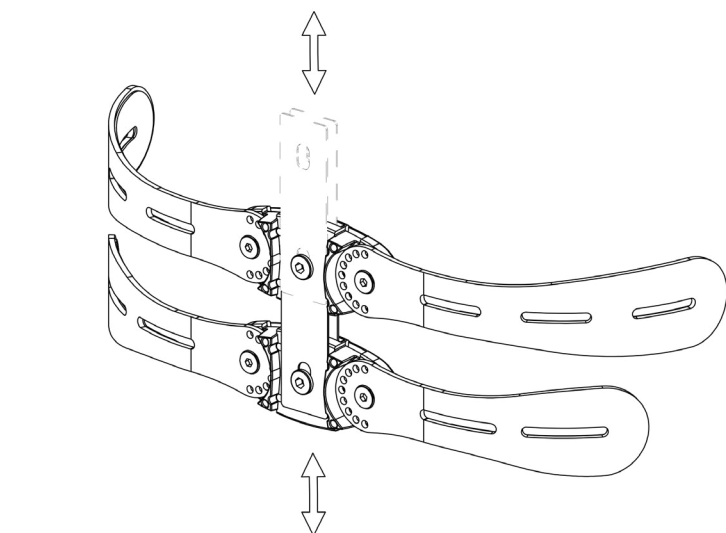

07

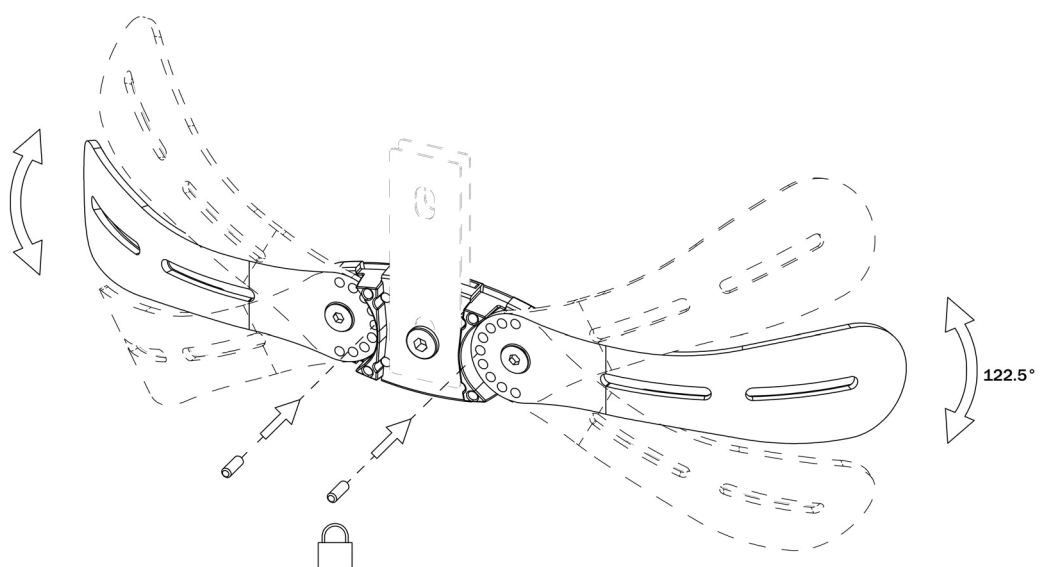


08

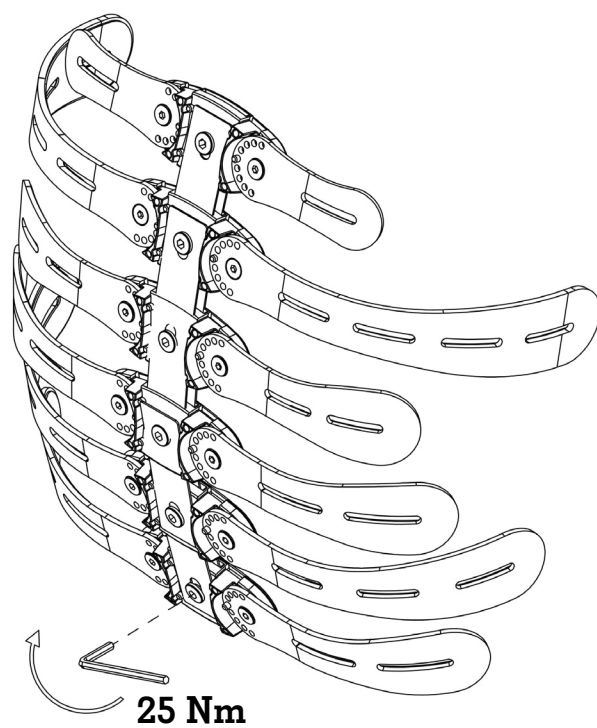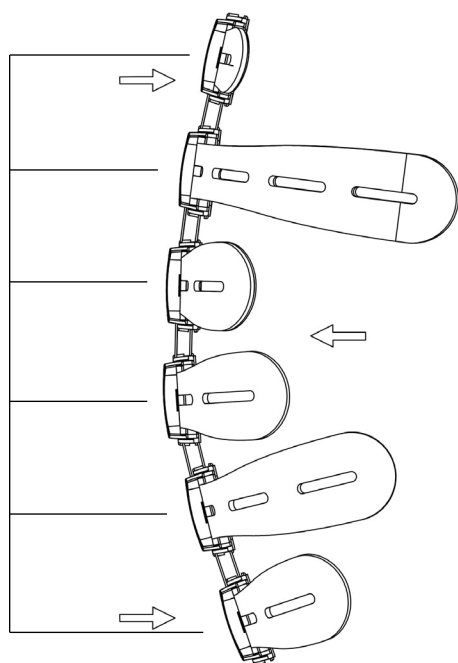
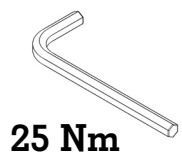



**utáhněte šrouby momentem 25 Nm,
abyste zafixovali tvar opěry**

09

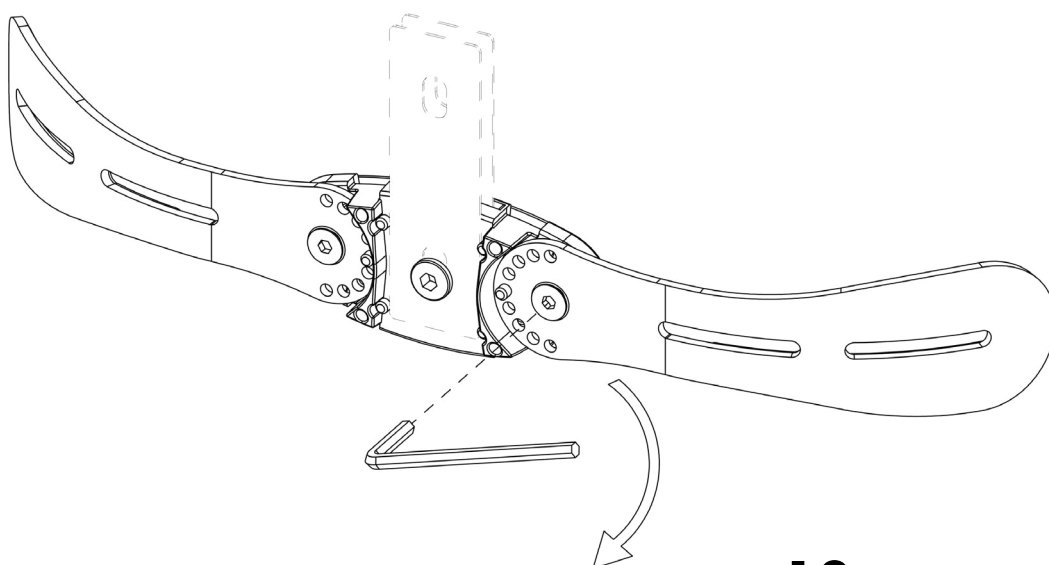

10

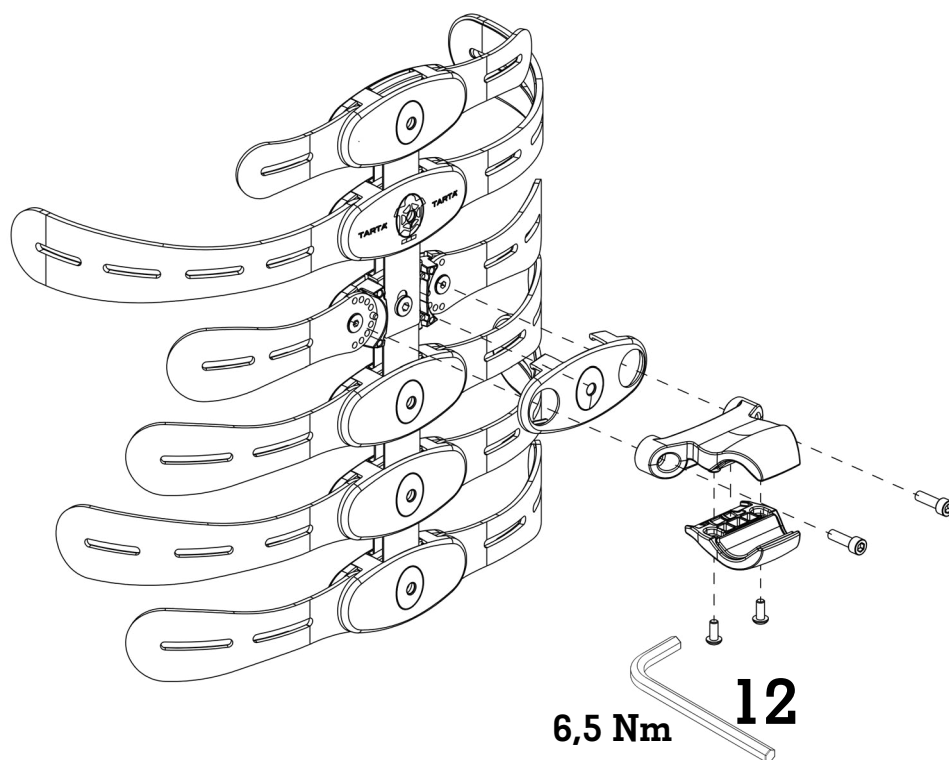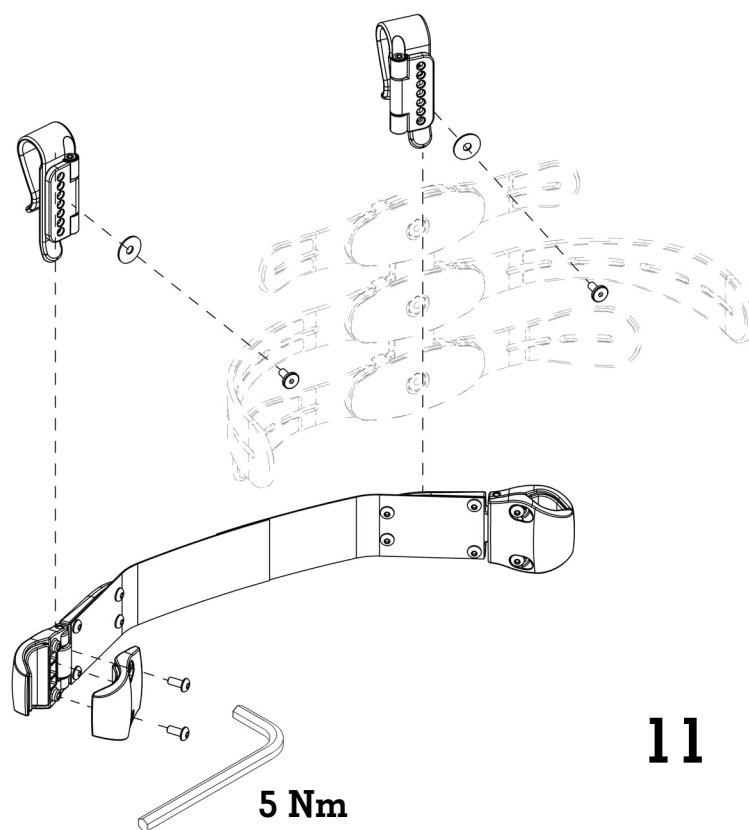

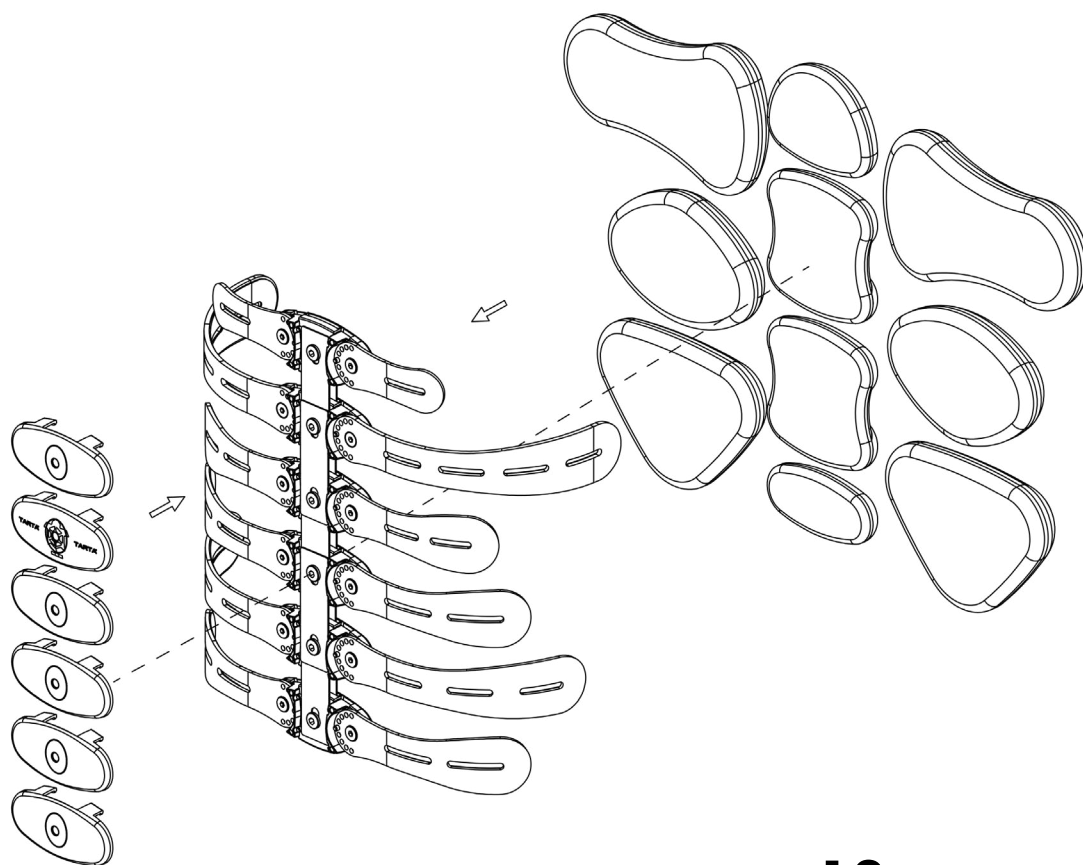

13

Il Fabbricante - *The Manufacturer*

TARTA® by Orthosanit Diffusion S.r.l.

Sede Legale OSD S.r.l. – Registered Office: Galleria Goito, 18, 19121, La Spezia, Italy

Sede Operativa OSD S.r.l. – Headquarter: Via Cotonificio, 56, Pisan di Prato, 33037 (UD) Italy



DICHIARA - DECLARES


Sotto la propria responsabilità che - *Under his own responsibility that*
il Dispositivo Medico - *the Medical Device*

	Identificazione del Dispositivo Medico (Medical Device Identification)		
		☐	ORIGINAL
Etichetta - Label			
Classificazione (Secondo Allegato VIII MDR) Classification (According to Annex VIII MDR)	Classe - Class Regola – Rule	I I	

- ✓ È conforme al Regolamento 2017/745 (MDR) e successive modifiche (MDD).
Complies with Regulation 2017/745 (MDR) and subsequent amendments (MDD).
- ✓ È conforme alle norme tecniche applicabili.
Complies with applicable technical standards.

La Spezia, 01 Marzo 2022

Legale Rappresentante o persona autorizzata all'emissione
Legal Representative or authorized person

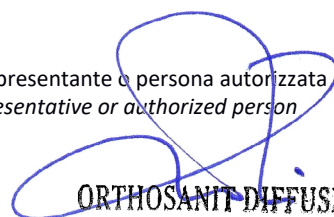

ORTHOSANIT DIFFUSION S.r.l.

Periodo di validità di questa Dichiarazione di Conformità – Validity period of this Declaration of Conformity

Questo documento non ha scadenza salvo modifiche apportate al prodotto o al processo

This document has no expiry date unless changes are made to the product or process