

**UPLIFT**

# Seat Assist<sup>®</sup>



**Prodej ČR a servis:**

**MEYRA ČR s.r.o.**  
Hrusická 2538/5  
141 00, Praha 4  
Tel.: 272 761 102 (prodej)  
Tel.: 272 661 430 (servis)  
E-mail: [meyra@meyra.cz](mailto:meyra@meyra.cz)  
Internet: [www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)

**Výrobce:**

**Meyra GmbH**  
Meyra-Ring 2  
D-32689 Kalletal-Kalldorf  
Germany

# Bezpečnostní opatření

## • Pokyny • Záruka

### Bezpečnostní opatření

Unikátní patentovaný design Zvedacího sedáku Uplift je po všech stránkách bezpečný. Navzdory maximální bezpečnosti Vašeho nového výrobku Uplift existuje několik bezpečnostních opatření, která je potřeba učinit:

1. Ujistěte se, že při každém vstávání se máte čeho chytit. Zvedací sedák Uplift je navržen pro použití na židlích s područkami, které poskytují dostatečně stabilní sedací plochu. Obvykle lze sedák Uplift použít i na měkkých židlích, pohovkách nebo sedačkách. Sedák Uplift se nedoporučuje používat na invalidních vozících, v automobilech, masážních křeslech nebo na kancelářských židlích s neuzamykatelnými kolečky.
2. Vždy zajistěte, aby židle, na které sedák Uplift používáte, neklouzala po podlaze. Pokud máte pochybnosti, umístěte židli opěrkou ke zdi nebo jinému pevnému objektu.
3. Pokud se budete pro něco sklánět, nepřenášejte váhu na chodidla – došlo by tím k aktivaci sedáku Uplift.

### Nastavení hmotnosti


1. Postavte sedák Uplift na opačnou stranu, než na které se nachází madlo.
2. Sedák rozložte odepnutím pásku na suchý zip okolo madla.
3. Zmáčkněte polstrovanou část sedáku tak, aby se vyklenul směrem ven. Tím dojde k uvolnění válečku. (Sedák Uplift je navržen tak, aby se tímto způsobem mohl ohýbat více než tisíckrát. Není třeba se obávat, že ohýbáním dojde k poškození jednotky.)
4. Nastavte odpovídající hmotnost. Nasadte kolíky válečku mezi drážky dle hmotnosti uživatele. Ujistěte se, že je váleček bezpečně vložen doprostřed drážky pro danou hmotnostní kategorii. (Čísla vytištěná na měrce jsou pouze orientační. Zvolené nastavení by mělo odpovídat schopnostem a preferencím uživatele. Volba měkčího nastavení bude stále umožňovat pomalé spouštění do židle, ale nebude poskytovat tak velkou podporu při vstávání.)



Stlačte výrobek ohnutím polstrované části.



Zvolte pozici válečku tak, aby odpovídala hmotnosti uživatele a vložte kolíky do drážky.

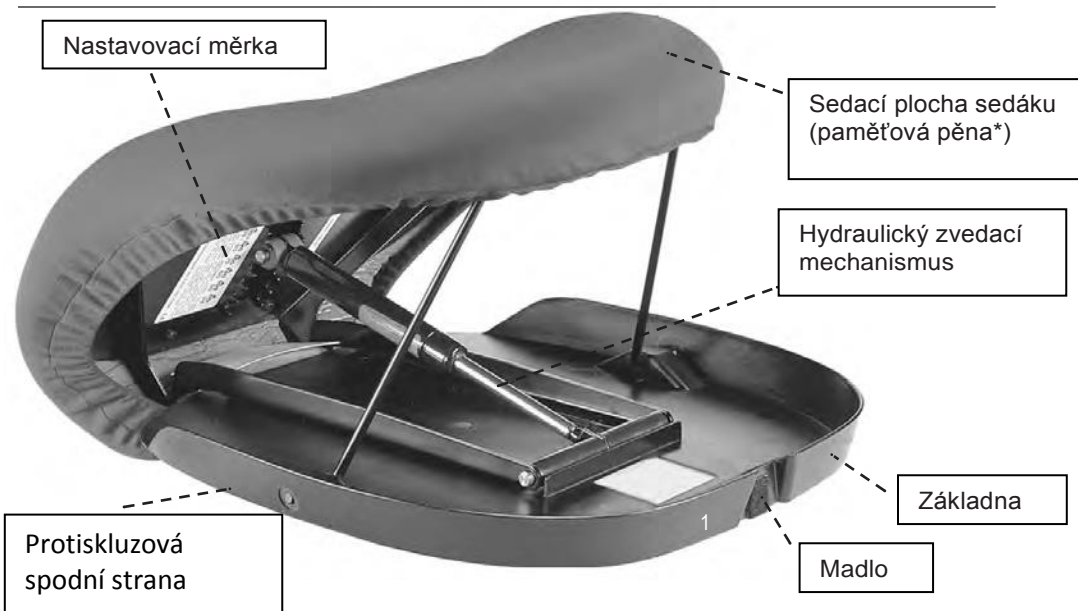

\*Paměťová pěna – pomalu expandující pěna se přizpůsobí tvaru Vašeho těla a poskytne tak vynikající komfort.

## Sedání pomocí sedáku Uplift

Po nastavení hmotnosti a umístění sedáku na židli se posadíte na jeho horní plochou část. Sedák Uplift Vás pomalu a snadno usadí do židle. (Pozn.: Pokud se sedák Uplift po zatížení nesníží, znovu nastavte hmotnost na nižší hodnotu.)



## Vstávání pomocí sedáku Uplift

Jakmile jste připraveni vstát, jednoduše začněte vstávat jako obvykle - nakloňte se dopředu a odrazte se pomocí rukou a nohou. Sedák rozpozná, že vstáváte a pomalu a jemně Vás nadzvedne.



## Odnímatelný potah

Zvedací sedák Uplift je dodáván s omyvatelným nepromokavým černým potahem.

### Nasazení potahu:

1. Po nastavení hmotnosti sedák Uplift položte na stůl otevřeným koncem směrem od Vás.
2. Konec potahu natáhněte štítkem přes " zadek " nebo " vrch " sedáku a stáhněte jej dolů pod přední okraj polštáře.

Všimněte si, že zadní či horní konec potahu je širší, než přední, aby správně seděl. Doporučuje se nechat celý štítek nebo jeho část na potahu, abyste v budoucnu mohli snadno identifikovat jeho zadní/horní konec.



## Péče o Váš Uplift

Váš sedák Uplift je potažen speciálním nehořlavým a nepromokavým potahem. Povrch polštáře lze omývat houbičkou a jemným čistícím prostředkem. **(Sedák Uplift nikdy nepoňujte celý do vody.)** Odnímatelný potah je vyroben z nepromokavé polyesterové látky, kterou lze prát v pračce a sušit vzduchem.

## Složení pro přepravu



Stejně jako při nastavování hmotnosti nechte váleček sjet až do spodní pozice na měře.



Sedák složte a zapněte suchý zip okolo madla.

## Záruka

### Záruční podmínky

Společnost MEYRA ČR poskytuje dvouletou záruku na výrobní a materiálové vady od data zakoupení.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená běžným opotřebením.

## Technické parametry

Rozměry: 40 x 45cm  
Výška: plus 2,5 cm  
Nosnost: 100 / 160 kg

Hmotnostní třídy Standard:  
43, 55, 68, 82, 100 kg

Hmotnostní třídy XXL:  
90, 115, 130, 160 kg



## Umístění na židli

Obecně by měl Sedák Uplift přečínat přes přední část židle, jak je znázorněno na obrázku. Na hlubokých židlích, které mají dostatečně velkou polstrovanou plochu, je možné Sedák umístit více dozadu. Při používání Sedáku Uplift se držte oběma rukama opěrek (nebo jiného vhodného držáku).

Pokud Sedák Uplift používáte na tvrdé židli, měl by přečínat tak, jak je znázorněno na obrázku.