

Nabíječka serie HP1211B2 24V

Návod k použití:

- (1) Ujistěte se, že kabel pro připojení k el. síti, kabel k bateriím a spoje jsou v dobrém stavu.
- (2) Ujistěte se, že výchozí napětí nabíječky je stejné jako baterie, které chcete nabíjet.
- (3) Propojte zásuvku nabíječky s baterií a poté připojte kabel k zásuvce el. sítě.

Ukazatel LED:

- LED (Power): červené světlo svítí = zapnuto
LED (Charge): červené světlo svítí = probíhá nabíjení
 zelené světlo svítí = baterie jsou plně nabitý

Řešení problémů:

- (1) LED (POWER) nesvítí
-> zkontrolujte, že vstupní napětí je 230 V. Pokud tomu tak není, shořela pojistka. Pošlete nabíječku na opravu do autorizovaného servisu.
- (2) LED (CHARGE) nesvítí
-> zkontrolujte, zda jsou všechny spoje správně zapojeny. Pokud jsou všechny spoje zapojeny správně, ale LED světlo stále nesvítí, je pravděpodobně vadná baterie.
- (3) LED (CHARGE) se okamžitě rozsvítí zeleně
-> zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá. Pokud ne, je pravděpodobně vadná nabíječka.

POZOR:

- (1) Nabíječka je určena k použití ve vnitřním prostoru. Nevystavujte nabíječku vlhku a tekutinám. Nabíjení musí probíhat v dobře větrané místnosti.
- (2) Používejte nabíječku pouze s olověnými bateriemi 24V.



Nabíječka HP1211B2
2006/95/EG
2004/108/EG(EMV)

Adresa výrobce:
High Power Technology (KunShan)INC
No. 1163 Hua an Rd, HuaQiao Town
KunShan City, JiangSu Province, China
Post code: 215332

Rev.1