

CESTOVÁNÍ S ECO ASSIST

CO PLATÍ?

Pokud si z důvodu funkčních odchylek potřebujete s sebou na cestu vzít elektrickou pomůcku, můžete ji přepravovat jako odbavené zavazadlo. Upozornujeme, že každá letecká společnost si může vykládat předpisy sama nebo uplatňovat svá vlastní pravidla. Proto si vždy při rezervaci letenky ověřte u konkrétní letecké společnosti, co platí.

UPOZORNĚNÍ

- Všechny baterie, které si s sebou berete, musí být schváleny pro let. Všechny naše letecké baterie pro ECO ASSIST jsou testovány a schváleny dle mezinárodní normy UN38.3.
- Baterie mohou mít maximální výkon 300 Wh (300 Wh v příručním zavazadle a 300 Wh v rezervě). Cestovní baterie ECO ASSIST má kapacitu 278 Wh.
- V některých případech letecká společnost požaduje, aby byla jedna nebo obě baterie vyjmuty (jedna se počítá jako náhradní baterie). Baterie, které si berete jako příruční zavazadlo, musí být chráněny proti zkratu. To můžete vyřešit přelepením kontaktů páskou.

JAK NA TO

1. Při rezervaci letu byste měli vždy předem informovat leteckou společnost, že si s sebou vezmete elektrickou pomůcku, a řídit se jejími pokyny.

V souvislosti s rezervací poskytněte letecké společnosti podrobné informace.

2. Při letu lze použít cestovní baterie. Mají následující specifikace:

• Název	Airsafe baterie ECO ASSIST
• Číslo položky	EBB0048T1A
• Napětí	48 V
• Kapacita	5,8 Ah, (278 Wh)
• Typ	Lithiová
• Hmotnost	1900 g
• Velikost	D: 320 mm, V: 87 mm, Š: 88 mm
• Schválení	UN38.3

3. Při odbavení vám asistenční personál poskytne manuální invalidní vozík, pokud nepoužíváte vlastní. Poté můžete svůj ECO ASSIST odevzdat na přepážce pro nadrozměrná zavazadla. ECO ASSIST by měl být určitě zabalený v pevné ochranné tašce – existují různé varianty, například tašky určené pro kočárky. Další možností je pronájem tašky od společnosti Air Shells: www.airshells.com