

CS

Ovládací modul

Dynamic Controls
Model LiNX REM215

Návod k obsluze



MEYRA®


Obsah

Význam použitých symbolů	4
Úvod	4
Výčet modelů	4
Specifikace	4
Použití	4
Úprava vozíku	5
Recirkulace	5
Životnost	5
Bezpečnostní pokyny	5
Přehled	6
Ovládací modul LiNX REM215	6
Ovládací panel, tlačítka	6
Kontrolka LED	6
Tlačítka a symboly	7
Příprava vozíku k provozu	9
Nabíjení baterie	9
Zapnutí ovládacího modulu	10
Režim jízdy	10
Zapnutí režimu jízdy	10
Imobilizér	11
Zapnutí imobilizéru	11
Vypnutí imobilizéru	11
Doba automatického vypínání	12
Kontrola před jízdou	13
Indikátor stavu baterie	13
Vyhodnocení	13
Předvolitelná maximální rychlost	14
Joystick	16
Jízda a řízení	16
Zabrzdní elektrického vozíku	16

Stavěcí funkce	17
Zapnutí režimu přestavování	17
Volba elektrického přestavení	17
Nastavení elektrického přestavení	17
Vypnutí režimu přestavování	18
Individuální funkce / nastavení	19
jízdni profil	19
Diagnostika poruch	20
Zobrazení poruchy indikátorem stavu tlačítka Zap/Vyp	20
Zobrazení informací pomocí indikátoru stavu baterie	22
Zobrazení informací pomocí ukazatele předvolby rychlosti	24
Údržba	25
Opravy	25
Servis	25
Bezpečnostně technické kontroly	25
Denní kontroly	25
Týdenní kontroly	25
Roční kontroly	25
Technické údaje	26
Ručení / Záruka	26
Záruční kupón	27

VÝZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ

Barevně zvýrazněné bezpečnostní pokyny je bezpodmínečně nutné respektovat!

-  Tento symbol označuje upozornění a doporučení
- [] Odkaz na číslo obrázku
- () Odkaz na funkční prvek uvnitř obrázku.


ÚVOD

Před prvním uvedením do provozu si tento dokument přečtěte a řiďte se jím.

Děti a mladiství by si tento dokument měli před první jízdou přečíst, případně spolu s rodiči, dohlížející nebo doprovázející osobou.

Používejte tento ovládací modul jenom tehdy, když jste průvodní dokumentaci také porozuměli.


Elektrický vozík se ovládá pomocí ovládacího modulu.

-  Příslušenství a volitelná výbava jako např. externí tlačítkové spínače nepatří ke standardnímu rozsahu dodávky.

Při nevhodném používání ovládacího modulu a jeho příslušenství ohrožujete sebe a ostatní. Proto je nutné naučit se s ním správně zacházet.

Tento návod k obsluze vám pomůže seznámit se s obsluhou ovládacího modulu a zabránit úrazům.

Uživatelé se zrakovým postižením naleznou soubory ve formátu PDF spolu s dalšími informacemi o našich výrobcích na naší webové stránce na naší webové stránce.

-  V případě potřeby se obraťte na svého prodejce.

Informace o bezpečnosti výrobku a o možném stahování našich výrobků najdete v návodu k obsluze vašeho elektrického vozíku.

VÝČET MODELŮ

Tento návod k obsluze platí pro ovládací moduly:

Modul LiNX REM215

SPECIFIKACE

Ovládací modul byl vyvinut pro elektrické vozíky s elektronikou LiNX.

POUŽITÍ

Ovládací modul se smí připojit pouze na odpovídající elektrický vozík s elektronikou LiNX.

ÚPRAVA VOZÍKU

Úpravy či nastavení si nechávejte zásadně provádět u prodejce.

Před prvním použitím nechte u svého prodejce nastavit ovládací modul.

Příhlédne při tom ke zkušenostem s jízdou, speciálním požadavkům uživatele a hlavnímu místu používání elektrického vozíku.

Při změně požadavků může prodejce nastavit citlivost joysticku.

- ☞ Doporučujeme pravidelnou kontrolu nastavení ovládacího modulu, aby byl zaručen optimální stav i při změnách obrazu choroby či postižení uživatele.

RECIRKULACE

Ovládací modul se hodí k recirkulaci. Před každou takovou změnou uživatele se ovládací modul musí podrobit kompletní prohlídce.

- ☞ Hygienická opatření, která jsou pro opětovné použití nutná, provádějte podle validovaného hygienického plánu; součástí musí být dezinfekce.

ŽIVOTNOST

U tohoto produktu je očekávaná průměrná životnost 5 let, pokud se produkt používá k určenému účelu a jsou dodržovány veškeré předpisy pro údržbu a servis. Životnost vašeho produktu závisí jak na četnosti používání a prostředí, v němž ho používáte, tak na péči. Použitím náhradních dílů lze životnost produktu prodloužit. Náhradní díly bývají zpravidla k dostání až 5 let po ukončení výroby.

- ☞ Uvedená životnost nepředstavuje žádnou dodatečnou záruku.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ☞ Demontovaným ovládacím modulem neházejte ani ho nenechávejte spadnout na zem, zacházejte s ním přiměřeným způsobem. Jenom tak je zaručena trvalá funkce.
- ☞ Připojovací konektor během jízdy nevytahujte.
- ☞ Tlačítko ZAP/VYP se za jízdy smí použít pouze v případě nouze.
 - Elektrický vozík se tím vyřadí z provozu (nouzové brzdění).

PŘEHLED


Ovládací modul LiNX REM215

- (1) Joystick
- (2) Ovládací panel
- (3) Zdíčka pro nabíjení baterií

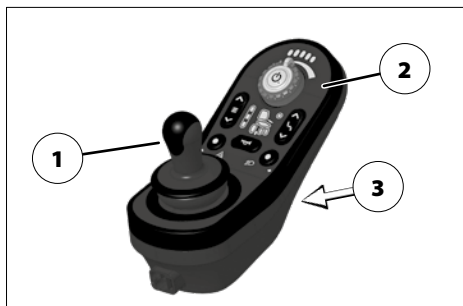


Ovládací panel, tlačítka

- (4) Blikač levý zap/vyp a výstražné blikání zap/vyp
- (5) Jízdní profil
- (6) Ovládací modul ZAP/VYP
- (7) Předvolba maximální rychlosti
- (8) Stavěcí funkce
- (9) Zvuková signalizace
- (10) Blikač pravý zap/vyp a světlo zap/vyp

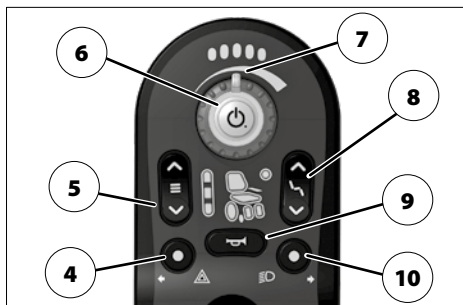





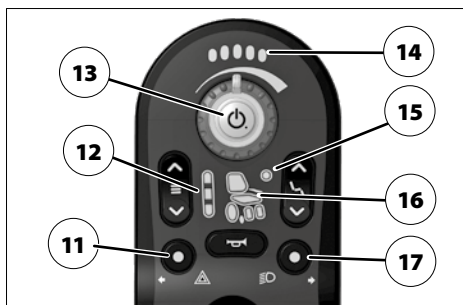



Kontrolka LED




- (11) Ukazatel levého blikače / výstražného blikání
- (12) Ukazatel jízdního profilu
- (13) Indikátor stavu ovládacího modulu
- (14) Indikátor stavu nabití baterie
- (15) Žádná funkce
- (16) Indikátor jízdy a ukazatel zvolené stavěcí funkce
- (17) Ukazatel pravého blikače / výstražného blikání / světla



TLAČÍTKA A SYMBOLY

	ZAP / VYP	Při stisknutí tlačítka se vypne či zapne ovládací modul.
		<ul style="list-style-type: none"> ☞ Při zapnutí provede elektronika test systému. ☞ Při poruchách bliká tlačítko Zap/Vyp. – Řiďte se pokyny v kapitole <i>Diagnostika poruch</i> auf Seite 20.
	Houkačka	Po dobu stisknutí tlačítka zní zvukový signál.
	Max. předvolba rychlosti < Plus >.	Otáčením stavěcího kolečka doprava zvýšíte maximálně dosažitelnou konečnou rychlost. <ul style="list-style-type: none"> ☞ Z bezpečnostních důvodů doporučujeme otáčet stavěcím kolečkem jenom tehdy, když vozík stojí.
	Max. předvolba rychlosti < Mínus >.	Otáčením stavěcího kolečka doleva snížíte maximálně dosažitelnou konečnou rychlost. <ul style="list-style-type: none"> ☞ Z bezpečnostních důvodů doporučujeme otáčet stavěcím kolečkem jenom tehdy, když vozík stojí.
	Výstražné blikání	Při krátkém stisknutí tlačítka se zapíná či vypíná výstražné blikání.
		<ul style="list-style-type: none"> ☞ Kontrolky pravého a levého blikače blikají v taktu blikačů.
	Blikač levý	Při dlouhém stisknutí tlačítka se vypne či zapne blikač.
		<ul style="list-style-type: none"> ☞ Kontrolka bliká v taktu s blikači. ☞ Blikač se samočinně vypne po 15 zablikáních. – Pokud ještě není zatáčen dokončené, blikač opět zapněte.
	Osvětlení	Při krátkém stisknutí tlačítka se zapne či vypne osvětlení.
		<ul style="list-style-type: none"> ☞ Kontrolka svítí, je-li osvětlení zapnuté.
	Blikač pravý	Při dlouhém stisknutí tlačítka se vypne či zapne blikač.
		<ul style="list-style-type: none"> ☞ Kontrolka bliká v taktu s blikači. ☞ Blikač se samočinně vypne po 15 zablikáních. – Pokud jste zatáčení ještě nedokončili, blikač opět zapněte.

TLAČÍTKA A SYMBOLY

	Přestavování	<p>Stisknutím tlačítka zapnete stavěcí funkce.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stisknutím horního tlačítka nebo pohybem joysticku doprava přejdete na další přestavování. ➤ Stisknutím dolního tlačítka nebo pohybem joysticku doleva přejdete na předchozí přestavování. ➤ Svítí kontrolka zvoleného přestavování. – Viz též kapitola <i>Stavěcí funkce</i> auf Seite 17.
	Jízdní profil	<p>Stisknutím tlačítka se zapne funkce jízdy. Při stisknutí tlačítka se přepíná mezi nastavenými jízdními profily.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Je možné volit různé jízdní profily. ➤ Stisknutím horního tlačítka přejdete na další jízdní profil. ➤ Stisknutím dolního tlačítka přejdete na předchozí jízdní profil. ➤ Kontrolky jízdního profilu zobrazují nastavený jízdní profil. – Řiďte se pokyny v kapitole <i>jízdní profil</i> auf Seite 19.
	Indikátor stavu nabití baterie	<p>S klesajícím nabitím baterie svítí odpovídající menší počet světelných segmentů indikátoru stavu baterie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Řiďte se pokyny v kapitole <i>Indikátor stavu baterie</i> auf Seite 13.

PŘÍPRAVA VOZÍKU K PROVOZU

Nabíjení baterie

Do nabíjecí zdičky nestrkejte žádné jiné předměty než konektor nabíječky baterie.

– Nebezpečí zkratu!




K nabíjení zasuňte konektor nabíječky baterií do nabíjecí zdičky ovládacího modulu (1) a potom zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

☞ Viz též < *Návod k obsluze elektrického vozíku* >.

☞ Probíhající diody [3] v *indikátoru stavu nabití baterie* (2) ukazují proces nabíjení jenom tehdy, když je zapnutý ovládací modul.

☞ Počet trvale svítících LED diod ukazuje stav nabití. – Viz kapitola *Indikátor stavu baterie* auf Seite 13.

☞ Nabíjecí zdičku před nabíjením a po něm zkontrolujte, jestli na ní není něco nápadného / nevykazuje změny.

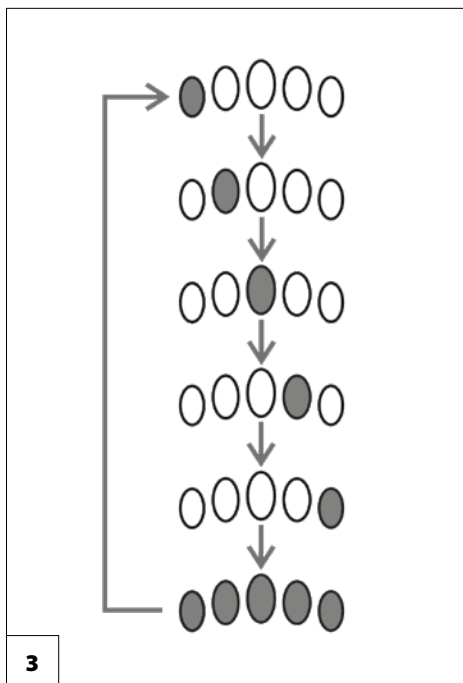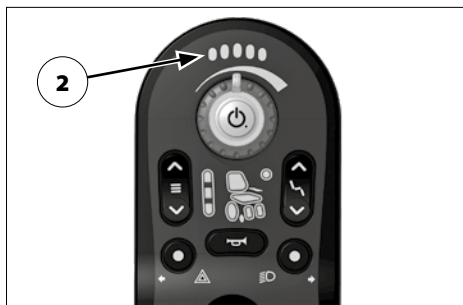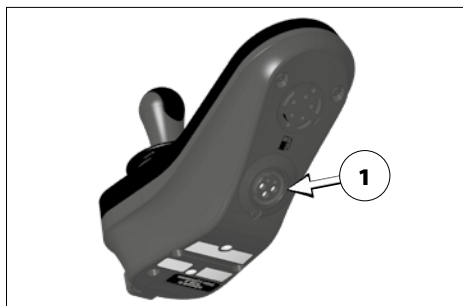

Zapnutí ovládacího modulu

Během fáze zapínání trvající cca 1 sekundu nehýbejte joystickem.


Při zapnutí se zobrazí naposled nastavená funkce.

K zapnutí ovládacího modulu stiskněte tlačítko ZAP/VYP (1). Elektronika pak provede test systému.

Jakmile *indikátor stavu nabití baterie* (2) a ukazatel stavu tlačítka Zap/Vyp (1) trvale svítí, je elektronika připravená k použití.

- ☞ Blikající nebo probíhající diody v *indikátoru stavu baterie* (2) a blikající ukazatel stavu tlačítka Zap/Vyp (1) signalizuje různá chybová hlášení či informace.
 - Řiďte se pokyny v kapitole *Diagnostika poruch* auf Seite 20.

Po ukončení jízdy stisknutím tlačítka ZAP/VYP (1) ovládací modul vypněte. Tím se elektrický vozík vypne z provozu.

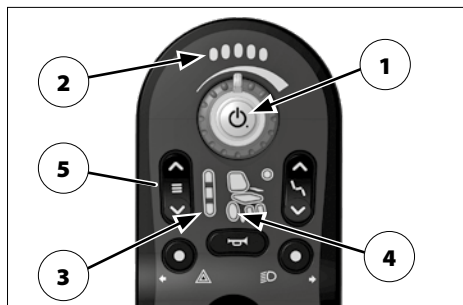

Režim jízdy

V režimu jízdy svítí ukazatel jízdního profilu (3) a symbol poháněcího kola (4) v symbolu vozíku.

- ☞ Viz kapitola *jízdní profil* auf Seite 19.

Elektrický vozík se ovládá joystickem.

- ☞ Řiďte se pokyny v kapitole *Joystick* auf Seite 16.

Zapnutí režimu jízdy


K zapnutí režimu jízdy stiskněte tlačítko *Jízdní profil* (5).

Imobilizér

K ochraně elektrického vozíku před použitím cizí osobou je možné uzamknout ho imobilizérem.

Imobilizér je zapnutý, jestliže:

Při zapnutí bliká pravá, levá a prostřední dioda LED *indikátoru stavu nabití baterie* (1).

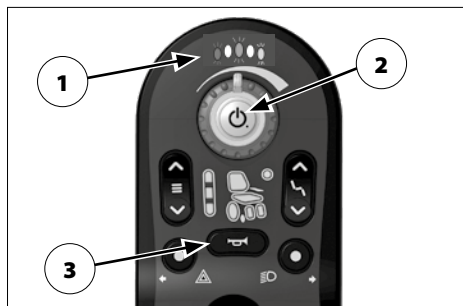

Zapnutí imobilizéru

Na zapnutém ovládacím modulu podržte tlačítko Zap/Vyp (2) stisknuté po dobu 4 sekund.

- ☞ K potvrzení krátce zabliká *indikátor stavu nabití baterie*.
- ☞ Elektronika zablokuje elektrický provoz a sama se vypne.


Vypnutí imobilizéru

1. Ovládací modul vypněte stisknutím tlačítka ZAP/VYP (2).
 - ☞ Během procesu odblokování bliká pravá, levá a prostřední dioda LED *indikátoru stavu nabití baterie* (1).
2. Během 10 sekund 2x stiskněte tlačítko klaksonu (3).
3. Elektrický vozík je opět připravený k provozu.

Doba automatického vypínání

Elektrický vozík disponuje dvoustupňovou dobou automatického vypínání, aby se ušetřil proud z baterie.

Pokud s joystickem během nastavené doby vypnutí nepohnete a ani nestisknete žádné tlačítko na ovládacím modulu, elektrický vozík se automaticky vypne.

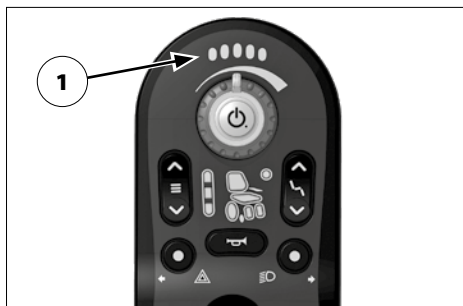

Stupeň 1:

- ☞ Doba automatického vypínání je standardně nastavena na 10 minut.
- ☞ V odborném servisu vám pomocí servisního programu mohou dobu vypnutí nastavit.
- ☞ Po dosažení doby vypnutí postupně zhasínají segmenty *indikátoru stavu nabití baterie* (1).
- ☞ Akcí na ovládacím modulu (stisknutí tlačítka nebo pohyb joysticku) startuje nastavená doba pro vypnutí znovu.

Stupeň 2:

Jestliže joystickem během 60 minut nepohnete ani nestisknete žádné tlačítko na ovládacím modulu, elektrický vozík se automaticky vypne.

- ☞ Vozík můžete znovu zapnout jenom stisknutím tlačítka Zap/Vyp (1).

KONTROLA PŘED JÍZDOU

Indikátor stavu baterie

S nenabitou baterií se může stát, že nedojedete do cíle vaší jízdy.

Při úplně vybité baterii není elektrický vozík schopný jízdy. – Vozíkem je možné pohybovat jenom postrkováním.

Po zapnutí ovládacího modulu proběhne test systému a indikátor stavu baterie (1) pak zobrazí stav nabití baterie.

S klesajícím nabitím baterie svítí méně diod LED indikátoru baterie.

- ☞ Indikátor baterie sestává z 5 segmentů, které zleva doprava tvoří 1 červená, 2 oranžové a 2 zelené LED diody.

Barvy segmentů znamenají:


Zelená	Baterie nabitě
Oranžová	Doporučuje se dobití
Červená	Baterie vyčerpané, dobijte

- ☞ Přesná indikace stavu baterie je možná pouze při jízdě po rovné dráze.
- ☞ Jízda do kopce či z kopce zobrazený údaj zkresluje.

Vyhodnocení

Zobrazení stavu nabití baterie odpovídá charakteristice vybíjení námi dodávaných baterií. Jiné typy baterií nebo baterie jiných výrobců mohou vykazovat odlišné charakteristiky a tím snižovat přesnost indikace.

Přesnost kromě toho závisí na teplotě baterie, jejím stáří a zátěži a je proto do určité míry omezená.

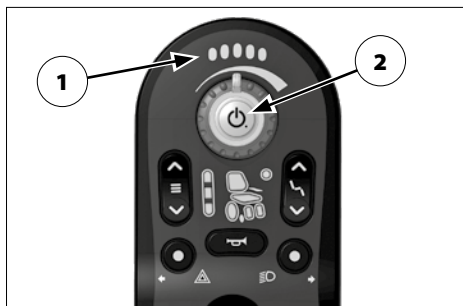


Předvolitelná maximální rychlost

Nebezpečí úrazu v důsledku:

- nepřiměřené předvolby stupně rychlosti!
- přepnutí na jiný rychlostní stupeň za jízdy!

Rychlostní stupeň zvolte v závislosti na osobních zkušenostech s danou jízdni situací!

Při jízdách z kopce je třeba rychlost přizpůsobit spádu. Přípustnou maximální rychlost nikdy nepřekračujte. – Nebezpečí úrazu!

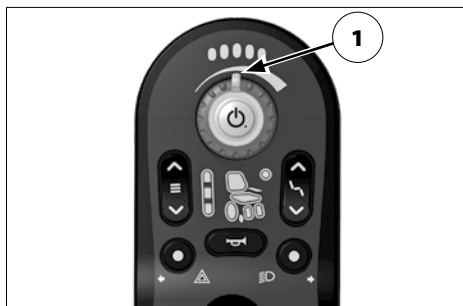

Po zapnutí ovládacího modulu je zadaná předvolená maximální rychlost.

Otáčením stavěcího kolečka (1) před jízdou nebo za jízdy předvolitelnou maximální konečnou rychlost zvýšíte nebo snížíte.

- ☞ Otáčením doprava maximální dosažitelnou konečnou rychlost zvýšíte.
- ☞ Otáčením doleva maximální dosažitelnou konečnou rychlost snížíte.
- ☞ Viz též kapitola *Tlačítka a symboly* auf Seite 7.

V poloze [1] stavěcího kolečka činí max. konečná rychlost 100% max. možné maximální rychlosti vašeho elektrického vozíku.

V poloze [2] stavěcího kolečka činí max. konečná rychlost 20 % max. možné maximální rychlosti vašeho elektrického vozíku..

1. Příklad situace:

Jízda přes křižovatku.

Potřebné nastavení: předvolba vysoké rychlosti [1].

👉 Následek příliš nízké volby:

Vozík neprojde křižovatkou dostatečně plynule. – Nebezpečí úrazu způsobeného přijíždějícími vozidly!

2. Příklad situace:

Jízda v bytě.

Potřebné nastavení: předvolba nízké rychlosti [2].

👉 Následek příliš vysoké volby:

Malé vychýlení joysticku způsobí rychlý rozjezd. – Uživatel ztrácí v těsném obytném prostoru kontrolu nad vozíkem. – Nebezpečí úrazu!



JOYSTICK

Joystickem pohněte až tehdy, když indikátor stavu baterie (2) trvale svítí.

Možné nebezpečí skřípnutí při vychýlení joysticku mezi manžetou (3) a ovládacím modulem.

Jízda a řízení

Joystickem (1) se elektrický vozík zrychluje a brzdí. Pohybujte joystickem pomalu v požadovaném směru jízdy.

Čím více joystick vychýlíte ze středové polohy, tím rychleji (až po nastavenou maximální rychlost) elektrický vozík pojede.



Současné vychýlení joysticku do strany vyvolá jízdu do zatáčky. Jestliže joystick vychýlíte jenom do strany, otáčí se vozík skoro na místě.

☞ Při couvání nebo jízdě do zatáčky se rychlost automaticky sníží.

Zabrdění elektrického vozíku

Elektrický vozík se zastaví, když pustíte joystick.

K postupnému zabrdění vedte joystick pomalu zpět do středové polohy (nulová poloha).

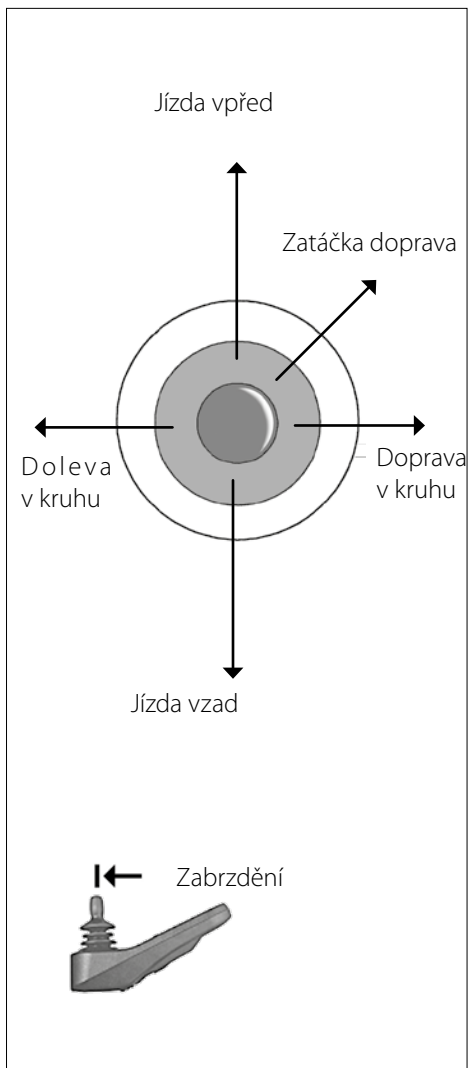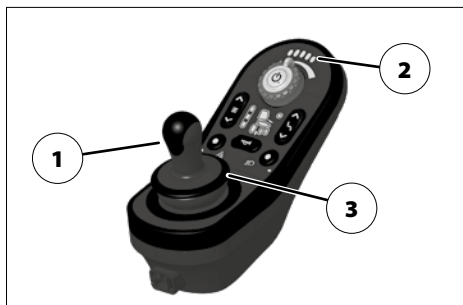

STAVĚCÍ FUNKCE

Na ovládacím modulu [1] můžete zvolit volitelné elektrické stavěcí funkce.

Volitelné stavěcí funkce se řídí podle dané výbavy elektrického vozíku.

Zapnutí režimu přestavování

Tlačítko pro < stavěcí funkce > použijte pouze v klidovém stavu elektrického vozíku.

Stiskněte horní nebo spodní tlačítko pro stavěcí funkce (2).


- ☞ Svítící symbol v symbolu vozíku (3) ukazuje zvolenou stavěcí funkci.
- ☞ Jestliže bliká symbol v symbolu vozíku a současně také symbol poháněcího kola, je aktivní automatické snižování rychlosti.
- ☞ Jestliže se v ukazateli rychlosti ukáže probíhající světlo, byl aktivován automatický imobilizér. – Viz též kapitola *Zobrazení informací pomocí indikátoru stavu baterie* auf Seite 22.

Volba elektrického přestavení

Po stisknutí horního či dolního tlačítka pro stavěcí funkce nebo pohybem joysticku doprava nebo doleva přejdete na další funkci.

Nastavení elektrického přestavení

- ☞ joystick dopředu – přestavení směrem k základní poloze,
- ☞ joystick dozadu – přestavení ze základní polohy.
- ☞ Při puštění joysticku se proces přestavování přerušuje.

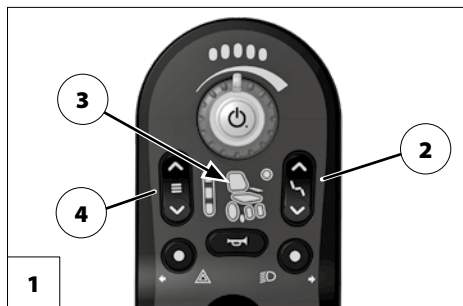

Zobrazený symbol znamená:



Zádová opěra



Nespecifikováno



Podnožka vlevo



Podnožka vpravo



Obě podnožky



Výška sedu



Záda a obě podnožky

Zobrazený symbol znamená:




Sklon sedačky

Vypnutí režimu přestavování

Stiskněte horní nebo dolní tlačítko pro *elektrický provoz* (1).

- ☞ Symbol zvolené stavěcí funkce zhasne.
- ☞ Elektrický provoz je opět aktivní. – Viz kapitola *Režim jízdy* auf Seite 10.

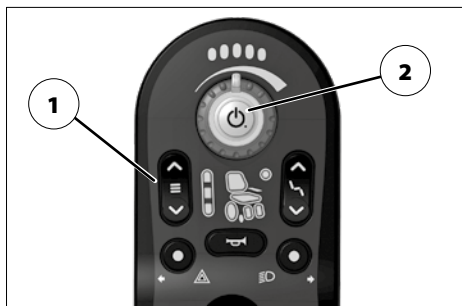

INDIVIDUÁLNÍ FUNKCE / NASTAVENÍ

☞ U vašeho individuálního elektrického vozíku případně nemusí být k dispozici všechny zde popsané funkce.


jízdní profil

Stisknutím tlačítka < Jízdní profil > (1) je možné zvolit až tři jízdní programy.

Díky rozdílným vlastnostem jízdních programů je možné jízdní vlastnosti elektrického vozíku kdykoli nastavit pro daný případ použití.

Například lze vyvolat samostatné programy pro používání speciálních ovládaní.

☞ Aktuální jízdní program ukazuje příslušný rozsvícený světelný segment (2).

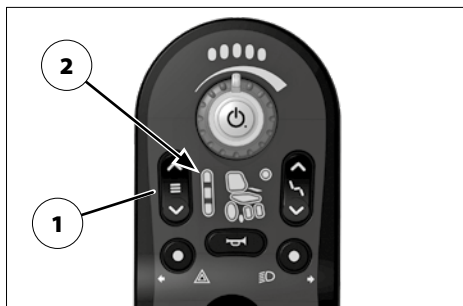

Jízdní program	Rozsvícený segment	Vlastnost
1		Univerzální, pro maximální rychlost jízdy 1-3 km/h
2		Univerzální, pro maximální rychlost jízdy 2-6 km/h
3		Univerzální, pro maximální rychlost jízdy 4-10 km/h

Vlastnosti těchto jízdních programů nastavených z výroby naleznete v příslušném < Servisním návodu >.

☞ Řiďte se zde pokyny v návodu k obsluze vašeho elektrického vozíku v kapitole < Upozornění pro prodejce >.

DIAGNOSTIKA PORUCH

Poruchy indikuje blikání indikátoru stavu tlačítka Zap/Vyp (1).


Zobrazení poruchy indikátorem stavu tlačítka Zap/Vyp

V případě *poruchy* se elektrický vozík pro jistotu zastaví a bliká indikátor stavu tlačítka Zap/Vyp (1). Počet bliknutí ukazuje možný zdroj závady.

K odstranění poruchy postupujte v principu takto:

1. Vypněte ovládací modul.
2. Provedte akci uvedenou ve sloupci *Odstranění*.
3. Vypněte ovládací modul.

☞ Řiďte se pokyny v kapitole *Zapnutí ovládacího modulu* auf Seite 10.

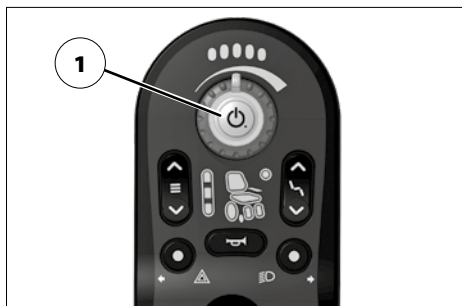


☞ Jestliže není možné poruchu odstranit a elektrický vozík dále provozovat, obraťte se na odborný servis.





Porucha	Příčina	Odstranění
1 bliknutí	Chyba ovládacího modulu nebo joysticku.	Zkontrolujte kabel a připojovací konektor. Nechte vyměnit ovládací modul.
2 bliknutí	Chyba sítě nebo konfigurace.	Zkontrolujte kabel a připojovací konektor. Zkontrolujte spojení bluetooth. Nabijte baterie. Zkontrolujte nabíječku.
3 bliknutí	Porucha na levém motoru.	Zkontrolujte připojovací kabel a konektor motoru i samotný motor.
4 bliknutí	Porucha na pravém motoru.	Zkontrolujte připojovací kabel a konektor motoru i samotný motor.


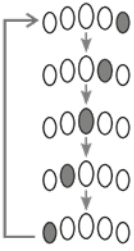
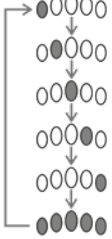

Porucha	Příčina	Odstranění
5 bliknutí	Porucha na magnetické brz- dě levého motoru.	Páčku pro elektrický/mecha- nický provoz nastavte na elekt- rický provoz. Zkontrolujte přívodní kabely motoru, jestli nejsou poškoze- né.
6 bliknutí	Porucha na magnetické brz- dě pravého motoru.	Páčku pro elektrický/mecha- nický provoz nastavte na elekt- rický provoz. Zkontrolujte přívodní kabely motoru, jestli nejsou poškoze- né.
7 bliknutí	Vadná elektronika nebo chy- ba systému.	Zkontrolujte kabel a připojova- cí konektor. Nabijte baterie.

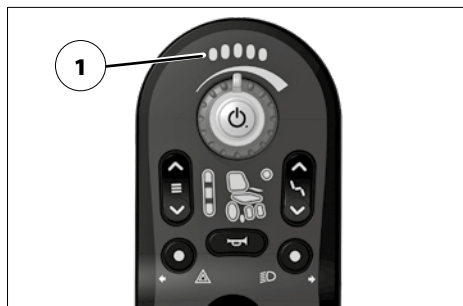Zobrazení informací pomocí indikátoru stavu baterie

Pro informaci *blikají* světelné segmenty indikátoru baterie (1).





Informace	Příčina	Odstranění
<p>Levý světelný segment bliká.</p> 	Baterie je vybitá.	<p>Baterie co nejrychleji nabijte.</p> <p>☞ Elektrický vozík je ještě schopný jízdy.</p>
<p>Levý světelný segment a indikátor stavu tlačítka Zap/Vyp blikají.</p> 	Baterie je vybitá.	<p>Baterie urychleně nabijte.</p> <p>☞ Elektrický vozík je ještě schopný jízdy.</p>
<p>Levý světelný segment a indikátor stavu tlačítka Zap/Vyp blikají a každých 10 sekund zazní zvukový signál.</p> 	Bylo dosaženo vypínacího napětí baterie.	<p>Baterie urychleně nabijte.</p> <p>☞ Elektrický vozík už nebude dlouho schopný jízdy.</p>
<p>Oba pravé světelné segmenty blikají.</p> 	Napětí v baterii je příliš vysoké (jízda z kopce).	Jed'te z kopce jenom velmi pomalu a případně zkontrolujte přípojky baterie.

Informace	Příčina	Odstranění
<p>Všechny světelné segmenty a symbol poháněcího kola blikají.</p> 	<p>Joystick byl vychýlen příliš brzy.</p>	<p>Pustte joystick.</p>
<p>Probíhající světlo</p> 	<p>Imobilizér je aktivní.</p>	<p>Nabíječku odpojte od nabíjecí zdířky. Elektrické přestavení nastavte do základní polohy.</p> <p>☞ Elektrický vozík není schopný jízdy.</p>
<p>Probíhající světlo</p> 	<p>Baterie se nabíjejí.</p>	<p>Nabíjení pokud možno nepřerušujte.</p> <p>☞ Počet trvale svítících segmentů ukazuje stav nabití.</p>
<p>Pravá, levá a prostřední LED blikají.</p> 	<p>Imobilizér je aktivní.</p>	<p>☞ K vypnutí se řiďte pokyny v kapitole <i>Vypnutí imobilizéru</i> auf Seite 11.</p>

Zobrazení informací pomocí ukazatele předvolby rychlosti

Pro informaci blikají světelné segmenty v symbolu vozíku (1).

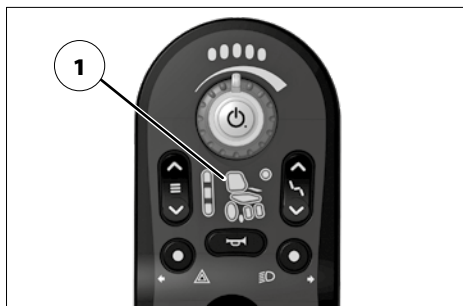

Informace	Příčina	Odstranění
Pomalou blikající symbol stavěcích funkcí a bliká symbol poháněcího kola.	Automatické snížení rychlosti je aktivní.	Elektrické přestavení nastavte do základní polohy.  Elektrický vozík je připravený k jízdě.

ÚDRŽBA

Opravy

Za účelem oprav se s důvěrou obraťte na svého prodejce. V provádění prací se vyzná a má školený personál.

Servis

Pokud byste měli dotazy nebo potřebovali pomoc, obraťte se na svého prodejce, který může převzít poradenství, servis a opravy.

Bezpečnostně technické kontroly

Elektronický systém během provozu provádí neustálé kontroly. K doplnění těchto elektronických bezpečnostních opatření musí pravidelné kontroly provádět také uživatel. Jestliže se při některé z těchto kontrol vyskytne něco neobvyklého, nechte elektrický vozík ihned zkontrolovat u svého prodejce.

Denní kontroly

Zkontrolujte ovládací modul a s ním spojené elektrické komponenty, zda nejsou poškozené a jsou správně připevněné k vozíku.

Vypněte ovládací modul a zkontrolujte nepoškozenost joysticku a manžety okolo něj a ověřte, jestli se joystick ze všech poloh sám a lehce vrací zpět do středové polohy.

Týdenní kontroly

Funkce joysticku v kombinaci s magnetickou brzdou: před touto kontrolou zajistěte dostatečný volný prostor minimálně 1 metr okolo elektrického vozíku.

Zapněte ovládací modul a počkejte, dokud indikátor stavu baterie svými kontrolkami nezobrazí připravenost k provozu. Nyní pomalu vychylte joystick dopředu, až brzdový systém slyšitelně zareaguje (cvaknutí). Elektrický vozík se pomalu rozjede. Nyní joystick okamžitě zase pusťte. Brzdový systém nyní musí během několika málo sekund opět slyšitelně zareagovat. Stejnou kontrolu proveďte pro směr jízdy doprava, doleva a pro couvání.

Zkontrolujte vnější poškození a řádné připevnění všech kabelů a konektorů.

Roční kontroly

V rámci roční údržby elektrického vozíku nechte zkontrolovat elektronický systém u svého prodejce.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Okolní teplota	-25 °C až +50 °C
Teplota skladování	-40 °C až +65 °C
Vlhkost vzduchu	0 – 90% rel. vlhkosti
Třída krytí	IPx4
Hmotnost	cca 400 g

RUČENÍ / ZÁRUKA

Nerespektování návodu k obsluze, neodborně prováděná údržba a zejména technické změny a doplňky (nástavby) bez našeho souhlasu vedou k zániku jak záručních nároků, tak k ručení za výrobek všeobecně.

Za tento výrobek přebíráme v rámci našich všeobecných obchodních podmínek zákonnou záruku a případně vyslovená či dohodnutá ručení. V případě záručních nároků se s níže uvedeným ZÁRUČNÍM KUPÓNEM s vyplněnými potřebnými údaji o označení modelu, čísle dodacího listu s datem dodávky a sériovým číslem (SN) obraťte na vašeho prodejce.

Sériové číslo (SN) naleznete na typovém štítku.

-  Další záruční podmínky najdete v našem návodu k obsluze elektrického vozíku.



Tento výrobek splňuje ve spojení s elektrickým vozíkem požadavky nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

Záruční kupón

Vyplňte prosím! V případě potřeby zkopírujte a kopii pošlete vašemu prodejci.

Ručení / Záruka

Označení modelu:

Č. dodacího listu:

SN (viz typový štítek):

Datum dodávky:

Razítko prodejce:

Váš prodejce

Výrobce:

Dynamic Europe Limited

Unit 7, Finepoint Way
Kidderminster DY11 7FB
Worcestershire
VELKÁ BRITÁNIE

Distributor:

MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf
NĚMECKO



Tel +49 5733 922 - 311
Fax +49 5733 922 - 9311



info@meyra.de

www.meyra.de