

PODMÍNKY UŽITÍ

Výstupní kontrola:

Jméno:

Podpis:

Identifikační štítek / Typ výrobku (vypsat):

Podmínky užití:

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
2. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce neodpovídá.
3. Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k použití.
4. Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za závady vzniklé následkem dalšího používání výrobku, aniž by původní závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel.
5. Reklamacce musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobek zakoupen. Uplatnění reklamacce se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR.
6. Při uplatnění reklamacce musí uživatel nezpochybnitelně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek zakoupil. Pro urychlení vyřízení reklamacce se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplněný poslední list návodu podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží.
7. Výrobce opatřuje výrobek identifikačním štítkem. Jsou-li údaje na identifikačním štítku nečitelné, či chybí-li úplně, může být uživatel vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.
8. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno pečlivě zabalené a zajištěné proti poškození. Velmi vhodné je zboží zaslat v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží vzniklého při jeho zaslání výrobce neodpovídá. Majitel je povinen předložit reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné, dle obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby v průběhu reklamačního řízení za něj byla provedena základní údržba nebo čištění výrobku.
9. Uplatnění práva z vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním, zejména na znečištění, opotřebení, či poškození potahu, plastových dílů, opotřebení brzd, opotřebení dezénu či defektu pneumatik. Uplatnění práva z vady také pozbývá platnosti, byly-li závady způsobeny nedovoleným pretěžováním, nehodou, mechanickým poškozením, násilím nebo neodborným zásahem do výrobku či neodborným zacházením s ním.
10. Technické řešení podvozku nezaručuje ideální vedení stopy, proto tato skutečnost nemůže být předmětem reklamacce.
11. Dobu uplatnění práva z vady nelze zaměňovat s užitnou dobou, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování, včetně údržby, lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat.

Datum prodeje (den, měsíc, rok):

Jméno (hůlkově), telefon, razítko a podpis prodejce:

____. ____ . ____

patron®

NÁVOD K POUŽITÍ

Příslušenství CORZO, CORZINO, PIPER



Výrobce: PATRON Bohemia a.s., Českolipská 3419, 276 01 Mělník, Česká republika
tel.: 315 630 120 / fax: 315 630 199
<http://www.patron.eu> / email: reha.cz@patron.eu

Stříška proti slunci

Nasazení:

Úchyty střechy zasuňte do držáků střechy (viz.detail). Boční díly potahu stříšky zapněte pomocí plastových objímek na podvozku, případně odepněte pomocí zipů a uložte do síťové kapsy. Střechu můžete polohovat zatlačením na rám střechy.

Odejmutí:

Zmáčkněte pojistky obou úchytů střechy a vytáhněte úchyty střechy z držáků střechy. V případě použití bočního potahu odepněte plastové objímky z podvozku.



Abdukční klín

Průvlečnou sponu, která je našitá ve spodní části klínu, provlékněte jedním ze dvou otvorů na sedáku a ještě klín upevněte pomocí suchých zipů (jezdec zipu směřuje ven).



Opěrka hlavy nastavitelná

kód VZP 06 62120

Rozepněte pětibodový bezpečnostní pás, posaďte dítě do kočárku a zjistěte vyhovující výšku opěrky hlavy. Vyndejte dítě z kočárku. Opěrku hlavy přiložte v požadované výšce k zadové opěrce:

nejvyšší poloha: - kratší spodní suché zipy provlékněte vrchními oky na zadové opěrce a delší horní suché zipy přeložte přes horní hranu zadové opěrky. Zipy na zadní straně zadové opěrky zapněte. Opěrku hlavy nakonec zajistěte pomocí bočních zipů na zadní straně zadové opěrky.

nižší polohy: - kratší spodní suché zipy provlékněte dle vyhovující výšky oky zadové opěrky a delší horní suché zipy provlékněte oky zadové opěrky nad provlečenými kratšími spodními zipy. Zipy na zadní straně zadové opěrky pomocí suchých zipů zapněte. Opěrku hlavy nakonec pomocí bočních zipů na zadní straně zadové opěrky zajistěte.

šířka opěrky: - před nasazením opěrky hlavy k zadové opěrce lze nastavit dvě polohy šířky opěrky. Na spodních pásech polštářů rozepněte autopatenty a vyvlékněte polštáře z bočních popruhů. Otočte je o 180° a znovu je zpět navlékněte na boční popruhy. Nakonec polštáře pomocí autopatentů na spodních pásech zapněte.



ÚDRŽBA

- doplňky mohou být opravovány jen zaměstnanci servisních středisek firmy PATRON Bohemia a.s
- k opravám mohou být použity jen náhradní díly dodávané firmou PATRON Bohemia a.s.
- ujistěte se, že jste dobře obeznámeni s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití
- všechny doplňky lze čistit otíráním vlhkým hadrem, nastavitelné opěrky hlavy, nastavitelnou opěrku boční, abdukční klín, fixační vestu, fixaci ramen a hrudníku lze případně vyprat v pračce při teplotě do 30°C na jemný program
- nikdy doplňky nečistěte prostředky na bázi amoniaku, bělidly a lihovými čistidly
- v případě že byly doplňky vystaveny vlhkému prostředí, nechte je v teple uschnout
- doplňky ukládejte na teplém a suchém místě

Opěrka hlavy jednodílná s boční fixací

Kód VZP 07 19256

Rozepněte pětibodový bezpečnostní pás, posaďte dítě do kočárku a zjistěte vyhovující výšku opěrky hlavy. Vyndejte dítě z kočárku. Navlékněte gumy na opěradlo přes vodítka, pokud to nejde, je potřeba kočárek povolit. Opěrku hlavy přiložte v požadované výšce k zádové opěrce. Nejvyšší poloha - delší spodní suché zipy hrubě provlékněte vrchními oky na zádové opěrce a kratší suché zipy jemně přeložte přes horní hranu zádové opěrky. Suché zipy na zadní straně zapněte. Nižší poloha - delší spodní suché zipy provlékněte ve vyhovující výšce oky na zádové opěrce a kratší horní suché zipy rovněž provlékněte oky. Suché zipy na zadní straně zapněte.



Stehenní fixace

Nasazení - pás upevněte k sedáku pomocí popruhů se suchým zipem. Popruhy přiložte na přední část sedáku a na spodní straně sedáku je zapněte pomocí suchých zipů. Stehna upevněte do poutacího pásu pomocí popruhu se suchým zipem, který provlékněte kovovou sponou a zajistěte suchým zipem. Dbejte na to, aby nohy dítěte byly dostatečně fixovány, ale ne příliš staženy.



Pás nožní poutací

kód VZP 07 62122

Nasazení - pás upevněte ke stupačce pomocí popruhů se suchým zipem. Popruhy provlékněte otvory ve stupačce a na spodní straně stupačky je zapněte pomocí suchých zipů. Kotníky upevněte do poutacího pásu pomocí popruhu se suchým zipem, který provlékněte kovovou sponou a zajistěte suchým zipem. Dbejte na to, aby nohy dítěte byly dostatečně fixovány, ale ne příliš staženy.

Opěrka boční nastavitelná

kód VZP 06 62121

Rozepněte pětibodový bezpečnostní pás, posaďte dítě do kočárku a zjistěte, v jaké výšce by měla být boční opěrka upevněna. Vyndejte dítě z kočárku. Boční opěrku přiložte ve vyhovující výšce k zádové opěrce a zajistěte ji vzadu, zapnutím bočních pásů s plastovými trojzubci (detail) na zadní straně zádové opěrky. Pětibodový bezpečnostní pás musí být uvnitř boční opěrky. Poté boční opěrku se suchým zipem vpředu rozepněte, usad'te dítě do kočárku, zapněte pětibodový bezpečnostní pás a nakonec boční opěrku pomocí suchého zipu zapněte tak, aby dítě dostatečně fixovala, ale nikde ho neškrtla.



Fixace ramen a hrudníku

kód VZP 07 62235

Nasazení - z horních popruhů vyvlékněte spony žebříček a popruhy provlékněte oky na zádové opěrce, dle požadované výšky. Na zadní straně zádové opěrky spony žebříček opět na horní popruhy navlékněte. Spodní popruhy protáhněte kotvou na boku a zajistěte pomocí průvlečných spon (viz. detail)

Nastavení a manipulace - rozepněte aktovkové zámky a odklopte fixaci. Posaďte dítě do kočárku, nasad'te fixaci a zapnutím aktovkových zámků dítě zajistěte. Pomocí průvlečných spon a spony žebříčku nastavte požadovanou délku popruhů tak, aby dítě dostatečně fixovala, ale nikde ho neškrtla. Další manipulaci s fixací provádějte pomocí plastových aktovkových zámků.



detail



Z této strany je popruh přišitý.



Flexi sada PIPER

Sada polštářků umožňuje různé nastavení šíře sedačky. Připevněte pomocí suchých zipů.

Fixace ramen a hrudníku PIPER

Posaďte dítě do kočárku, dle výšky ramen dítěte, protáhněte ramenní pásy otvorem potahu a při nízké velikosti ramen dítěte, protáhněte pásy pod potahem až nahoru k otvoru v zádové opěrce a prostrčte sponu ramenních popruhů otvorem ze spod zádové opěrky. Spodní pásy protáhněte ve spodním rohu sedačky a provlékněte okem. Zajistěte pomocí suchých zipů.



Náložník letní PIPER

Náložník umístěte na sedačku, připněte pomocí autopatentů ke stříšce. Spodní část náložníku provlékněte na straně podnožky pomocí suchých zipů. Dle potřeby upravte náložník na dvě velikosti pomocí zipu.



Područka odklopná

Uvolněte potah opěrky a odepněte. Přiložte na područku pěnový váleček. Skrz trubku a ocelový kroužek na potahu protáhněte šroub, na něj nasad'te područku. Na šroub nasad'te podložku našroubujte maticku, řádně utáhněte. Potah upevněte zpět. Postup opakujte i u druhé područky.



Podnožka dělená odklopná

Uvolněte páčky na podnožce které se nachází na vnitřní straně držáku podnožky. Vysuňte podnožku směrem dolů. Dělenou podnožku nasuňte do držáků na levé i pravé straně a utáhněte páčky.



Redukční vložka PIPER

Nasazení: Odepněte ramenní popruhy 5ti-bodového pásu pomocí karabin, vložte redukční vložku do sedačky a provlékněte ramenní popruhy otvory v redukční vložce dle výšky dítěte a boční popruhy protáhněte v dolní části na stranách redukční vložky.

Redukční vložku zajistěte pásem v horní části opěradla. Zajistěte ramenní popruhy pomocí karabin do 5ti-bodového pásu a pás zapněte.

Dle potřeby je možné odejmout boční vymezení a vmezovací polštářky.

Sejmutí: Pro sejmutí redukční vložky postupujte opačným způsobem.



Vesta fixační

kód VZP 07 62123


Nasazení - z horních popruhů vyvlékněte spony žebříček a popruhy provlékněte oky na zadové opěrce, dle požadované výšky. Na zadní straně zadové opěrky spony žebříček opět na horní popruhy navlékněte. Střední pásy vesty provlékněte kolem zadové opěrky a zapněte do plastové brzdy

Spodní pásy upevněte a provlékněte kotvou kočárku na boční straně a zajistěte sponou průvlečnou (viz. Detail).

Nastavení a manipulace - rozepněte zip vesty a v případě potřeby rozepněte i plastové zámky umístěné na přední straně vesty.

Posadte dítě do kočárku, zapněte zip vesty, případně plastové zámky na přední straně vesty, nastavte délku všech pásků tak, aby vesta dítě dostatečně fixovala, ale nikde ho neškrtila. Další manipulaci provádějte pomocí zipu a plastových zámků na přední straně vesty.

detail

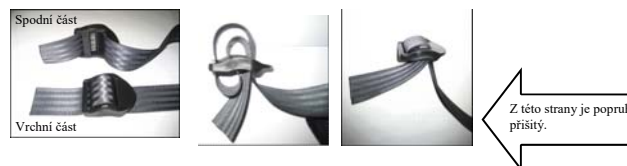

Stříška Classic PIPER

Nasazení:

Úchyty stříšky provlékněte otvory v potahu a zajistěte přes rám podvozku. Zadní díl stříšky zapněte pomocí autopatentů na stranách k potahu kočárku.

Odejmutí:

Pro odejmutí stříšky postupujte opačným způsobem.



Opěrka hlavy nastavitelná PIPER

Opěrku hlavy přiložte v požadované výšce k zadové opěrce a zajistěte suchým zipem na zadní straně zadové opěry. Pro nižší pozici opěrky prostrčte pásy otvory na potahu a opěrku hlavy nakonec zajistěte pomocí suchých zipů na zadní straně zadové opěrky.



Vymezení boční s výztuhou

Příslušenství přiložíme k opěradlu kočárku na suché zipy, v horní části zajistíme pomocí spony průvlečné v knoflíkové dírcce potahu kočárku. Spodní část obepneme kolem konstrukce područky a zajistíme suchými zipy.



Potah komfort

Vyvlékněte ramenní pásy pětibodového bezpečnostního pásu z ok na zádové opěrce a rozepněte hlavní velkou sponu pětibodového bezpečnostního pásu. Pokud na kočárku je zadní zádová rozpěra, pro lepší manipulaci ji povolte. Horní část potahu komfort přiložte k zádové opěrce, klopu překlopte přes horní hranu zádové opěrky a horní část potahu komfort zapněte pomocí suchého zipu. Potah komfort v horní části na zadní straně zádové opěrky zajistěte zapnutím horních bočních pásů s kovovými sponami. Střední boční popruh s kovovými sponami lze výškově nastavit dle potřeby tak, že popruh protáhnete dle požadované výšky tunýlkem na zadní straně potahu. Do koženkového pásu na sedací části potahu komfort vyřízněte dle umístění mezi nožního pásu otvor, otvorem potahu komfort protáhnete oko mezi nožní části pětibodového bezpečnostního pásu. Pás musí být protažený i sedákem potahu CORZO a výztuhou sedáku. Spodní část potahu komfort překlopte přes hranu sedáku a popruhy se suchým zipem podvlékněte pod potah a zajistěte suchým zipem. Střední boční popruh pomocí kovových spon a suchého zipu na zadní straně zádové opěrky zajistěte. Na konec zpět provlékněte ramenní pásy pětibodového bezpečnostního pásu otvory potahu komfort a rovněž oky zádové opěrky.



Náložník letní

Náložník v horní části připevněte na trubičky, které na zadní straně vypínají potah, pomocí plastových objímek. Ve spodní části náložníku jsou na každé straně dva pásy, které pomocí suchých zipů připevněte na trubky podvozku.



Náložník zimní

Náložník umístěte na sedačku, horní popruhy zapněte pomocí suchých zipů v zadní části zádové opěrky. Spodní část náložníku připevněte na stupačku pomocí suchých zipů.



Kryt proti dešti

Kryt proti dešti natáhněte přes kočárek tak, aby kryl střechu kočárku i jeho podnožku. Skladujte čistý a suchý.



Košík pod kočárek - textilní

Vyšší čelo košíku pomocí pásků s autopatenty připevněte z vnější strany, nad podnožkou, na přední trubku podvozku. Nižší čelo košíku připevněte pomocí pásků s autopatenty z vnitřní strany na trubku sedáku - (zadní rám podvozku). Maximální nosnost košíku je 3 kg.

