

NÁVOD K POUŽITÍ

Pojízdný stolek RFM

01689593 / 07748658




Popis

Pojízdný stolek s nastavitelnou výškou a sklonem desky. Ocelový rám s nízkým podvozkem pasuje nejen k lůžkům, ale i k mnoha křeslům či židlím. 2 kolečka jsou vybavena brzdou.

Montáž

Pojízdný stolek sestavíte snadno v několika krocích.

Obr. 1

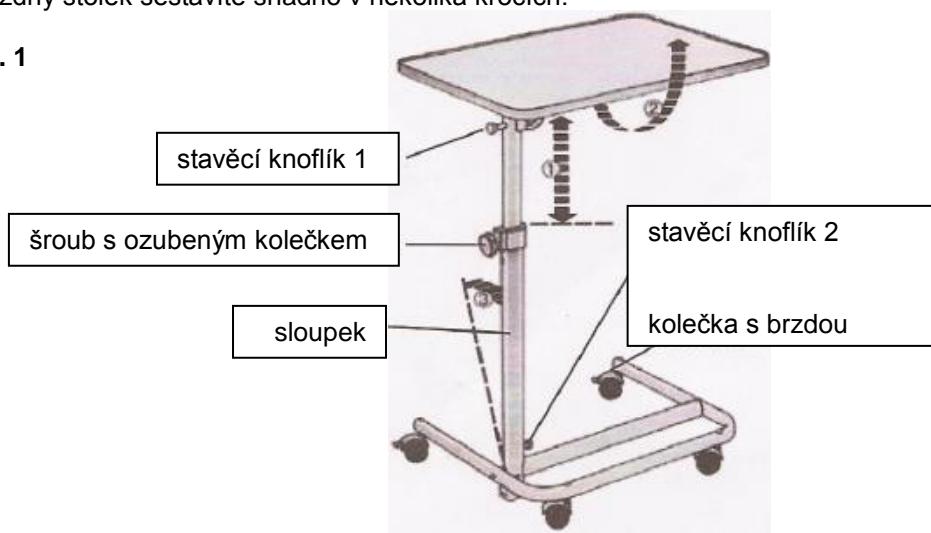

Obr. 2



Zatáhněte za stavěcí knoflík 1 nebo 2, abyste nastavili sklon desky stolku (knoflík 1) nebo sloupku (knoflík 2). Dbejte na to, aby stavěcí knoflík opět bezpečně zaskočil. Výšku desky stolku nastavíte po uvolnění šroubu s ozubeným kolečkem.

Jakmile vytáhnete desku stolku do maximální výšky, pružinové tlačítko zaskočí, k dalšímu nastavování musíte pružinové tlačítko zatlačit a současně nastavovat výšku stolku.

Dvě kolečka jsou vybavena brzdou. Sešlápnutím brzd se kolečka zabrzdí, jejím vytažením se opět uvolní.

Bezpečnostní pokyny

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je šroub s ozubeným kolečkem pevně utažený.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny upevňovací šrouby dobře utažené.
- Při velkém zatížení desky stolku hrozí nebezpečí převrácení. O stolek se neopírejte ani na něj nestoupejte. Nikdy nepřekračujte maximální nosnost 10 kg.
- Stolek používejte pouze na rovném povrchu.
- Výšku nastavujte pouze v případě, kdy na stolku nic není.
- Po umístění stolku do požadované pozice sešlápněte brzdy a nechte je zabrzděné po celou dobu stravování či provádění jiných úkonů.
- Nikdy stolek nepoužívajte, pokud je jakkoli poškozený nebo značně opotřebovaný.

Čištění

K čištění stolku můžete používat všechny čisticí prostředky vhodné k čištění plastových povrchů. Postupujte dle pokynů na prostředku.

K čištění nepoužívejte rozpouštědla jako aceton nebo benzín, ani žádné ostré/drsné pomůcky.

Technické údaje

Celková šířka:	61 cm	Nastavení výšky:	65 – 94 cm
Celková hloubka:	45 cm	Rozměr ve složeném stavu:	57 x 85 cm
Deska stolku:	62 x 41 cm	Nosnost:	10 kg
Hmotnost:	7,5 kg	Konstrukce:	ocel, plast

Údržba/servis:

Pravidelně kontrolujte stav stolku. S opravami se neváhejte obrátit na naše techniky.

Datum poslední revize: 02/2018

Výrobce:

Rehaforum MEDICAL GmbH
Daimlerstrasse 12a
D-25337 Elmshorn
www.rehaforum.com

DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
tel. (prodejna): +420 272 761 102
tel. (servis): +420 272 661 430
www.meyra.cz