

Rehabilitační madlo Qmed – ŽEBŘÍK

Praktické rehabilitační madlo usnadňuje zejména starším lidem zvedání se na lůžku. Jedná se o 4-stupňový žebřík vybavený příčkami zakončenými fosforeskujícími dílky, díky kterým lze žebřík snadněji vyhledat např. v noci za účelem změny pozice nebo jiného pohybu. Osoba ležící na lůžku má s pomocí žebříku více motivace pracovat na zvyšování svých fyzických schopností a tím posiluje svaly rukou a paží. Žebřík je vhodný pro jednolůžkové nebo dvoulůžkové postele.



Šňůru na konci žebříku upevněte na rám postele tak, aby žebřík byl pro pacienta na lůžku snadno dosažitelný.

- produkt je určen pro geriatrické pacienty a pacienty postižené paraplegií
- aktivace pacienta pro samostatnou péči
- profylaxe vzniku záchvatů
- počáteční fáze kinezioterapie zaměřená na posílení svalů horní části těla a břicha

Kontraindikace:

- nedostatečná úchopová síla
- nedostatečná svalová síla, nestabilita horních končetin a/nebo poškození kloubů horních končetin
- stavy po chirurgických operacích horních končetin před zahájením vlastního rehabilitačního procesu

Upozornění!

Při prvním použití žebříku by měl být pacient doprovázen ošetřovatelem a/nebo kvalifikovaným zdravotnickým personálem. V případě nežádoucích příznaků (např. porucha rovnováhy) by se pacient měl okamžitě vrátit do výchozí pozice.

Rozměry:

Délka příčky: 25 cm

Průměr příčky: 2,5 cm

Vzdálenost mezi příčkami: 19 cm

Délka provazu: 3 m

Maximální zatížení: 90 kg

VÝROBCE

mdh sp. z o.o.

ul. ks. W.Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

Poland

www.qmedplus.pl

DISTIBUTOR

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz

