


## Rehabilitační madlo Qmed – ŽEBŘÍK

Praktické rehabilitační madlo usnadňuje zejména starším lidem zvedání se na lůžku. Spodní konce šňůr se uvážou kolem nohou postele a uživatel může uchopit příčky plastového žebříku, aby se v posteli vytáhl pohybem ruky přes ruku. Plastové svítící prvky žebříku ve tmě usnadňují jejich nalezení pro přesun nebo změnu polohy.

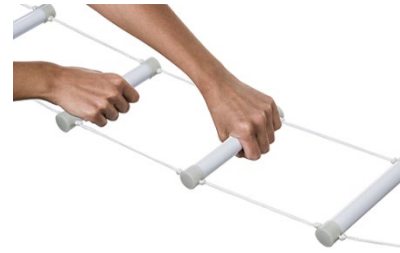

### Indikace:

- pomůcka je určena pro geriatrické pacienty a pacienty, kteří potřebují pomoci do polohy vsedě na lůžku
- navrženo pro zvýšení funkční nezávislosti
- součást rehabilitační terapie
- prevence dekubitů
- úvodní fáze fyzioterapie k posílení svalů horních a dolních končetin

### Kontraindikace:

- nerovnoměrná síla horních končetin a nestabilita kloubů horních končetin
- nedostatečná úchopová síla a stabilita
- kontraindikace polohy vsedě

### Upozornění!

Při prvním použití žebříku by měl být pacient doprovázen ošetřovatelem a/nebo kvalifikovaným zdravotnickým personálem. V případě nežádoucích příznaků (např. porucha rovnováhy) by se pacient měl okamžitě vrátit do výchozí polohy. Při používání žebříku s plastovými příčkami buďte opatrní, mohou být kluzké při držení.

### Údržba:

Otírejte vlhkým hadříkem s jemným čistícím prostředkem.

### Rozměry:

Délka příčky: 25 cm

Průměr příčky: 2,5 cm

Délka šňůry: 3 m

Maximální nosnost: 90 kg

Složení: plastová část 90% ABS (příčky), 10% PE (svítící hroty), šňůra 100% PP

Basic UDI-DI: 59017804DRQM6AN4

### VÝROBCE

mdh Sp. z o.o.

ul. Maratońska 104

94-007 Łódź, Polsko

tel. +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl

### DISTIBUTOR

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz

