


Držák hole

Kód 970

Montážní návod

VÝZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ

Barevně zvýrazněné bezpečnostní pokyny je bezpodmínečně nutné dodržet!

 Tento symbol znamená rady a doporučení

[] Odkaz na číslo obrázku.

() Odkaz na funkční prvek v obrázku.

ÚVOD

Montáž by měl provést specializovaný servis.
Před montáží si přečtěte tento návod a dbejte na doporučení.

OBSAH DODÁVKY (ZÁVISLÉ OD MODELU)

(1) 6x klip (2x Ø 22 mm; 1x Ø 25 mm; 1x Ø 28 mm;

1x Ø 32 mm; 1x držák vario desky)

(2) 1x poutko

(3) 1x vanička

(4) 1x šroubový držák

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


Vozík zaparkujte a zajistěte na vhodném místě.






Během celé montáže dávejte pozor na místa sevření
- nebezpečí skřípnutí!

MONTÁŽ

Poutko (2) připevněte pomocí upevňovacího šroubu zádového kurtu nebo zádové skořepiny v horní oblasti zádové trubky.

Vždy 2x klip (1) resp. 1x šroubový držák (4) vložte do odpovídajících úchytů (5) vaničky (3) a na vhodném místě připevněte k vozíku.

 Montážní obrázky (6) a (7) znázorňují možné varianty upevnění.

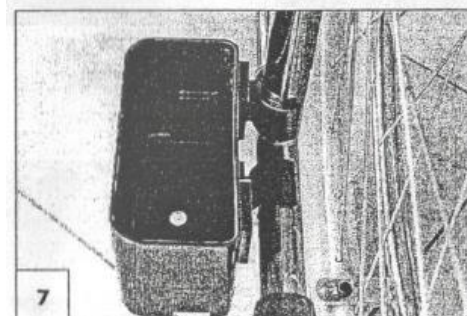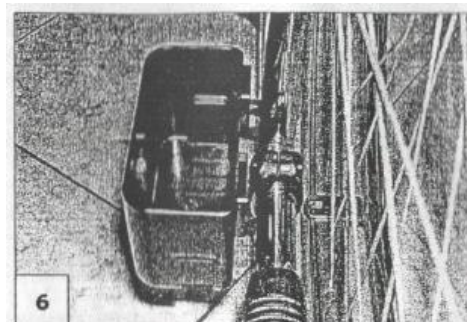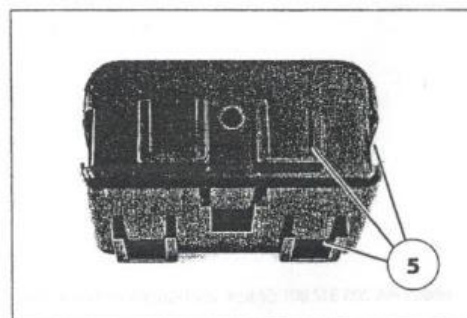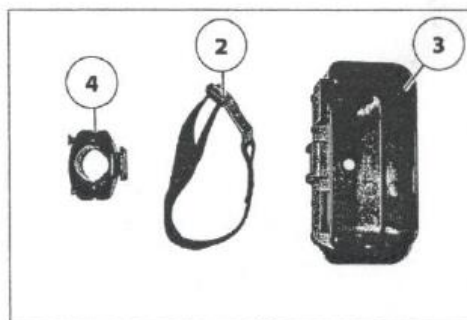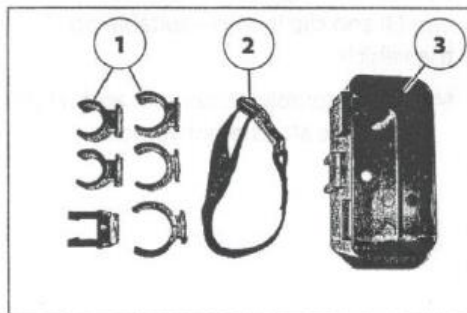

MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf
Německo
Tel +49 5733 922 – 311
info@meyra.de
www.meyra.de