

Terapeutický stolek transparentní, násuvný

výškově nastavitelný

Poznámka:

Následující montážní práce by měl provádět odborný servis.

Zamýšlené použití

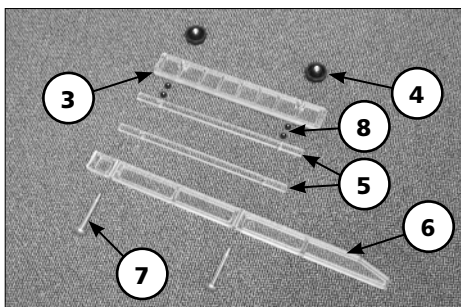
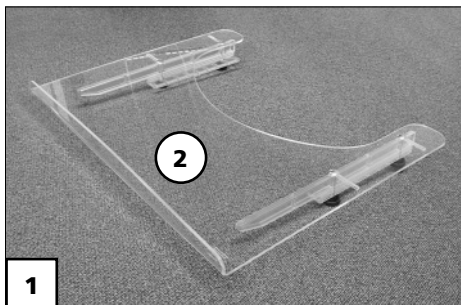
Terapeutický stolek (1), který lze nasadit na područky, slouží jako odkládací plocha .

Přehled



- (2) 1x Terapeutický stolek transparentní
- (3) 2x Upínací lišta 242 x 36 x 8 mm
- (4) 4x Hvězdicová matice M6
- (5) 4x Podložky 230 x 10 x 5 mm
- (6) 2x Vodící lišta 402 x 26 x 10 mm
- (7) 4x Šroub M6 x 55
- (7a) 4x Šroub M6 x 65
- (8) 8x Distanční podložka černá

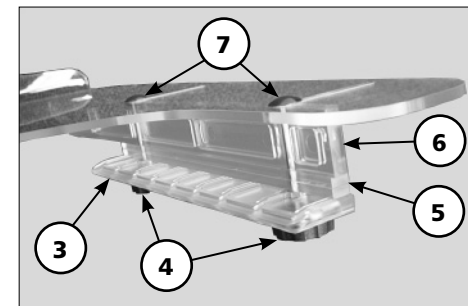
Poznámka:

V závislosti na variantě provedení se mezi upínací lištu (3) a podložky (5) umísťují černé distanční podložky (8).




Bezpečnostní pokyny

-  Během celého procesu montáže věnujte pozornost upínacím bodům - nebezpečí skřípnutí!
-  Během montáže udržujte pracovní plochu čistou , aby nedošlo k poškození plochy terapeutického stolku.



Montáž držáku na každou stranu

1. Šrouby (7) nasuňte shora do otvorů s drážkami.
 2. Nasuňte vodící lištu (6).
 3. V závislosti na typu područky nasadte jednu nebo obě podložky (5).
 4. Nasuňte upínací lištu (3) šikmou stranou směrem dovnitř a směrem k ploše terapeutického stolku.
 5. Mírně zašroubujte hvězdicové matice (4).
 6. Nasuňte terapeutický stolek na područky a vyrovnejte jej do středu.
 7. Nastavte držáky na šířku sedu tak, že je zasunete do otvorů s drážkami.
 8. Hvězdicové matice (4) pevně zašroubujte.
-  Pod bodem 3. nasuňte případně zbývající podložku (5).