

Etac Immedia EasyTurn

Měkká otočná podložka.

Podložka usnadní každodenní činnosti jako vystupování/nastupování z/do auta, otočení se na židli či na posteli. Pomůcka se velmi snadno používá. Protiskluzový potah na spodní straně zabraňuje posunu pomůcky na místě použití. Velmi nízké tření umožňuje otočení a snadné dosažení požadované pozice.

Technické údaje:

| | | | |
|--------------|------|------|------|
| Rozměry (cm) | Ø 40 | Ø 45 | Ø 50 |
| Nosnost (kg) | 150 | | |

Použití:

V autě: Umístěte podložku doprostřed sedačky. Posad'te se na střed podložky. Následně nadzvedněte obě nohy současně či jednotlivě každou nohu postupně a otočte tělo dovnitř auta.

Na židli: Umístěte podložku doprostřed židle. Posad'te se na střed podložky a následně se pootočte ke stolu.

Na posteli: Umístěte podložku na okraj postele tak, aby stabilně byla celým povrchem na lůžku. Posad'te se na podložku. Následně nadzvedněte nohy a otočte se. Po přenesení váhy těla na lůžko na jednu stranu lze podložku odejmout na straně druhé. Pokud nezvednete nohy samostatně, lze použít pomůcku Immedia One Man Sling.

Upozornění!

- Před použitím zkontrolujte, zda není pomůcka poškozená (např. naprasklý materiál)! Hrozí nebezpečí pádu a zranění. V případě poškození se nikdy nesnažte pomůcku samostatně opravit.
- Zajistěte, aby každý manuální přesun proběhl hladce. Manuální přesun si vždy promyslete dopředu.
- Dbejte na bezpečnost jak sebe tak pečovatele.
- Pokud používáte více pomůcek v kombinaci, vždy se ujistěte o maximální bezpečnosti všech úkonů.
- Před prvním použitím se o správném použití pomůcky poraďte s odborným personálem (rehabilitační pracovník, fyzioterapeut atd.).

Materiál: polyesterový samet, nylon

Čištění: pomůcku lze prát na 30°C, nesušit v sušičce, nežehlit, nepoužívat změkčovací prostředky

Výrobce:

Etac Immedia A/S
Egeskovvej 12
DK-8700 Horsens, Denmark
etac.immedia@etac.com

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
tel.: +420 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz

