

## Etac Immedia SmartMove

Otevřená transportní podložka s úchyty určená pro podporu druhou osobou.

Transportní podložka slouží jako podpora při úkonech vstávání a sedání z/na lůžko, invalidní vozík či křeslo. Pomůcka zajistí správnou a bezpečnou pozici pečovatele při provádění těchto úkonů. Čtyři držadla poskytují pevné držení a vnitřní strana pásu z neklouzavého materiálu snadný a maximálně bezpečný přesun pacienta.

### Technické údaje:

Rozměry: 21 x 60 cm

Počet úchytů: 4

Nosnost podložky: 150 kg

### Použití:

Pro pomoc pacientovi při vstávání se nejprve ujistěte, že je pacient schopný stát. Podložku umístěte do úrovně sedací části pacienta. S využitím přenosu hmotnosti a tahem za úchyty podložky pomozte pacientovi se postavit a případně jej naved'te na jiné sedadlo.

### Upozornění!

- Před použitím zkontrolujte, zda není pomůcka poškozená (např. naprasklý materiál)! Hrozí nebezpečí pádu a zranění. V případě poškození se nikdy nesnažte pomůcku samostatně opravit.
- Pacienta nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Zajistěte, aby se pacient cítil bezpečně a každý manuální přesun proběhl hladce. Manuální přesun si vždy promyslete dopředu.
- Dbejte na bezpečnost jak pacienta, tak sebe/pečovatele.
- Pokud používáte více pomůcek v kombinaci, vždy se ujistěte o maximální bezpečnosti všech úkonů.
- Před prvním použitím by se pečující osoba o správném použití pomůcky měla poradit s odborným personálem (rehabilitační pracovník, fyzioterapeut atd.).

**Materiál:** nylon, polyuretan, polyester

**Čištění:** pomůcku lze prát na 30°C, nesušit v sušičce, nežehlit, nepoužívat změkčovací prostředky

### Distribuce a servis:

**MEYRA ČR s. r. o.**

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)

### Výrobce:

Etac Immedia A/S

Egeskovvej 12

DK-8700 Horsens, Denmark

etac.immedia@etac.com

